


AtmosAir Velaris

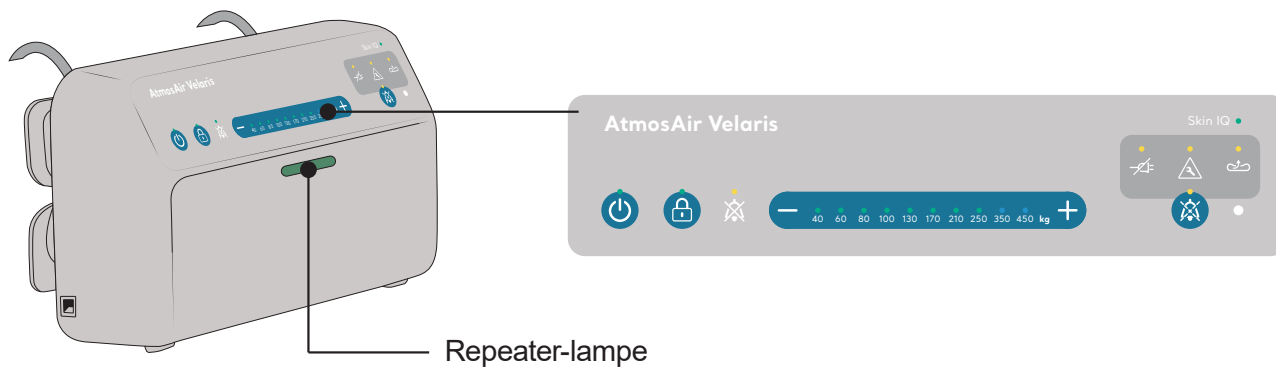

Start/standby-knapp og -lampe

Start/standby-knappen veksler pumpen mellom startmodus og standby-modus.

Lampen er tent i driftsmodus.

Hold inne knappen i to sekunder i standby-modus. Lampen slås av.



Låseknapp og lampe

Kontrollpanelet låses ved å holde inne låseknappen i 2 sekunder. Lampen tennes når det er låst.

Hold inne låseknappen i to sekunder for å låse opp alle knappene på kontrollpanelet. Lampen slukkes når det er låst opp.



Lyd av-lampe

Lyd av-lampen tennes når lydvarslingene og alarmene er permanent deaktivert.



Vektvelgerknapper og lampe

Standardvekten er innstilt og lyser ved 100 kg (220 lb).

- Trykk på knappen - for å redusere pasientvekten.
- Trykk på knappen + for å øke pasientvekten.



Lydalarm-pauseknapp og lampe

Trykk på pauseknappen for lydalarm for å slå av lydalarmen i 15 minutter. Lampen tennes.

Trykk på knappen igjen for å avbryte alarmpausen.



Strømbruddlampe

Hvis et strømbrudd registreres, tennes strømbruddlampen og en alarm utløses.

Aktiv (alternerende) behandling er ikke mulig under strømbrudd.



Systemfeillampe

Hvis en intern feil på pumpen registreres i løpet av den innebygde selvtesten (BIST) eller under behandling, tennes systemfeillampen og en alarm utløses.



Lampe for lavt trykk

Hvis madrassen ikke oppnår ønsket trykk, tennes lampen for lavt trykk, og en alarm utløses.



Skin-IQ-lampe

Skin-IQ-lampene tennes når et Skin-IQ-laken kobles til Skin IQ-strømuttaksporten.

