


# AtmosAir Velaris

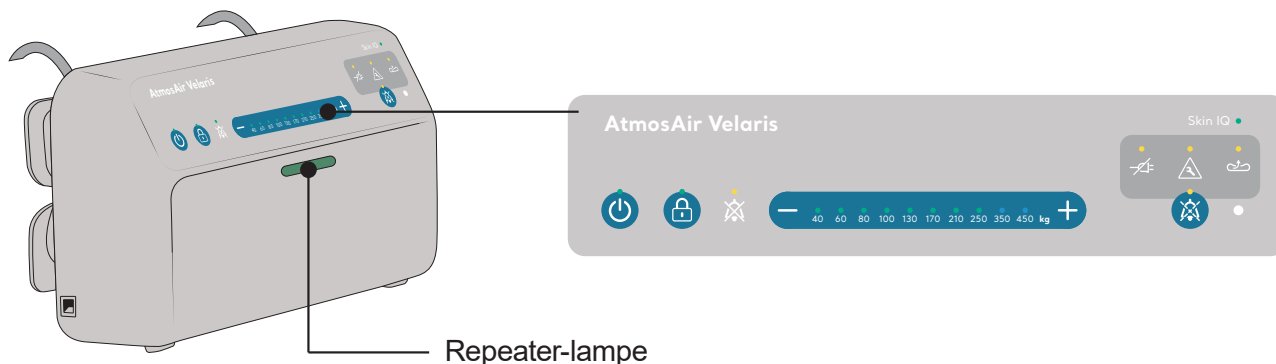

## Start/standby-knapp og -lampe

Start/standby-knappen veksler pumpen mellom startmodus og standby-modus.

Lampen er tent i driftsmodus.

Hold inne knappen i to sekunder i standby-modus. Lampen slås av.



## Låseknapp og lampe

Kontrollpanelet låses ved å holde inne låseknappen i 2 sekunder. Lampen tennes når det er låst.

Hold inne låseknappen i to sekunder for å låse opp alle knappene på kontrollpanelet. Lampen slukkes når det er låst opp.



## Lyd av-lampe

Lyd av-lampen tennes når lydvarslingene og alarmene er permanent deaktivert.



## Vektvelgerknapper og lampe

Standardvekten er innstilt og lyser ved 100 kg (220 lb).

- Trykk på knappen - for å redusere pasientvekten.
- Trykk på knappen + for å øke pasientvekten.



### **Lydalarm-pauseknapp og lampe**

Trykk på pauseknappen for lydalarm for å slå av lydalarmen i 15 minutter. Lampen tennes.

Trykk på knappen igjen for å avbryte alarmpausen.



### **Strømbruddlampe**

Hvis et strømbrudd registreres, tennes strømbruddlampen og en alarm utløses.

Aktiv (alternerende) behandling er ikke mulig under strømbrudd.



### **Systemfeillampe**

Hvis en intern feil på pumpen registreres i løpet av den innebygde selvtesten (BIST) eller under behandling, tennes systemfeillampen og en alarm utløses.



### **Lampe for lavt trykk**

Hvis madrassen ikke oppnår ønsket trykk, tennes lampen for lavt trykk, og en alarm utløses.



### **Skin-IQ-lampe**

Skin-IQ-lampene tennes når et Skin-IQ-laken kobles til Skin IQ-strømuttaksporten.

