


AtmosAir Velaris

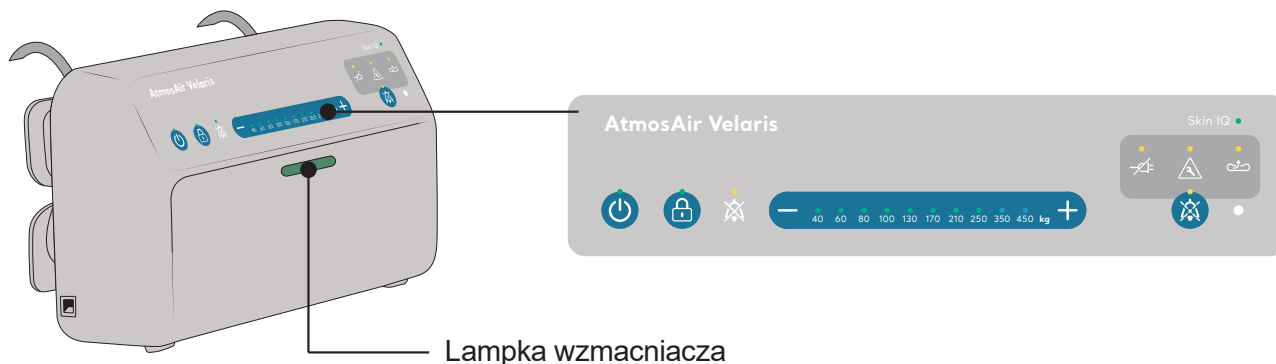

Przycisk i lampka trybu Praca/Uśpienie

Przycisk trybu Praca/Uśpienie przełącza pompę między trybem pracy a trybem uśpienia.

W trybie pracy świeci się lampka.

Aby przejść do trybu uśpienia, nacisnąć i przytrzymać przycisk przez dwie sekundy. Lampka zgaśnie.



Przycisk i lampka blokady

Aby zablokować panel sterowania, nacisnąć i przytrzymać przycisk blokady przez 2 sekundy. Po zablokowaniu lampka się włączy.

Aby odblokować wszystkie przyciski panelu sterowania, nacisnąć i przytrzymać przycisk blokady przez dwie sekundy. Po odblokowaniu lampka zgaśnie.



Lampka wyłączenia dźwięku

Lampka wyłączenia dźwięku włącza się, gdy powiadomienia dźwiękowe i alarmy są wyłączone na stałe.



Przyciski i lampka wyboru wagi

Domyślnie waga pacjenta jest ustawiona na 100 kg (220 lb).

- Nacisnąć przycisk -, aby zmniejszyć wagę pacjenta.
- Nacisnąć przycisk +, aby zwiększyć wagę pacjenta.



Przycisk i lampka przerwy alarmu dźwiękowego

Nacisnąć przycisk przerwy alarmu dźwiękowego, aby wyciszyć alarm dźwiękowy na 15 minut; lampka zaświeci się.

Ponowne naciśnięcie przycisku anuluje przerwę alarmu dźwiękowego.



Lampka awarii zasilania

W przypadku wykrycia awarii zasilania włącza się lampka awarii zasilania i alarm dźwiękowy.

Aktywna (naprzemienna) terapia nie jest możliwa w przypadku awarii zasilania.



Lampka usterki systemu

Jeśli podczas autotestu (BIST) lub terapii zostanie wykryta wewnętrzna usterka pompy, zapali się lampka awarii systemu i włączy się alarm dźwiękowy.



Lampka niskiego ciśnienia

Jeśli materac nie osiągnie docelowej wartości ciśnienia, zaświeci się lampka niskiego ciśnienia i włączy się alarm dźwiękowy.



Lampka Skin-IQ

Lampka Skin-IQ włącza się po podłączeniu pokrycia Skin-IQ do gniazda zasilania Skin IQ.

