


AtmosAir Velaris

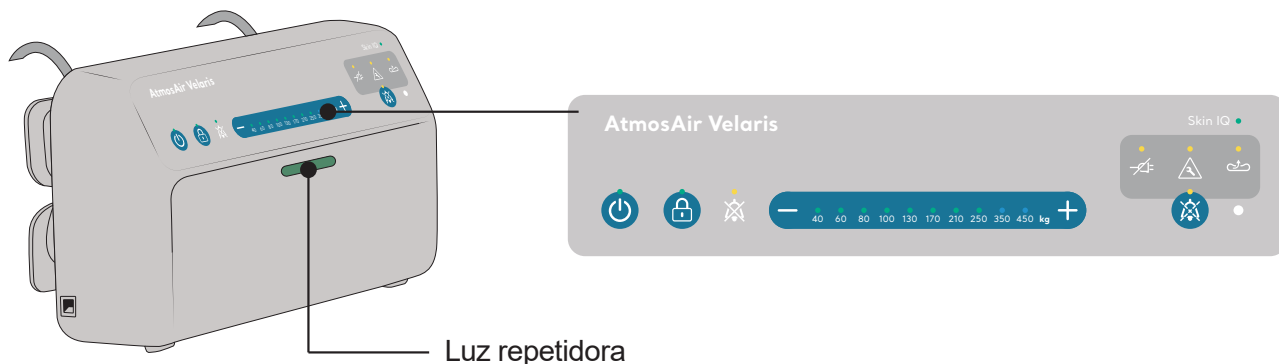

Botão e luz Ligado/Em espera

O botão Ligado/Em espera comuta a bomba entre o modo Ligado e o modo Em espera.

No modo Ligado, a luz está acesa.

Para o modo Em espera, prima o botão e mantenha premido durante dois segundos. A luz apaga-se.



Botão e luz Bloqueio

Para bloquear o painel de controlo, prima o botão de bloqueio e mantenha premido durante 2 segundos. Quando está bloqueado, a luz acende-se.

Para desbloquear todos os botões do painel de controlo, prima o botão de bloqueio e mantenha premido durante dois segundos. Quando está desbloqueado, a luz apaga-se.



Luz Áudio desligado

A luz Áudio desligado acende-se quando as notificações de áudio e os alarmes tiverem sido desativados permanentemente



Botões e luz Seleção de peso

O peso predefinido é definido e aceso aos 100 kg (220 lb).

- Prima o botão - para reduzir o peso do paciente.
- Prima o botão + para aumentar o peso do paciente.



Botão e luz Alarme áudio em pausa

Prima o botão Alarme áudio em pausa para silenciar o alarme sonoro durante 15 minutos, a luz acende-se.

Prima o botão de novo para cancelar a pausa do alarme.



Luz Falha de energia

Se for detetada uma falha de energia, a luz Falha de energia acende-se e soa um alarme.

A terapia ativa (alternada) não é possível durante condições de falha de energia.



Luz Falha do sistema

Se for detetada uma falha interna da bomba durante o Autoteste integrado (BIST) ou durante a terapia, a luz Falha do sistema acende-se e soa um alarme.



Luz Pressão baixa

Se o colchão não conseguir atingir a pressão pretendida, a luz Pressão baixa acende-se e soa um alarme.

Skin IQ 

Luz Skin IQ

A luz do Skin IQ acende-se quando uma proteção do Skin IQ é ligada à porta da tomada elétrica do Skin IQ.

