



## Knapp och lampa för På/Standby

Med På/Standby-knappen växlar du mellan lägena På och Standby för pumpen.

Lampan är tänd i På-läge.

För standbyläge håller du knappen intryckt i två sekunder. Lampan släcks.



## Låsknapp och låslampa

Lås kontrollpanelen genom att hålla låsknappen intryckt i två sekunder. När den är låst tänds lampan.

Lås upp alla knappar på kontrollpanelen genom att hålla låsknappen intryckt i två sekunder. När de är upplåsta släcks lampan.



## Lampa för Ljud av

Lampan Ljud av tänds när ljudmeddelanden och larm har inaktiverats permanent.



## Knappar och lampa för viktval

Standardvikten är inställd på och lampan tänds vid 100 kg (220 lb).

- Tryck på knappen - för att minska patientens vikt.
- Tryck på knappen + för att öka patientens vikt.



### **Pausknapp och lampa för ljudlarm**

Tryck på pausknappen för ljudlarm för att tysta ljudlarmet i 15 minuter. Lampan tänds.

Tryck på knappen igen för att avbryta paus av larmet.



### **Lampa för strömavbrott**

Om ett strömavbrott upptäcks tänds lampan för strömavbrott och ett larm ljuder.

Vid strömavbrott är aktiv (växlande) behandling inte möjlig.



### **Lampa för systemfel**

Om ett internt fel i pumpen upptäcks under inbyggt självtest (BIST) eller behandling tänds lampan för systemfel och ett larm ljuder.



### **Lampa för lågt tryck**

Om madrassen inte uppnår måltrycket tänds lampan Lågt tryck och ett larm ljuder.



### **Skin-IQ-lampa**

Skin-IQ-lampan tänds när ett Skin-IQ-överdrag ansluts till Skin IQ-uttaget.

