

Desinfektionsmittel

DESINFEKTIONSMITTEL	HYBRIDMATRATZEN-SYSTEM	OBERER BEZUG	UNTERER BEZUG
Alkohollösung ≤ 70 %	●	●	●
Chlorlösung ≤ 1 % (10.000 ppm) ¹	●	●	●
Quartäres Ammonium 1920 ppm	●	●	●
Quartäre Ammoniumlösung 3–15 %		●	●
Wasserstoffperoxidlösung, 3–10 %		●	

¹ Je nach Verunreinigung und örtlichen Richtlinien kann die Chlorkonzentration zwischen 250 und 10.000 ppm variieren.

HINWEIS

Nach der Desinfektion mit den einzelnen Chemikalien vor der Lagerung gründlich mit sauberem Wasser abspülen und trocknen, um Chemikalienrückstände zu entfernen.



WARNUNG

- Arbeiten Sie immer mit Schutzbrille und Schutzhandschuhen, um Augen- oder Hautverletzungen zu vermeiden. Kommt es doch zu einem Kontakt, spülen Sie die betroffenen Stellen mit reichlich Wasser ab. Suchen Sie bei Haut- oder Augenreizungen sofort einen Arzt auf. Lesen Sie stets das Sicherheitsdatenblatt für das Desinfektionsmittel.
- Trennen Sie den Kompressor vor der Reinigung und Wartung zur Vermeidung von Stromschlägen stets von der Stromquelle.
- Um eine Kreuzkontamination zu verhindern, müssen Sie immer nach den Desinfektionsanweisungen in dieser Bedienungsanleitung vorgehen.
- Um Augen- oder Hautreizungen zu vermeiden, dürfen Sie die Desinfektion nie in Anwesenheit eines Patienten durchführen.

Für die Reinigung/Desinfektion benötigtes Zubehör

- Schutzbrille
- Schutzhandschuhe
- Sprühflasche mit Reinigungslösung
- Sprühflasche mit Desinfektionsmittellösung
- Sprühflasche mit Wasser
- Tücher



Reinigung und Desinfektion

(26 Schritte)

Zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Reinigung und Desinfektion müssen nach jedem Patienten die folgenden Schritte ausgeführt werden.

Vorbereitung des Kompressors

1. Trennen Sie den Kompressor von der Matratze.
2. Wählen Sie an der Kompressoreinheit Standby. Trennen Sie den Kompressor von der Stromversorgung.

Reinigung des Kompressors

3. Setzen Sie die Schutzbrille auf und ziehen Sie die Schutzhandschuhe an.
4. Sprühen Sie die Reinigungslösung auf ein sauberes Tuch.
5. Wischen Sie alle Bereiche der Pumpe ab, um etwaige Ablagerungen und sichtbaren Schmutz zu entfernen.
6. Alle Bereiche gemäß Bedarf mit dem Tuch von Schmutzrückständen befreien.
7. Verwenden Sie ein neues, mit Wasser getränktes Tuch, um sämtliche Rückstände der Reinigungslösung abzuwischen.
8. Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um überschüssige Feuchtigkeit vom Kompressor zu entfernen.

Desinfektion des Kompressors

9. Sprühen Sie Desinfektionsmittel auf ein sauberes Tuch und wischen Sie alle Bereiche des Kompressors ab.
10. Lassen Sie das Desinfektionsmittel gemäß den Anweisungen des Desinfektionsmittelherstellers einwirken.
11. Verwenden Sie ein neues, mit Wasser getränktes Tuch, um sämtliche Rückstände der Desinfektionslösung von der Pumpe abzuwischen.
12. Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um überschüssige Feuchtigkeit vom Kompressor zu entfernen.
13. Lassen Sie den Kompressor an der Luft trocknen.

Reinigung der Matratzen-/Sitzkissenbezüge

HINWEIS

Der obere Bezug sollte auf den Grad der Verschmutzung geprüft werden. Bei übermäßiger Verschmutzung sollte der obere Bezug gewaschen werden. Der untere Bezug sollte stets durch Abwischen gereinigt und desinfiziert werden.

14. Sprühen Sie alle äußeren Bereiche des oberen und unteren Bezugs der Matratze/des Sitzkissens mit der Reinigungslösung ein. Wischen Sie den Matratzenanschluss sowie die Aussparung für den Anschluss sorgfältig ab. Etwaige Verschmutzungen mit einem sauberen Tuch abwischen.
15. Bereiche mit Schmutzrückständen (z. B. Handgriffe) je nach Bedarf mit der Reinigungslösung reinigen.
16. Verwenden Sie ein neues, mit Wasser getränktes Tuch, um alle Rückstände der Reinigungslösung zu entfernen.
17. Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen.

Desinfektion der Matratzen-/Sitzkissenbezüge

18. Sprühen Sie Desinfektionsmittel auf ein sauberes Tuch und wischen Sie alle äußeren Bereiche und Griffe des oberen und unteren Bezugs der Matratze/des Sitzkissens ab. Wischen Sie den Matratzenanschluss sowie die Aussparung für den Anschluss sorgfältig ab.
19. Lassen Sie das Desinfektionsmittel gemäß den Anweisungen des Desinfektionsmittelherstellers einwirken.
20. Verwenden Sie ein neues, mit Wasser getränktes Tuch, um sämtliche Rückstände der Desinfektionslösung von der Matratze/dem Sitzkissen abzuwischen.
21. Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen.
22. Lassen Sie den oberen und unteren Bezug der Matratze/des Sitzkissens an der Luft trocknen.

Waschen des oberen Bezugs der Matratze/des Sitzkissens

23. Öffnen Sie den Reißverschluss und entfernen Sie den oberen Bezug von der Matratze/dem Sitzkissen.
24. Den oberen Bezug bei einer maximalen Temperatur von 80 °C (176 °F) mit Reinigungsmittel waschen.
25. Nach dem Waschen den oberen Bezug (vorzugsweise) an der Luft trocknen lassen oder bei 40 °C (104 °F) bis maximal 80 °C (176 °F) im Trockner trocknen.
26. Ziehen Sie den oberen Bezug nach der Trocknung wieder auf die Matratze/das Sitzkissen.