

Środki dezynfekcyjne

ŚRODEK DEZYNFEKCYJNY	MATERAC HYBRYDOWY	POKROWIEC GÓRNY	POKROWIEC DOLNY
Roztwór alkoholu ≤ 70%	●	●	●
Roztwór chloru ≤ 1% (10 000 ppm) ¹	●	●	●
Czwartorzędowe sole amonowe 1920 ppm	●	●	●
Czwartorzędowy roztwór amonu 3-15%		●	●
Roztwór nadtlenu wodoru, 3-10%.		●	

¹ Stężenie chloru może zawierać się w przedziale od 250 ppm do 10.000 ppm w zależności od stanu zanieczyszczenia i przepisów lokalnych.

WSKAZÓWKA

Przed odłożeniem do przechowywania przepłukać czystą wodą i dokładnie osuszyć, aby usunąć pozostałości środków chemicznych wykorzystanych do dezynfekcji.



UWAGA

- Aby uniknąć podrażnień oczu lub skóry, należy zawsze stosować ochronne okulary i rękawice. W razie kontaktu przepłukać skórę lub oczy dużą ilością wody. W przypadku podrażnienia oczu lub skóry zgłosić się do lekarza. Należy zawsze przeczytać kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej środka dezynfekcyjnego.
- Aby uniknąć porażenia prądem, przed czyszczeniem i dezynfekcją pompy należy zawsze odłączyć ją od zasilania.
- Aby zapobiec zakażeniom krzyżowym, należy zawsze postępować zgodnie z instrukcją dezynfekcji zawartą w tej Instrukcji obsługi.
- Aby uniknąć podrażnienia oczu lub skóry, nigdy nie przeprowadzać dezynfekcji w obecności pacjenta.

Akcesoria potrzebne do czyszczenia/dezynfekcji

- Okulary ochronne
- Rękawice ochronne
- Spryskiwacz z roztworem czyszczącym
- Spryskiwacz z roztworem dezynfekcyjnym
- Spryskiwacz z wodą
- Ściereczki



Czyszczenie i dezynfekcja

(26 kroków)

Aby odpowiednio wyczyścić i zdezynfekować urządzenie, należy zawsze wykonywać procedurę po każdym pacjencie.

Przygotowanie pompy

1. Odłączyć pompę od materaca.
2. Wybrać tryb uśpiania pompy. Odłączyć pompę od źródła zasilania.

Czyszczenie pompy

3. Założyć okulary i rękawice ochronne.
4. Rozpylić roztwór myjący na czystą ściereczkę.
5. Wytrzeć wszystkie powierzchnie pompy, tak aby usunąć osad i widoczny brud.
6. W razie potrzeby usunąć ściereczką pozostałe zanieczyszczenia.
7. Użyć nowej ściereczki nasączonej wodą, aby zetrzeć wszelkie ślady roztworu czyszczącego.
8. Suchą szmatką usunąć nadmiar wilgoci z pompy.

Dezynfekcja pompy

9. Rozpylić środek dezynfekcyjny na czystą ściereczkę i wytrzeć wszystkie powierzchnie pompy.
10. Odczekać odpowiedni czas na dezynfekcję wskazany w instrukcjach producenta środka dezynfekcyjnego.
11. Użyć nowej ściereczki nasączonej wodą, aby usunąć z pompy wszelkie ślady środka dezynfekcyjnego.
12. Suchą szmatką usunąć nadmiar wilgoci z pompy.
13. Pozostawić pompę do wyschnięcia na powietrzu.

Czyszczenie pokrowców na materac / siedzisko

WSKAZÓWKA

Sprawdzić poziom zanieczyszczenia górnego pokrowca. Jeśli zanieczyszczenie zostanie uznane za nadmierne, wyprać górny pokrowiec. Dolny pokrowiec należy wyczyścić i zdezynfekować przed każdą zmianą pacjenta.

14. Spryskać środkiem czyszczącym wszystkie dolne i górne pokrowce zewnętrznych powierzchni materaca / siedziska. Starannie wytrzeć złącze materaca wraz z wgłębieniem, w którym się znajduje. Zetrzeć zabrudzenia czystą szmatką.
15. W razie potrzeby usunąć pozostałe zanieczyszczenia (np. z uchwytów) roztworem czyszczącym.
16. Użyć nowej ściereczki nasączonej wodą, aby zetrzeć wszelkie ślady roztworu czyszczącego.
17. Suchą szmatką usunąć nadmiar wilgoci.

Dezynfekcja pokrowców na materac / siedzisko

18. Spryskać środkiem dezynfekcyjnym wszystkie dolne i górne pokrowce zewnętrznych powierzchni materaca / siedziska oraz uchwyty. Starannie wytrzeć złącze materaca wraz z wgłębieniem, w którym się znajduje.
19. Odczekać odpowiedni czas na dezynfekcję wskazany w instrukcjach producenta środka dezynfekcyjnego.
20. Użyć nowej ściereczki nasączonej wodą, aby usunąć z materaca / siedziska wszelkie ślady środka dezynfekcyjnego.
21. Suchą szmatką usunąć nadmiar wilgoci.
22. Pozostawić górny i dolny pokrowiec materaca lub siedziska do wyschnięcia na powietrzu.

Umyć górny pokrowiec materaca / siedziska

23. Rozpiąć zamek błyskawiczny i zdjąć górny pokrowiec z materaca / siedziska.
24. Wyprać górny pokrowiec w maksymalnej temperaturze wody 80°C (176°F) z detergentem.
25. Po praniu pozostawić górny pokrowiec do wyschnięcia na powietrzu (zalecane) lub w suszarce bębnowej w temperaturze 40°C (104°F) lub maksymalnej temperaturze 80°C (176°F).
26. Po wyschnięciu ponownie założyć górny pokrowiec na materac / siedzisko.

