


# AtmosAir Velaris – Plus Flex

Zur Verwendung mit dem Citadel Plus Bettrahmen

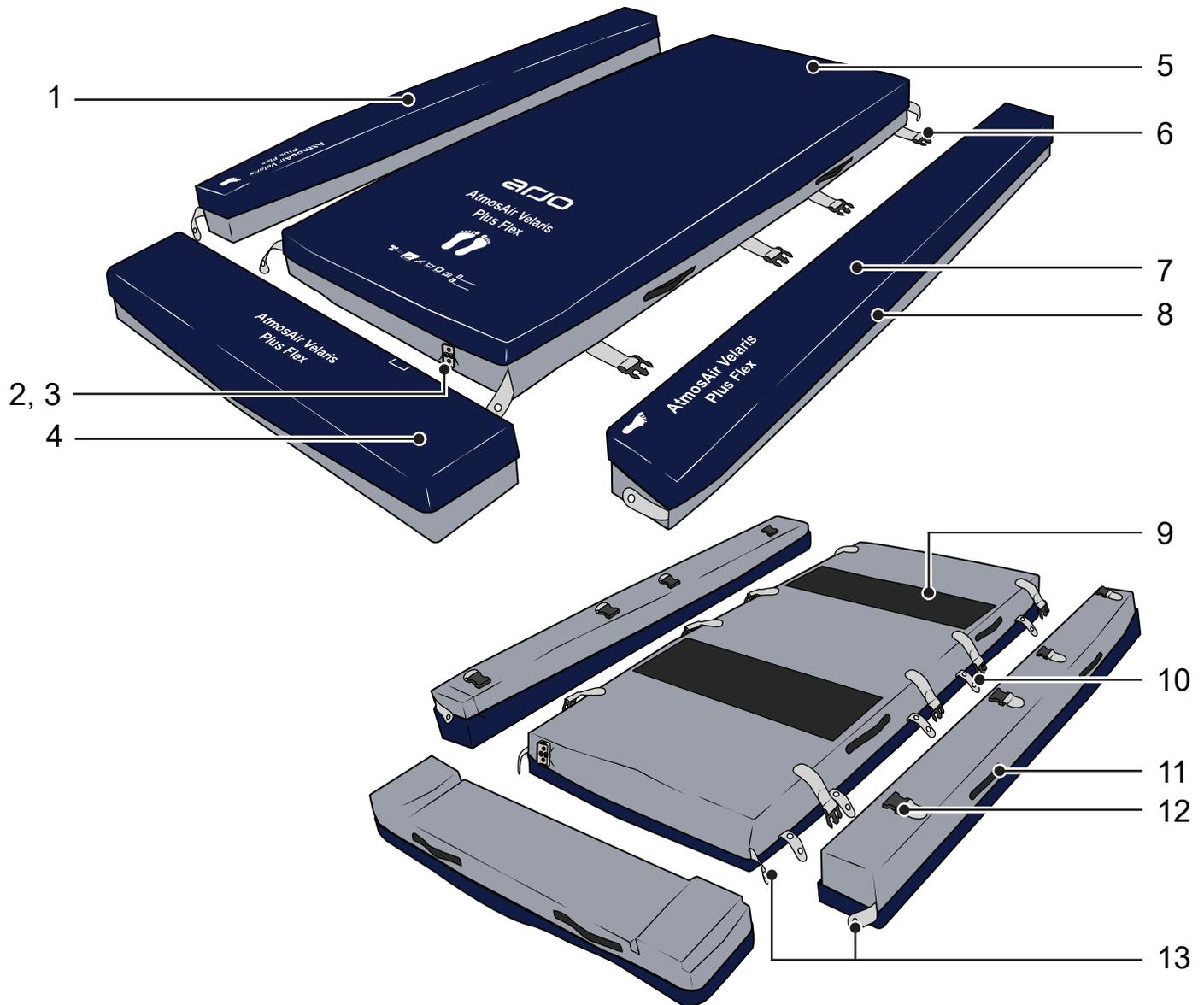

1. Linkes Seitenpolster
2. Matratzenanschluss
3. Aussparung für den Matratzenanschluss
4. Fußpolster
5. Matratze
6. Schnallen (vier auf jeder Seite)
7. Rechtes Seitenpolster
8. Reißverschluss zur Befestigung des Bezugs mit Reißverschluss-Abdeckung
9. Antirutschstreifen
10. Kabelführungsschlaufen
11. Griffe (zwei an jedem Polster)
12. Schnallen (vier an jedem Polster)
13. Haltebänder der Seitenpolster (zwei am Kopfende, zwei am Fußende)

## Installation des Plus Flex Systems

Verwenden Sie das Plus Flex System nur mit einem Citadel Plus Bettrahmen.

Für eine aktive Therapie installieren Sie das Plus Flex System zusammen mit dem AtmosAir Velaris Kompressor.

Für eine reaktive Therapie schließen Sie den Kompressor nicht an. Wenn die Matratze an den Kompressor angeschlossen ist, trennen Sie den Anschluss des Kompressorschlauchsets.

1. Platzieren Sie die Plus Flex Matratze mittig auf dem Bettrahmen.
2. Für eine aktive Therapie hängen Sie den Kompressor am Fußende des Bettes ein. Für eine reaktive Therapie gehen Sie zu Schritt 6.

3.




### WARNUNG

Verwenden Sie zur Vermeidung von Stolper- und Strangulationsgefahren stets die Kabelführung für das Netzkabel.

Legen Sie das Netzkabel des Kompressors in die Kabelführungsschlaufen. Wenn das Fußpolster verwendet wird, lassen Sie für das Kabel am Fußende des Bettes etwas Spielraum.

4. Sichern Sie das Kabel mit den Sicherungsclips.

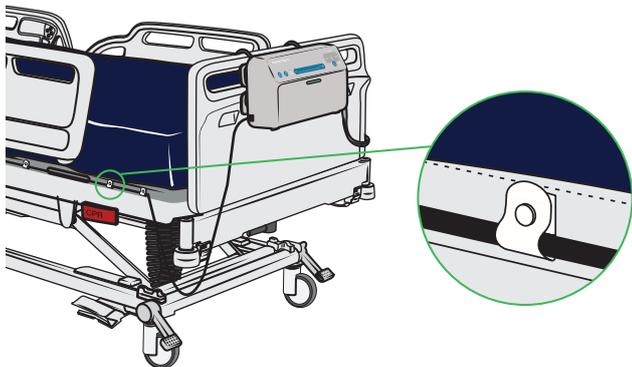

5. Klappen Sie die Reißverschlussabdeckung über das Netzkabel und die Schlaufen.

6.




### WARNUNG

Um die Sturz- oder Einklemmgefahren zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass beim Anbringen oder Entfernen der Polster auf der offenen Seite des Bettrahmens eine Pflegekraft steht.

Verbreitern Sie die linke Seite des Citadel Plus Bettrahmens vollständig. Anweisungen dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Citadel Plus.

7. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Matratzenschnallen (vier auf jeder Seite) oben auf dem erweiterten Bettrahmen befinden.

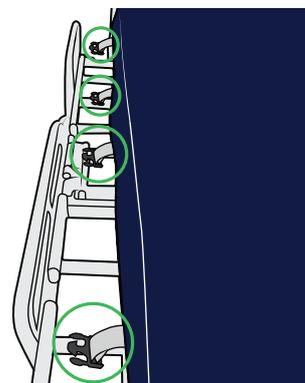

8. Legen Sie das linke Seitenpolster an den Rand der Matratze. Achten Sie darauf, dass sich der Fußabdruck am Fußende befindet und die Griffe nach oben zeigen.




9. Richten Sie die Schnallen am Seitenpolster auf die Schnallen an der Matratze aus.

10. Machen Sie die vier Schnallen fest.



11. Klappen Sie das Seitenpolster auf den Bettrahmen herunter. Stellen Sie sicher, dass das Seitenpolster fest in der Erweiterung sitzt und bündig mit der Matratze abschließt.


12. Befestigen Sie die Seitenpolster mithilfe der Sicherungsclips an den Haltebändern an der Matratze. Am Fußende und am Kopfende befinden sich jeweils zwei davon.

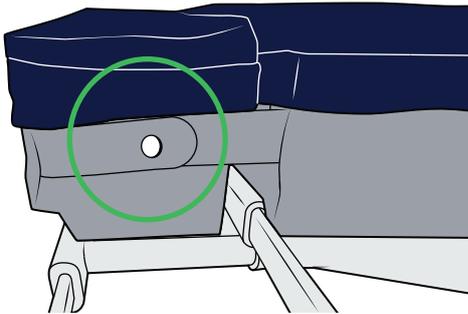

13. Wiederholen Sie die Schritte 6–12 für das rechte Seitenpolster.


14. Fahren Sie den Citadel Plus Bettrahmen vollständig der Länge nach aus.

15. Ziehen Sie den Schlauchanschluss am Kompressor durch den Spalt am Fußende auf der rechten Seite des Bettrahmens.

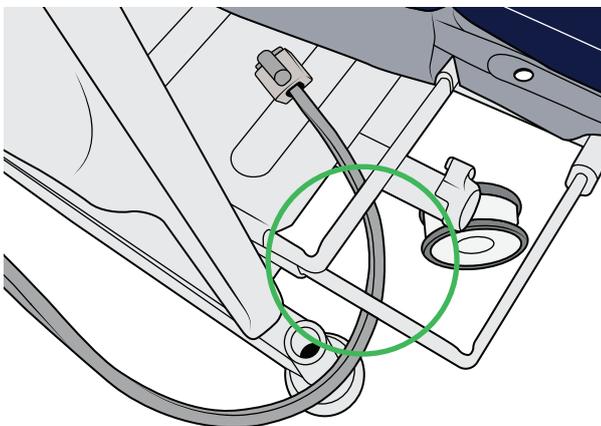


16. Ziehen Sie den Matratzenanschluss leicht aus seiner Aussparung.

17. Stecken Sie die Stecker zusammen. Vergewissern Sie sich, dass der Schlauchsystemanschluss des Kompressors auf beiden Seiten einrastet (Doppelklick).

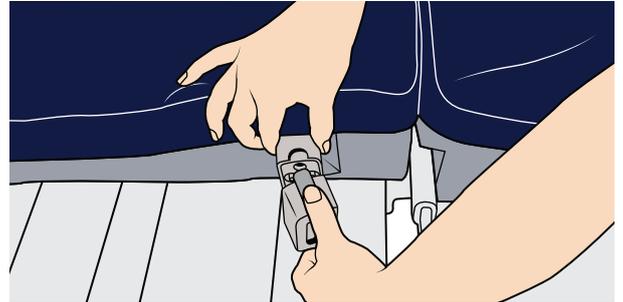

18. Drücken Sie den Matratzenanschluss zurück in die Aussparung an der Matratze.

19. Platzieren Sie das Fußpolster am Fußende der Matratze.

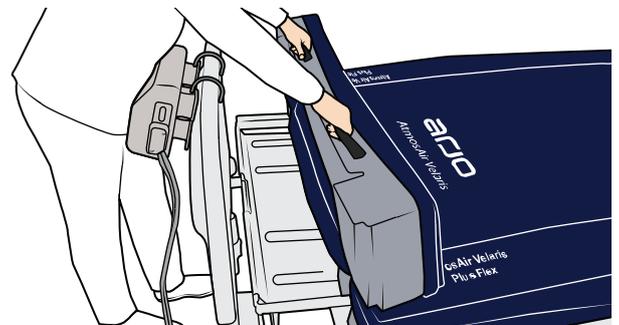


20. Klappen Sie das Fußpolster auf den Bettrahmen herunter. Achten Sie darauf, dass die Stecker auf die quadratische Markierung auf der oberen Abdeckung des Fußpolsters ausgerichtet sind.




21. Bringen Sie die Reißverschlussabdeckung wieder an.

22. Heben Sie das Fußpolster an und legen Sie das Netzkabel in die linke Aussparung.

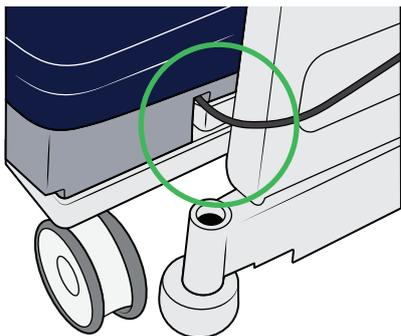

23. Bei allen Polstern ist darauf zu achten, dass:

- Die Polster die gleiche Höhe wie die Matratze haben.
- Der Aufdruck auf der oberen Abdeckung sichtbar ist.
- Sich alle Griffe an den Polstern außen befinden.
- Alle Schnallen sicher an der Matratze befestigt sind.
- Alle Verriegelungsclips am Kopf- und Fußende der Matratze befestigt sind.
- Alle Reißverschlussabdeckungen umgefaltet sind und die Reißverschlüsse abdecken.

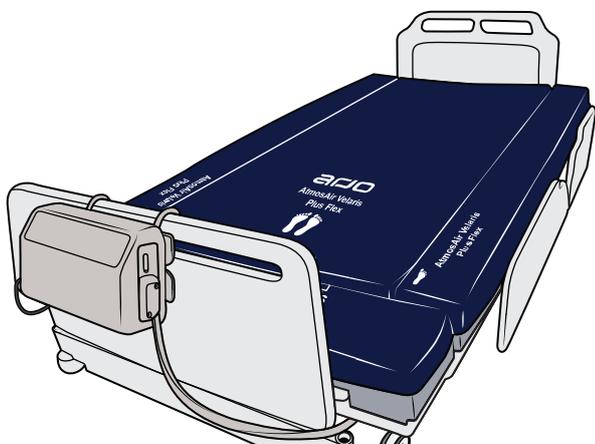

24.

**! WARNUNG**

**Um das Risiko eines Sturzes oder Einklemmens zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass der Patient in der Mitte der Matratze liegt.**

Positionieren Sie den Patienten in der Mitte der Matratze.

25. Stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitsseiten hochgeklappt sind.

### Transportmodus

**! WARNUNG**

**Um die Sturz- oder Einklemmgefahren zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass beim Anbringen oder Entfernen der Polster auf der offenen Seite des Bettrahmens eine Pflegekraft steht.**

Möglicherweise müssen die Seitenpolster und/oder die Fußpolster vor dem Transport entfernt und danach wieder angebracht werden, z. B. um einen Aufzug benutzen zu können.

Stellen Sie sicher, dass sich auf der offenen Seite des Bettes immer eine Pflegekraft befindet und dass sich die Arme und Füße des Pflegebedürftigen/ Patienten nicht in der Nähe der Polster befinden.

Lassen Sie erweiterte Seitenteile niemals offen stehen. Fahren Sie das Fußende oder die Seite des Bettrahmens ein, nachdem Sie alle Polster entfernt haben.

### Wenn der Patient das Bett verlässt

**! WARNUNG**

**Um die Sturzgefahr des Patienten beim Verlassen des Bettes zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass eine Pflegekraft auf der offenen Seite des Bettrahmens steht.**

Wenn der Pflegebedürftige das Bett verlassen muss, stellen Sie sicher, dass auf der offenen Seite immer eine Pflegekraft steht.

## Deinstallation des Plus Flex Systems

Lassen Sie erweiterte Seitenteile nicht offen stehen. Anweisungen zum Einfahren des Bettrahmens finden Sie in der Bedienungsanleitung des Citadel Plus.

1. Heben Sie das Fußpolster heraus.
2. Falls vorhanden, entfernen Sie den Schlauchsystemanschluss des Kompressors.
3. Fahren Sie das Fußende des Bettrahmens ein.
4. Lösen Sie die Haltebänder am linken Seitenpolster.
5. Heben Sie das linke Seitenpolster auf die Matratze.
6. Lösen Sie die vier Schnallen.
7. Lösen Sie gegebenenfalls das Kabel von den Kabelführungsschlaufen.
8. Fahren Sie die linke Seite des Bettrahmens ein.
9. Lösen Sie die Haltebänder am rechten Seitenpolster.
10. Heben Sie das rechte Seitenpolster auf die Matratze.
11. Lösen Sie die vier Schnallen.
12. Fahren Sie die rechte Seite des Bettrahmens ein.