


AtmosAir Velaris (アトモスエア・ベラリス) - Plus Flex (プラス・フレックス)

Citadel Plus ベッドフレームとの併用を想定

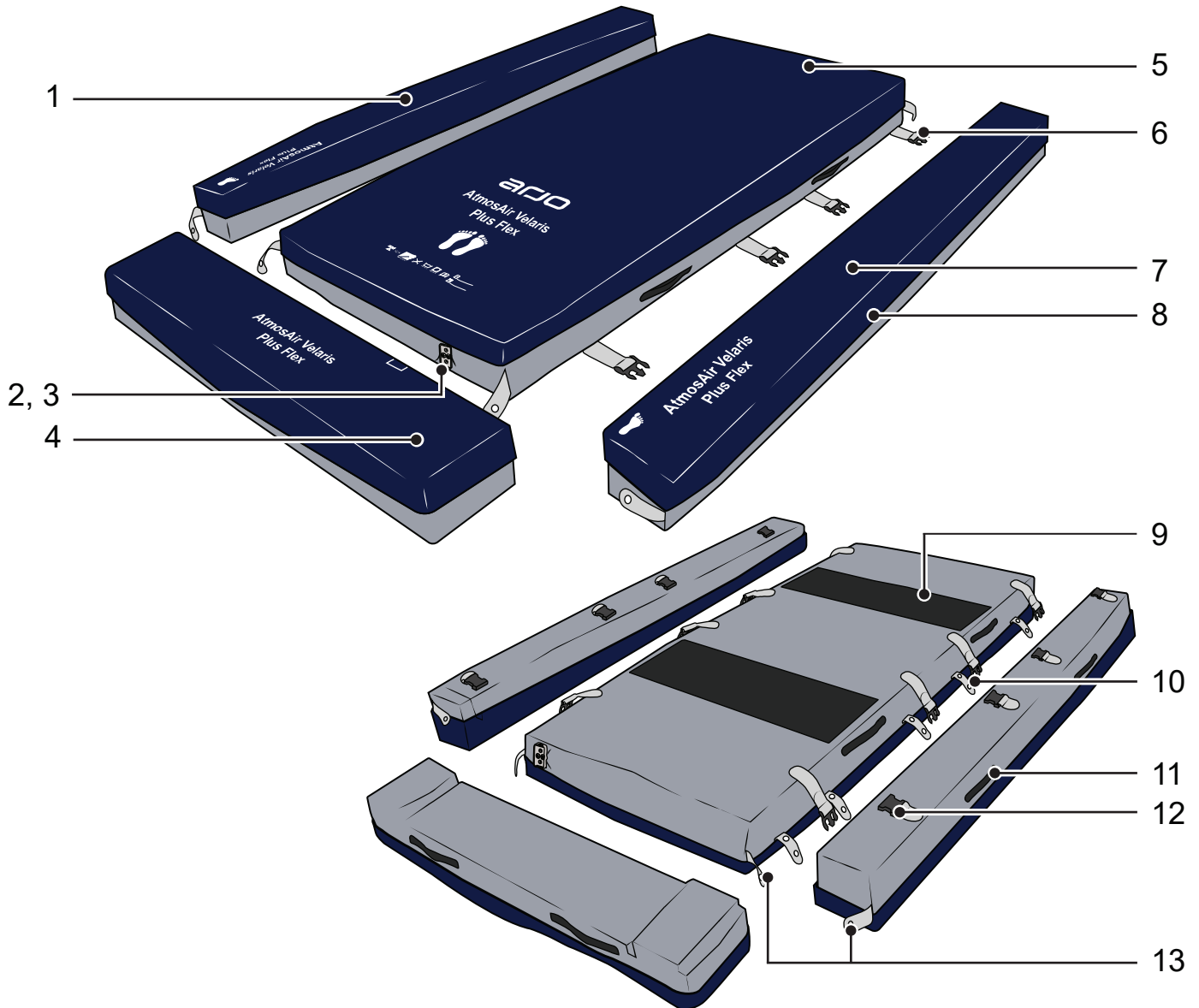

1. サイドボルスター (左)
2. マットレスコネクタ
3. マットレスコネクタキャビティ
4. フットボルスター
5. マットレス
6. バックル (各側に 4 個)
7. サイドボルスター (右)
8. カバー取り付けファスナー (ファスナーフラップ付き)
9. 滑り止めストリップ
10. ケーブルマネージメントループ
11. ハンドル (各ボルスターに 2 個)
12. バックル (各ボルスターに 4 個)
13. サイドボルスター固定ストラップ (頭部先端に 2 本、足部先端に 2 本)


Plus Flex の組み立て

Plus Flex は、必ず Citadel Plus ベッドフレームと併用してください。

圧切替（アクティブ）セラピーでは、Plus Flex と AtmosAir Velaris ポンプを併用してください。


静止（リアクティブ）セラピーでは、ポンプを接続しないでください。マットレスがポンプに接続されている場合は、ポンプチューブセットコネクタを外します。

1. Plus Flex マットレスをベッドフレームの中央に配置します。
2. 圧切替（アクティブ）セラピーを行う場合は、ポンプをベッドのフットボードに掛けます。静止（リアクティブ）セラピーを行う場合は、ステップ 6 に進みます。


3.  **警告**
つまずきや巻き込みの危険を避けるため、電源コードは常に適切に管理してください。

ポンプの電源ケーブルを、ケーブル管理ループに収納します。フットボルスターを使用する場合は、ベッドの足部先端でケーブル長さに余裕を持たせてください。

4. ロッククリップを使用してケーブルを固定します。

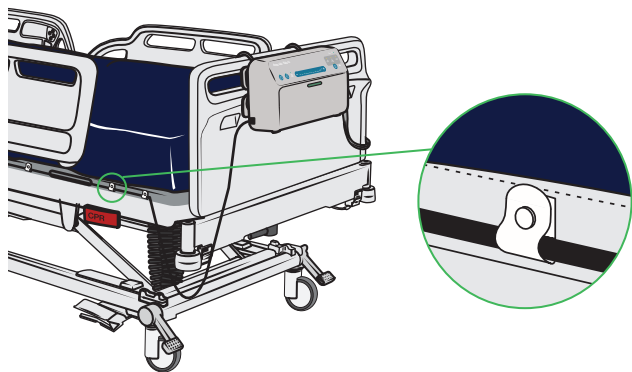


5. 電源ケーブルとループの上にファスナーフラップをかぶせます。

6.  **警告**
転倒や挟み込みの危険を避けるため、ボルスターを取り付けたり取り外したりする際は、ベッドフレームの開いた側に介助者がいることを確認してください。

Citadel Plus ベッドフレームの左側ベッド幅を完全に伸ばします。手順については Citadel Plus 取扱説明書を参照してください。

7. すべてのマットレスバックル（各側面に 4 個）が延長ベッドフレームの上に配置されていることを確認します。

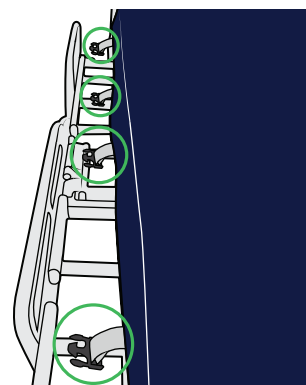


8. 左側のサイドボルスターをマットレスの端に置き、フットプリントが足部先端にあり、ハンドルが上向きであることを確認します。




9. サイドボルスターのバックルをマットレスのバックルに合わせます。

10. 4つのバックルを取り付けます。

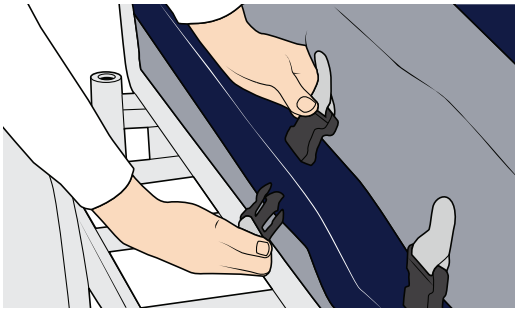

11. サイドボルスターをベッドフレーム上に折り曲げます。サイドボルスターが延長部分にしっかりと取り付けられ、マットレスと水平になっていることを確認してください。


12. 固定ストラップのロッククリップを使用して、サイドボルスターをマットレスに固定します。足部先端に2つ、頭部先端に2つあります。

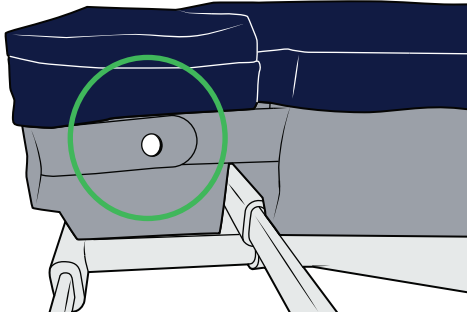

13. 右側のサイドボルスターで手順 6-12 を繰り返します。


14. Citadel Plus ベッドフレームを完全に伸ばします。

15. ポンプのチューブセットコネクタをベッドフレームの右側にあるフットエンドの間隙に通してください。

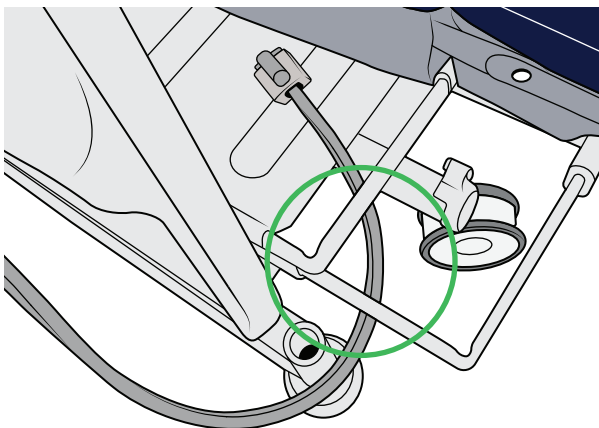


16. マットレスのコネクタを少し引き出します。

17. チューブとマットレスのコネクタを接続します。完全に接続されたことを確認します（カチッという音が2回鳴ります）。

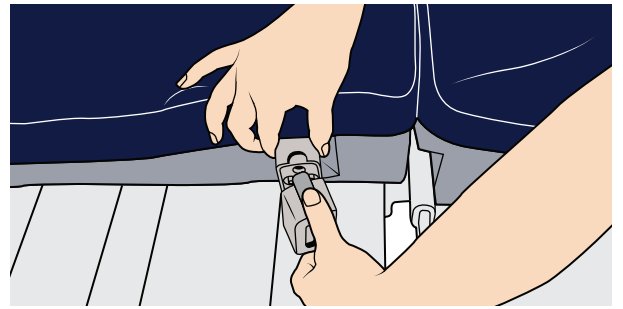


18. マットレスコネクタをマットレスに押し込みます。

19. フットボルスターをマットレスの足部先端に配置します。

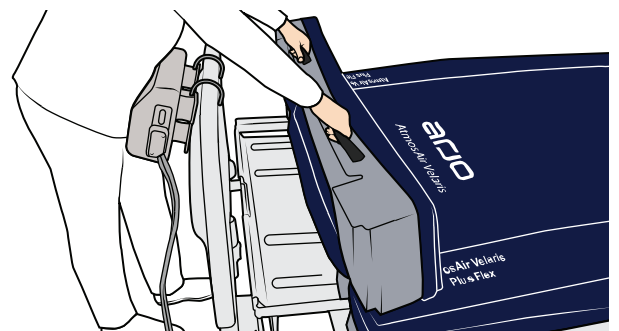


20. フットボルスターをベッドフレーム上で折り曲げます。コネクタがフットボルスターの上部カバーの正方形のマークとそろっていることを確認してください。

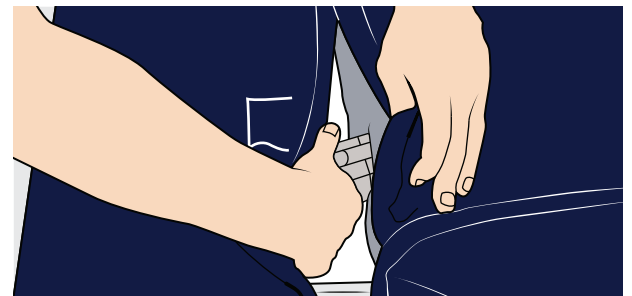


21. ファスナーフラップを元の位置に戻します。

22. フットボルスターを持ち上げ、左側にある隙間に電源ケーブルを通します。

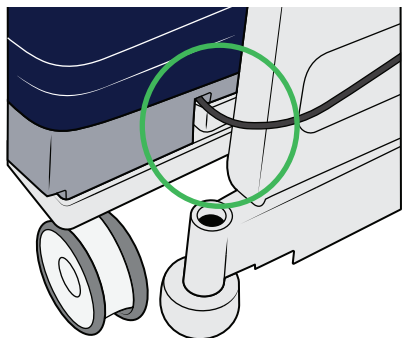

23. すべてのボルスターについて、次を確認してください。

- ボルスターはマットレスと同じ高さであること。
- トップカバー上に印刷された表示が見えること。
- ボルスターのすべてのハンドルが外側にあること。
- すべてのバックルがマットレスにしっかりと取り付けられていること。
- マットレス頭部先端と足部先端のロッククリップがすべて取り付けられていること。
- すべてのファスナーフラップが折りたたまれ、ファスナーを覆っていること。

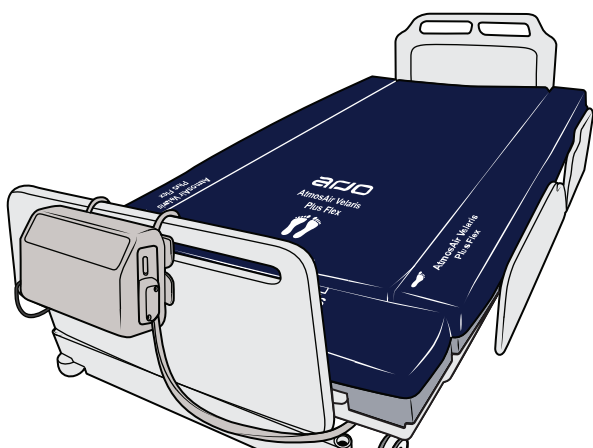

24.



警告

落下や挟み込みの危険を避けるため、患者がマットレスの中央に配置されていることを確認してください。

患者をマットレス中央に載せます。

25. すべてのサイドレールが上がっていることを確認します。

搬送モード



警告

転倒や挟み込みの危険を避けるため、ボルスターを取り付けたり取り外したりする際は、ベッドフレームの開いた側に介助者がいることを確認してください。

エレベーターの大きさの都合上、搬送中にサイドボルスターおよびまたはフットボルスターを取り外し、再度組み立てる必要が生じることがあります。

介助者は常にサイドレールが外された側に立ち、患者の腕と足がボルスターに載っていないことを確認してください。

ベッドフレームの延長部は必ず格納してください。各ボルスターを取り外したら、足部先端または左右のベッドフレームを格納します。

患者がベッドから離れる場合



警告

患者がベッドから離れる際に転倒する危険を避けるため、ベッドフレームの開いた側に介助者がいることを確認してください。

患者がベッドから離れる必要がある場合は、介助者は常にサイドレールが外された側に立ってください。

Plus Flex の解体

延長部を開いたままにしないでください。ベッドフレームの格納方法については、Citadel Plus 取扱説明書を参照してください。

1. フットボルスターを持ち上げます。
2. ポンプを使用してる場合は、チューブセットコネクタを外します。
3. ベッドフレームの足部先端を格納します。
4. 左側ボルスターの固定ストラップを外します。
5. 左側ボルスターをマットレスの上に折り曲げます。
6. 4 つのバックルを外します。
7. 該当する場合は、ケーブル管理ループからケーブルを取り外します。
8. ベッドフレームの左側を格納します。
9. 右側ボルスターの固定ストラップを外します。
10. 右側ボルスターをマットレスの上に持ち上げます。
11. 4 つのバックルを外します。
12. ベッドフレームの右側を格納します。