


AtmosAir Velaris – Plus Flex

För användning med Citadel Plus sänggram

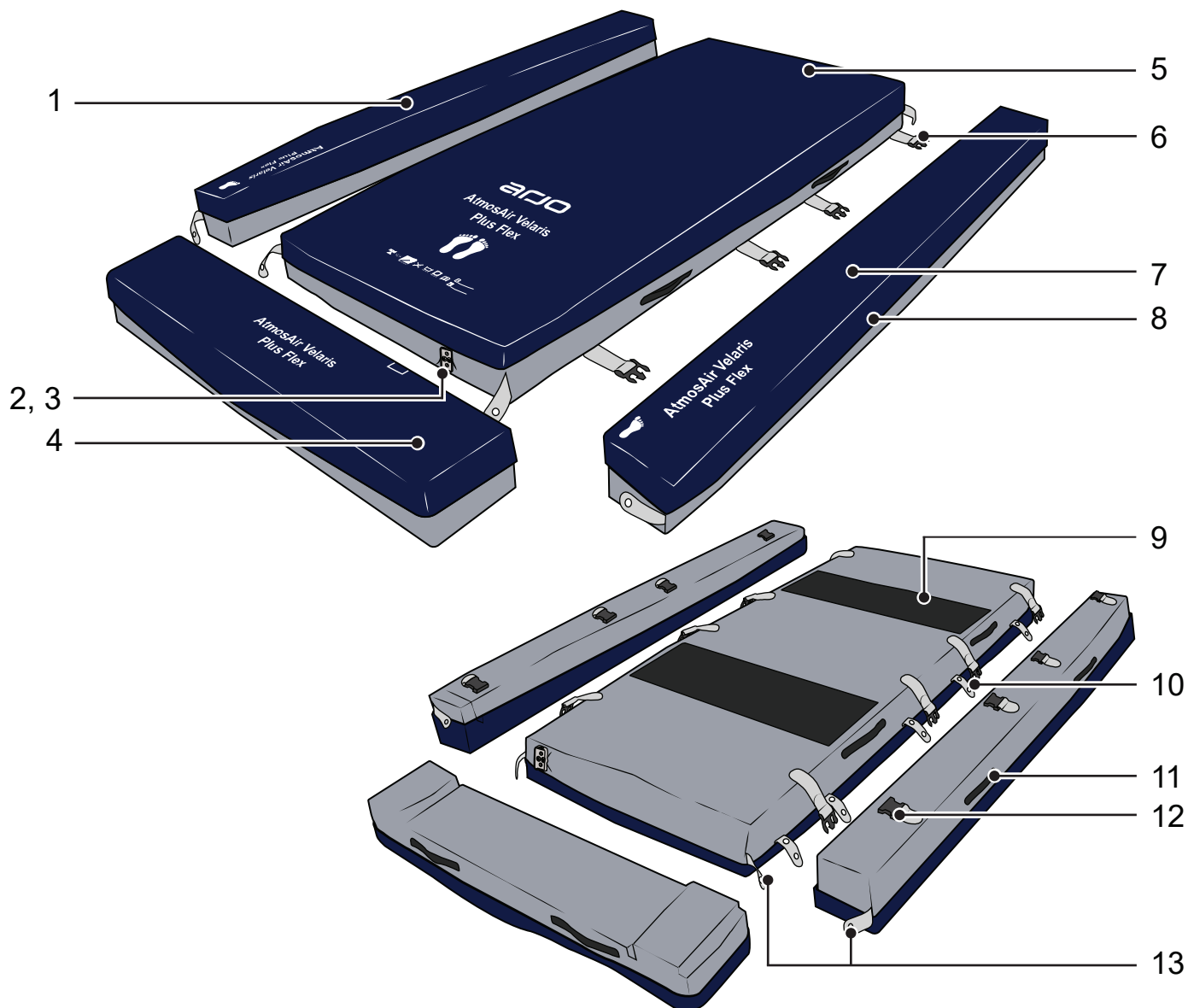

1. Vänstersidodyna
2. Madrasskoppling
3. Madrasskopplingshål
4. Fotdyna
5. Madrass
6. Spännen (fyra på varje sida)
7. Högersidodyna
8. Blixtlås med blixtlåsflik för överdraget
9. Halkfria remsor
10. Kabelränneöglor
11. Handtag (två på varje dyna)
12. Spännen (fyra på varje dyna)
13. Fästremmar för sidodynor (två vid huvudändan, två vid fotänden)

Montering av Plus Flex

Använd endast Plus Flex ihop med en Citadel Plus-sänggram.

För aktiv behandling, montera Plus Flex med AtmosAir Velaris-pumpen.

Anslut inte pumpen vid reaktiv behandling. Om madrassen är ansluten till pumpen, koppla bort pumpslangsetets koppling.

1. Placera Plus Flex-madrassen mitt på sänggramen.
2. Vid aktiv behandling ska pumpen hängas på sängens fotgavel. För reaktiv behandling, gå till steg 6.

3.




VARNING

Fäst alltid strömkabeln i kabelrännan så att den inte kan utgöra risk för fall eller strypning.

Sätt pumpens strömkabel i kabelränneöglorna. Om fotdynan ska användas ska kabeln vid sängens fotände vara slak.

4. Fäst kabeln med låsklämmorna.

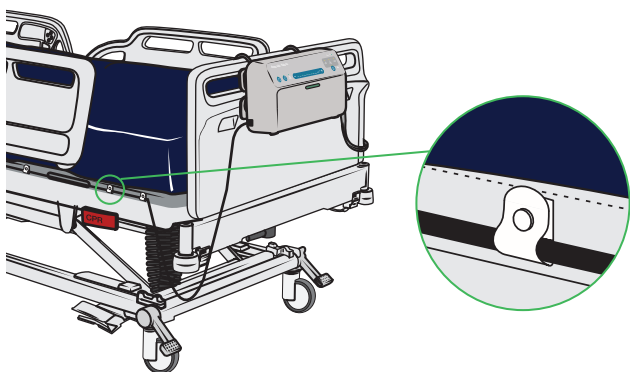

5. Vik ned blixtlåsfliken över strömkabeln och öglorna.

6.




VARNING

Se till att det finns vårdpersonal på den öppna sidan av sänggramen när sidodynorna monteras eller tas bort för att fall- eller klämrisk ska undvikas.

Dra ut den vänstra sidan av Citadel Plus-sänggramen helt, se bruksanvisningen för Citadel Plus.

7. Kontrollera att alla madrassspännen, fyra på var sida, är placerade ovanpå den förlängda sänggramen.

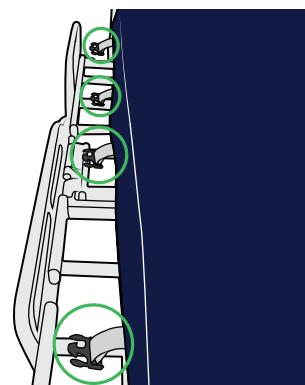

8. Placera den vänstra sidodynans på madrassens kant, se till att fotavtrycket är placerat vid fotänden och att handtagen är vända uppåt.




9. Rikta in spännena på sidodynorna i förhållande till spännena på madrassen.

10. Fäst de fyra spännena.



11. Fäll ned sidodynorna på sängramen. Kontrollera att sidodynorna sitter ordentligt fast i förlängningen och är i nivå med madrassen.


12. Fäst sidodynorna vid madrassen med hjälp av låsklämmorna på remmarna. Det finns två remmar vid fotändan och två vid huvudändan.

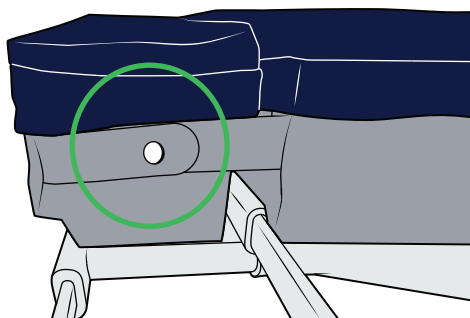

13. Upprepa steg 6–12 för höger sidodyna.


14. Dra ut Citadel Plus-sängramen helt.

15. Dra pumpslangsetets koppling genom fotändans öppning på höger sida av sängramen.

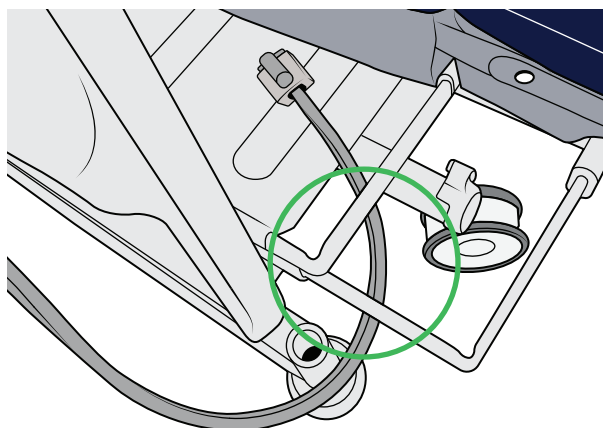


16. Dra ut madrasskopplingen en aning ur hålet.

17. Tryck ihop kopplingarna. Se till att pumpslangsetets koppling klickar på plats på båda sidor (dubbelklick).

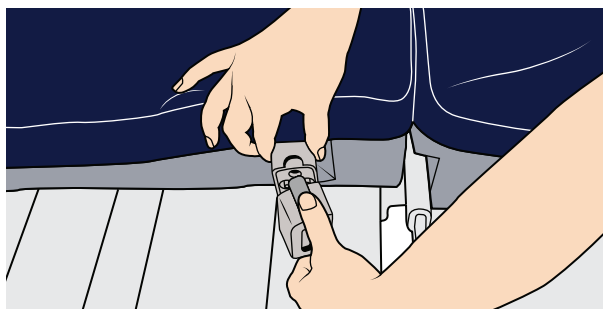

18. Sätt tillbaka madrasskopplingen i madrasshålet.

19. Placera fotdynan vid madrassens fotände.

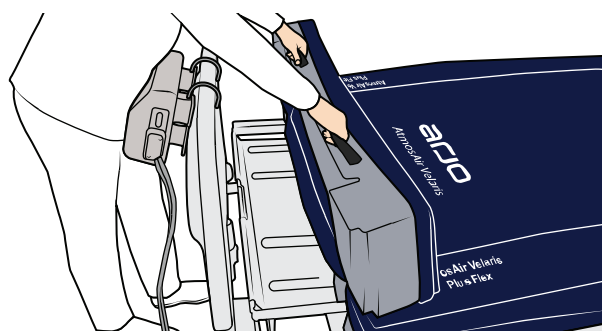


20. Vik ned fotdynan på sängramen. Se till att kopplingarna är i linje med den fyrkantiga markeringen på fotdynans överdrag.




21. Sätt tillbaka blixtlåsfliken.

22. Lyft upp fotdynan och placera nätkabeln i det vänstra hålet.

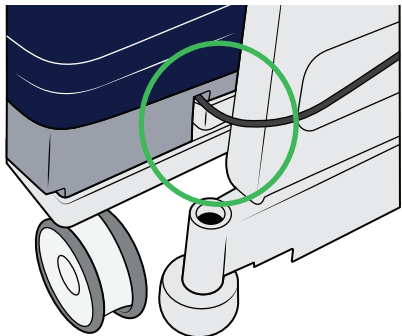

23. Kontrollera följande för alla dynor:

- Dynorna är i samma höjd som madrassen.
- Trycket på överdraget är synligt.
- Alla handtag på dynan sitter på utsidan.
- Alla spännen sitter ordentligt fast vid madrassen.
- Alla låsklämmor är fästa, både vid madrassens huvud- och fotände.
- Alla blixtlåsflikor är nedfällda och täcker blixtlåsen.

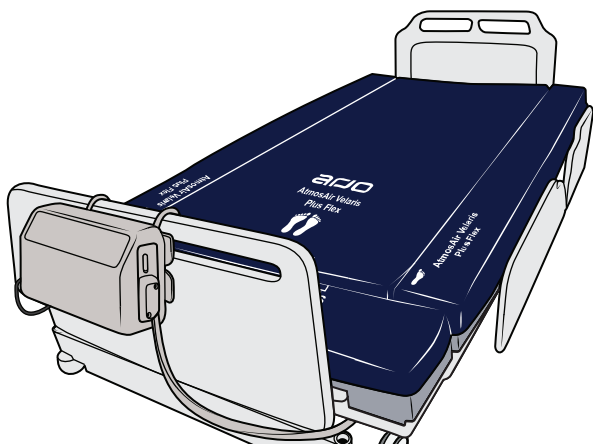

24.

! VARNING

Se till att patienten är placerad mitt på madrassen för att risk för att patienten faller eller fastnar ska undvikas.

Placera patienten mitt på madrassen.

25. Se till att alla sidogrindar är uppfällda.

Transportläge

! VARNING

Se till att det finns vårdpersonal på den öppna sidan av sängramen när sidodynorna monteras eller tas bort för att fall- eller klämrisk ska undvikas.

Sidodynorna och/eller fotdynan kan behöva tas bort och sättas ihop igen under transport, t.ex. för att få plats i en hiss.

Se till att det alltid finns vårdpersonal vid den öppna sidan av sängen och att patientens armar och fötter går fria från dynorna.

Lämna aldrig förlängda sidor öppna. Dra tillbaka fotänden eller sängramens sida när alla dynor har tagits bort.

När patienten lämnar sängen

! VARNING

Se till att det finns vårdpersonal på den öppna sidan av sängramen när patienten lämnar sängen för att fallrisk ska undvikas.

När patienten behöver lämna sängen ska du se till att det alltid finns vårdpersonal vid den öppna sidan.

Demontera Plus Flex

Lämna inte förlängda sidor öppna. Anvisningar om hur sängramen dras tillbaka finns i bruksanvisningen för Citadel Plus.

1. Lyft ut fotdynan.
2. Koppla om tillämpligt bort pumpslangsetets koppling.
3. Dra tillbaka sängramens fotände.
4. Lossa fästremmarna på vänster sidodyna.
5. Lyft upp den vänstra sidodynan på madrassen.
6. Lossa de fyra spännena.
7. Lossa om tillämpligt kabeln från kabelränneöglorna.
8. Dra tillbaka vänster sida av sängramen.
9. Lossa fästremmarna på den högra sidodynan.
10. Lyft upp den högra sidodynan på madrassen.
11. Lossa de fyra spännena.
12. Dra tillbaka höger sida av sängramen.

