


Alarmanzeigen
auf dem
Bedienfeld

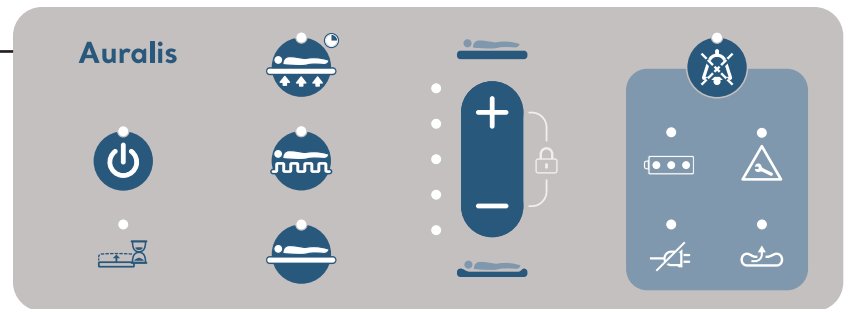

Taste Betrieb/Standby

Betriebsmodus – Taste einmal drücken. Die Anzeige hört auf zu blinken und leuchtet durchgehend.

Standby-Modus – halten Sie die Taste zwei Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige wechselt von konstant auf blinkend.



Warteanzeige

Leuchtet auf, wenn die Matratze bzw. das Sitzkissen aufgepumpt wird. Leuchtet 15 Minuten lang, bis die Matratze oder das Sitzkissen vollständig aufgeblasen ist.



Taste für AutoFirm-Modus

Für den AutoFirm-Modus drücken und 2 Sekunden lang gedrückt halten. Die Matratze pumpt sich vorübergehend zu einer festen Oberfläche auf. Der AutoFirm-Modus dauert 15 Minuten, kann aber in 5-Minuten-Schritten auf maximal 30 Minuten verlängert werden. Die Anzeige leuchtet, solange der Modus aktiv ist.

Nicht für das Sitzkissen.



Taste für Wechseldruckmodus

Drücken Sie diese Taste, um den Wechseldruckmodus (Standard) zu aktivieren. Im Wechseldruckmodus werden verschiedene Zellen aufgepumpt bzw. entlüftet, um die Auflagefläche zu verändern. Die Anzeige leuchtet, solange der Modus aktiv ist.



Taste für reaktiven Modus (Weichlagerungsmodus)

Drücken Sie diese Taste, um den reaktiven Weichlagerungsmodus zu aktivieren. Dieser hält in allen Zellen einen konstant niedrigen Druck aufrecht. Die Anzeige leuchtet, solange der Modus aktiv ist.

Nicht für das Sitzkissen.



Risiko für Verletzungen oder Schmerzen

Stellen Sie das Komfortniveau bei Patienten über 360 kg (793 lb) IMMER auf den Maximalwert ein. (Nur Auralis Plus)

Komfortkontrolltasten

Drücken Sie zum Einstellen des Liegekomforts diese Tasten und stellen Sie damit den Druck in der Auflagefläche ein. An den Anzeigen lässt sich die Liegekomfoteinstellung ablesen.



Taste zum Stummschalten des Alarms

Drücken, um den Alarmton für einen Zeitraum von 15 Minuten stumm zu schalten, die Anzeige leuchtet weiter.

Der Alarm erlischt erst, wenn die Alarmursache beseitigt wurde.



Niedriger Akkustand

Gelb leuchtende Anzeige und akustischer Alarm – die Restlaufzeit des Akkus beträgt eine Stunde. Der Alarm kann stummgeschaltet werden.

Sobald die Restlaufzeit des Akkus unter 15 Minuten fällt, wechselt der Kompressor in den reaktiven Weichlagerungsmodus. Der akustische Alarm kann nicht weiter unterdrückt werden.



Akkuladeanzeigen

An den blauen Anzeigen lässt sich der Ladezustand des Akkus ablesen. Blinkende Anzeige – Akku wird geladen.



Wartungsanzeige

- Wartungsanzeige gelb, Alarmanzeigen auf dem Bedienfeld grün – der Kompressor muss gewartet werden. Nur zur Information, kein Alarm.
- Wartungsanzeige gelb, Alarmanzeigen auf dem Bedienfeld gelb, akustischer Alarm – beim Kompressor liegt ein interner Fehler vor. Der Alarm kann stummgeschaltet werden.



Netzausfallanzeige

Es wurde ein Stromausfall festgestellt. Nur zur Information, der Kompressor arbeitet mit Hilfe des Akkubetriebs normal weiter. Es ertönt kein akustischer Alarm.



Niedrigdruck-Anzeige

- Die Anzeige leuchtet, es ertönt ein einzelner Warnton – der Kompressor hat in der Matratze oder im Sitzkissen einen Niedrigdruck festgestellt.
- Die Anzeige leuchtet, es ertönt ein akustischer Alarm – der Anschluss an Matratze oder Sitzkissen wurde während des Gebrauchs getrennt. Der Alarm kann stummgeschaltet werden.
- Die Anzeige leuchtet, es ertönt ein einzelner Warnton – der Kompressor hat beim Einschalten festgestellt, dass keine Matratze angeschlossen ist.