



Auralis

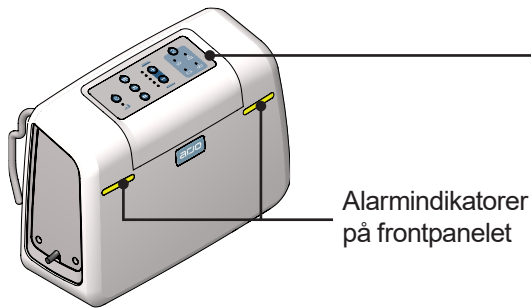

Alarmindikatorer på frontpanelet

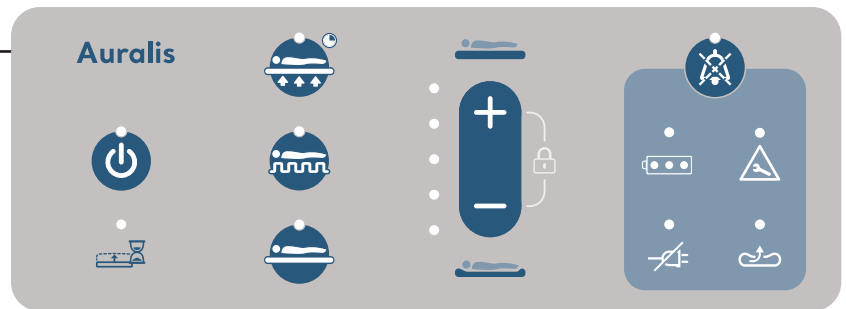

Kjør/Standby-knapp

Startmodus – trykk på knappen én gang. Indikatoren skifter fra blinkende til konstant.

Standbymodus – trykk på knappen i to sekunder. Indikatoren skifter fra konstant til blinkende.



Venteindikator

Vises når madrassen eller seteputen blåses opp. Forblir på i 15 minutter, til madrassen eller seteputen er blåst helt opp.



Knapp for AutoFirm-modus

Trykk og hold inne i to sekunder for AutoFirm-modus. Madrassen blåses opp til en midlertidig fast overflate. AutoFirm-modus varer i 15 minutter, men tidsrommet kan økes i trinn på fem minutter opp til maksimalt 30 minutter. Indikatoren lyser når funksjonen er aktiv.

Ikke for setepute.



Knapp for alternerende modus

Trykk for alternerende modus (standard). Alternerende modus blåser opp eller tømmer forskjellige celler for å skape en fluktuerende overflate. Indikatoren lyser når funksjonen er aktiv.



Knapp for reaktiv KLT (konstant lavt trykk)-modus

Trykk for Reaktiv KLT-modus. Opprettholder et konstant lavere trykk i alle cellene. Indikatoren lyser når funksjonen er aktiv.

Ikke for setepute.



Risiko for personskade eller ubehag
 Still ALLTID inn komfortnivået på maks for pasienter som veier mer enn 360 kg (793 lb) (kun Auralis Plus).

Komfortregulatorknapper

Trykk for å justere trykket i støtteoverflaten for å stille inn komfortnivået. Indikatorene viser komfortinnstillingen.



Alarmdempingsknapp

Trykk på for å dempe varsellyden i 15 minutter, indikatoren tennes.

Alarmen avbrytes når alarmtilstanden er rettet opp.



Indikator for lavt batterinivå

Gul indikator og alarmlyd – 1 times batteritid igjen. Alarmen kan dempes.

Når det er mindre enn 15 minutters batteritid igjen, går pumpen over i reaktiv KLT-modus. Alarmlyden kan ikke lenger dempes.



Batteriladeindikatorer

Blå indikatorer viser batteriets ladenivå. Blinkende indikator – batteriet lades.



Serviceindikator

- Serviceindikator gul, alarmindikatorer på frontpanel grønne – pumpen er klar for service. Kun til informasjon, ikke en alarm.
- Serviceindikator gul, alarmindikatorer på frontpanel gule, lydalarm – pumpen har en intern feil. Alarmen kan dempes.



Indikator for strømbrudd

Et strømbrudd er registrert. Kun til informasjon, pumpen fortsetter å fungere normalt ved bruk av batteriet. Det er ingen lydalarm.



Indikator for lavt trykk

- Indikatoren vises og én enkelt varseltone høres – pumpen registrerer lavt trykk i madrassen eller seteputen.
- Indikatoren vises og en alarmlyd høres – madrassen eller seteputen er frakoblet mens de er i bruk. Alarmen kan dempes.
- Indikatoren vises og én enkelt varseltone høres – pumpen oppdager at en madrass ikke er tilkoblet ved oppstart.