



Auralis

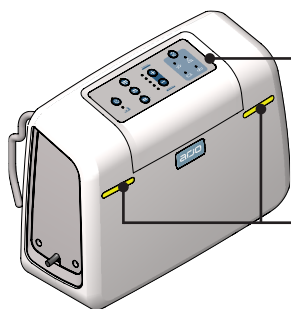

Индикаторы сигнала тревоги на передней панели

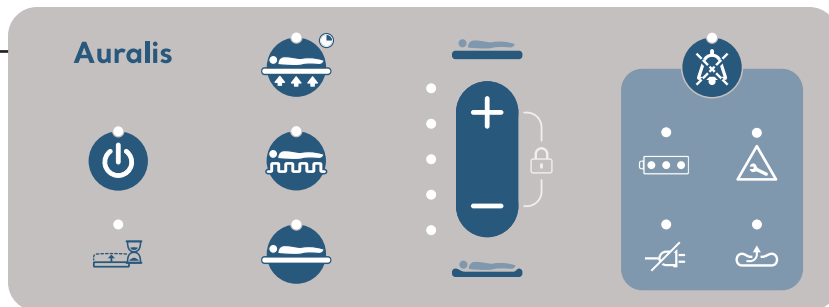

Кнопка переключения режимов «Рабочий»/«Ожидание»

Рабочий режим — нажмите кнопку один раз. Индикатор перестает мигать и светится постоянно.

Режим ожидания — нажмите кнопку и удерживайте ее 2 секунды. Индикатор меняет свечение с постоянного на мигающее.



Индикатор ожидания

Светится, когда накачивается матрас / подушка сиденья. Остается во включенном состоянии 15 минут, до тех пор, пока матрас / подушка сиденья не накачается полностью.



Кнопка режима AutoFirm

Нажмите и удерживайте 2 секунды для включения режима AutoFirm. Матрас накачивается до образования временной твердой поверхности. Режим AutoFirm длится 15 минут. Его длительность можно увеличивать с шагом в 5 минут, но не более чем до 30 минут. Во время работы горит индикатор.

Не предназначен для подушки сиденья.



Кнопка перемежающегося режима

Нажмите для выбора перемежающегося режима (по умолчанию). В перемежающемся режиме разные ячейки накачиваются или сдуваются для создания меняющейся поверхности. Во время работы горит индикатор.



Кнопка реактивного режима CLP (постоянное пониженное давление)

Нажмите для включения реактивного режима CLP. Поддерживает постоянное пониженное давление во всех ячейках. Во время работы горит индикатор.

Не предназначен для подушки сиденья.



Опасность причинения травм или неудобств

ВСЕГДА устанавливайте на максимум уровень комфорта для пациентов весом более 360 кг (793 фунта). (только Auralis Plus)

Кнопки управления комфортом

Нажмите, чтобы отрегулировать давление внутри опорной поверхности для задания уровня комфорта. Индикаторы показывают настройку уровня комфорта.



Кнопка отключения звукового сигнала тревоги

Нажмите кнопку, чтобы отключить звуковой сигнал тревоги на 15 минут, индикатор включен.

Сигнал тревоги прекращается после устранения причины тревоги.



Индикатор низкого заряда аккумулятора

Горит желтый индикатор и включен звуковой сигнал — оставшегося заряда аккумулятора хватит на 1 час работы. Звук сигнала можно отключить.

Если осталось менее 15 минут работы аккумулятора, помпа переходит в реактивный режим CLP. Звуковой сигнал не может быть отключен.



Индикаторы заряда аккумулятора

Синие индикаторы показывают уровень заряда аккумулятора. Индикатор мигает — аккумулятор заряжается.



Индикатор технического обслуживания

- Индикатор технического обслуживания горит желтым, индикаторы сигнала тревоги на передней панели горят зеленым — помпа готова к проведению технического обслуживания. Эта сигнализация предназначена только для информирования и не является сигналом тревоги.
- Индикатор технического обслуживания горит желтым, индикаторы сигналов тревоги на передней панели горят желтым, подается звуковой сигнал тревоги — в помпе произошел внутренний сбой или ошибка. Звук сигнала можно отключить.



Индикатор сбоя сетевого электропитания

Обнаружен сбой сетевого электропитания. Индикатор предназначен только для информирования, помпа продолжает нормально функционировать, получая питание от аккумулятора. Звуковой сигнал тревоги не подается.



Индикатор низкого давления

- Загорается индикатор, слышен одиночный предупреждающий звуковой сигнал — помпа определяет низкое давление внутри матраса или подушки сиденья.
- Загорается индикатор, слышен звуковой сигнал тревоги — отсоединение матраса или подушки сиденья во время эксплуатации. Звук сигнала можно отключить.
- Загорается индикатор, слышен одиночный предупреждающий звуковой сигнал — при включении помпа определила, что матрас не подсоединен.

