



# Auralis

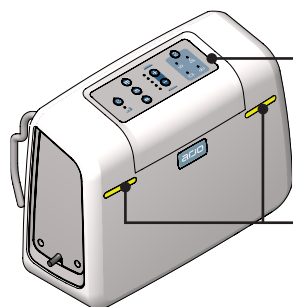

Larmindikatorer  
på frontpanelen

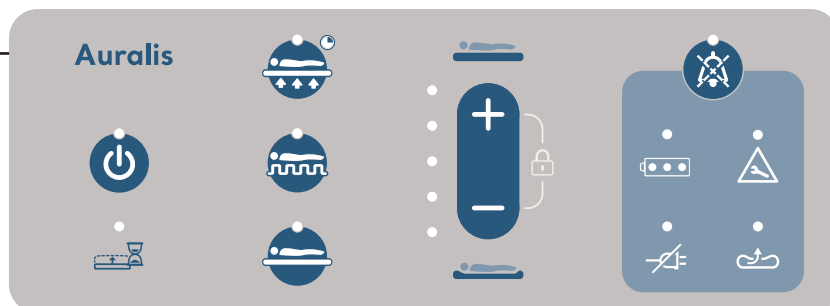

## Knappen På/Standby

**På** – tryck en gång på knappen. Indikatorn slutar blinka och börjar lysa med ett fast sken.

**Standby** – håll knappen intryckt i två sekunder. Indikatorn slutar lysa med ett fast sken och börjar blinka.



## Vänta-indikator

Visar när madrassen eller sittdynan blåses upp. Förblir tänd i 15 minuter tills madrassen eller sittdynan är helt uppblåst.



## Knapp för AutoFirm-läge

Håll intryckt i två sekunder för AutoFirm-läge. Madrassen blåses upp och en tillfälligt fast yta skapas. AutoFirm-läget varar i 15 minuter, men kan ökas i steg om 5 minuter till max 30 minuter. Indikatorn tänds när läget är aktivt.

Ej för sittdyna.



## Knapp för växlande läge

Tryck för växlande läge (standard). Växlande läge blåser upp eller tömmer olika celler för att skapa en föränderlig yta. Indikatorn tänds när läget är aktivt.



## Knapp för Reaktivt läge (CLP – konstant lågt tryck)

Tryck för Reaktivt läge (CLP). Ett konstant, lägre tryck bibehålls i alla celler. Indikatorn tänds när läget är aktivt.

Ej för sittdyna.



Risk för personskada eller obehag  
Ställ ALLTID in komfortnivån på max. för patienter som väger över 360 kg (793 lb). (Endast Auralis Plus)

## Kontrollknappar för bekvämlighet

Tryck för att justera trycket i stödytan för att därigenom ställa in komfortnivån. Indikatorerna visar komfortinställningen.



## Knapp för att tysta larm

Tryck för att tysta ljudlarmet i 15 minuter, indikatorn tänds.

Larmet stängs av när larmorsaken har åtgärdats.



### Indikator för svagt batteri

Indikatorn lyser gult och ett larm ljuder – en timmes batteritid återstår. Larmet kan tystas.

När det är mindre än 15 minuters batteritid kvar går pumpen in i Reaktivt läge (CLP). Ljudlarmet kan inte längre tystas.



### Indikatorer för batteriets laddning

Blå indikatorer visar batteriets laddningsnivå. Blinkande indikator – batteriet laddas.



### Serviceindikator

- Serviceindikator gul, larmindikatorer på frontpanelen gröna – pumpen behöver servas. Endast för information, inget larm.
- Serviceindikator gul, larmindikatorer på frontpanelen gula, ljudlarm – pumpen har ett internt fel. Larmet kan tystas.



### Indikator för strömavbrott

Ett strömavbrott har upptäckts. Endast för information, pumpen fortsätter att gå normalt med batteridrift. Inget ljudlarm avges.



### Indikator för lågt tryck

- Indikatorn visas, en varningston hörs – pumpen registrerar lågt tryck i madrassen eller sittdynan.
- Indikatorn visas, ett ljudlarm hörs – madrassen eller sittdynan har kopplats från under användning. Larmet kan tystas.
- Indikatorn visas, en varningston hörs – pumpen registrerar att madrassen inte är ansluten vid start.