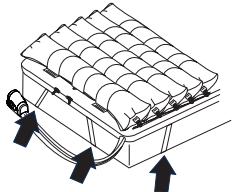
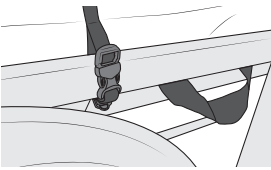

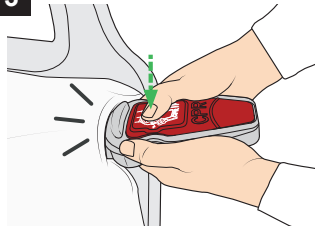
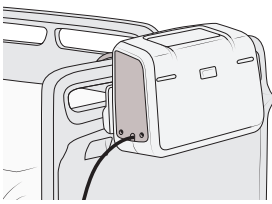
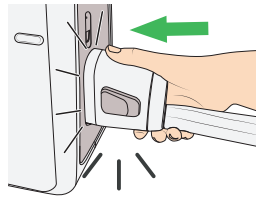
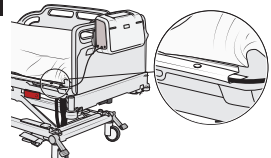
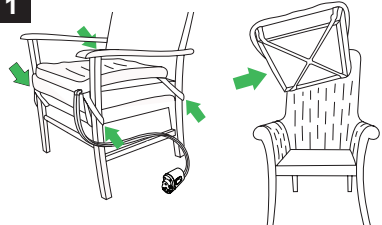
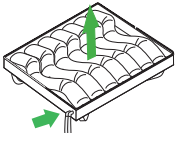
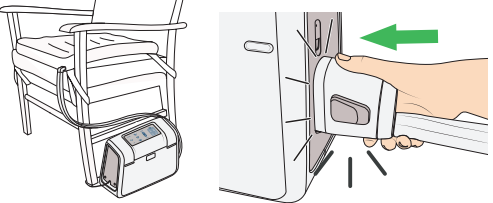


Montar o resguardo do colchão ou o colchão de substituição e a bomba

<p>1</p>  <p>Resguardo do colchão: Coloque sobre o colchão de base. Fixe com 4 extensões de fixação.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • conjunto de tubos no lado dos pés • RCP na cabeceira • células voltadas para cima <p>Colchão de substituição: Coloque na base da cama. Fixe as 8 extensões de fixação às peças móveis da estrutura de cama (+ 3 na cabeceira apenas para o Auralis Plus)</p>		<p>2</p>  <p>Feche a cobertura de proteção sobre o colchão. Logótipo da Arjo visível no lado dos pés.</p>
---	---	--	---


<p>3</p>  <p>A unidade de RCP emite um estalido ao atingir a posição fechada.</p>	<p>4</p>  <p>Suspenda a bomba no lado dos pés da cama.</p>	<p>5</p>  <p>Ligue o conjunto de tubos.</p>	<p>6</p>  <p>Coloque o cabo na passagem de cabos. Feche a aba à volta do cabo com os botões de mola.</p> <p>Ligue o cabo de alimentação a uma fonte de alimentação.</p>
---	---	---	---

Montar a almofada do assento e a bomba


<p>1</p>  <p>Almofada do assento: Coloque na superfície da cadeira. Utilize as extensões de fixação para prender.</p>	 <p>Frente da cadeira</p> <p>Costas da cadeira</p> <ul style="list-style-type: none"> • células voltadas para cima • conjunto de tubos no canto frontal direito • células na horizontal sobre a cadeira, forma em V para a frente 	<p>2</p>  <p>Coloque a bomba no chão, o cabo por baixo da cadeira e o conjunto de tubos ao lado da cadeira.</p> <p>Ligue o conjunto de tubos.</p> <p>Ligue o cabo de alimentação a uma fonte de alimentação.</p>
---	---	--

Iniciar o sistema Auralis

1

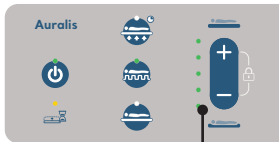

10 s

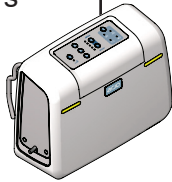

Quando a bomba é ligada a uma fonte de alimentação, faz uma auto verificação: Sinal sonoro – 10 segundos – 2 sinais sonoros – pronto a usar.

Prima continuamente o botão Ligado/ Em espera.

São apresentados os indicadores seguintes:

- Ligado/Em Espera
- Indicador de Aguardar
- Botão de modo alternado
- Indicador de controlo de conforto
- Indicador de carga de bateria
- Indicadores verdes na frente da bomba

2



15 min


Quando o indicador Aguardar se apagar, coloque um lençol no colchão. Certifique-se de que a unidade de esvaziamento rápido RCP está claramente visível.

Coloque o paciente no colchão ou na almofada de assento.

O Modo Alternado está predefinido.

Unidade de esvaziamento rápido RCP

1

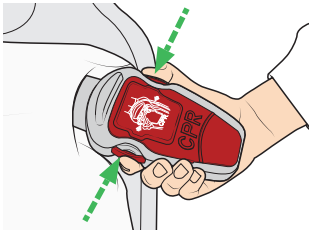


Ativar: Prima ambos os botões de libertação do RCP em simultâneo.

2




Certifique-se de que a parte frontal está aberta. O ar é evacuado rapidamente.

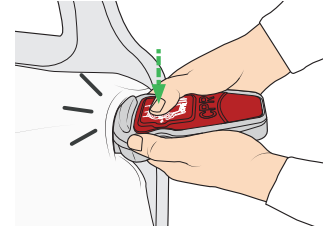

Reiniciar: Prima a parte aberta até encaixar com um estalido na posição fechada.

Modo AutoFirm

1

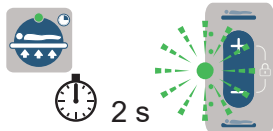

2 s

Ativar: Prima continuamente o botão.

Os indicadores de conforto piscam e o colchão insufla para o estado AutoFirm.

2



Pressão atingida – A luz dos indicadores AutoFirm e Controlo fica fixa.



2 s

Desativar: Prima continuamente o botão ou selecione outro modo.



Prolongar: Prima o botão para prolongar 5 minutos. Máx. 30 minutos

Se a duração não for prolongada, a bomba retorna ao modo anterior.

Modo Alternado, predefinição



Ativar:

Prima o botão. O indicador Modo Alternado é apresentado.

As células adjacentes insuflam e esvaziam num ciclo de 10 minutos.



Desativar:

Selecione o Modo CLP reativo ou AutoFirm.

Se não for necessária mais terapia, remova o paciente da superfície e desligue a bomba.

Modo reativo CLP



Ativar:

Prima continuamente o botão.

O indicador Modo reativo CLP é apresentado.




Desativar:

Selecione o Modo Alternado ou AutoFirm.

Se não for necessária mais terapia, remova o paciente da superfície e desligue a bomba.

Modo Bloquear

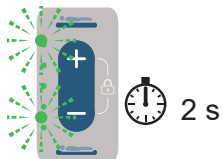


Bloquear:

Prima continuamente os botões de controlo de conforto em simultâneo.

Os indicadores de controlo do conforto piscam.

A bomba está agora bloqueada.

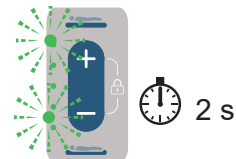


Desbloquear:

Prima continuamente os botões de controlo de conforto em simultâneo.

Os indicadores de controlo do conforto piscam.

A bomba está agora desbloqueada.


Modo Transportar (apenas colchões)

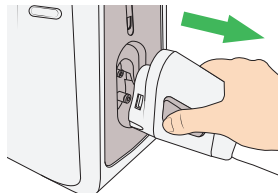

Ativar:

Prima os botões laterais simultaneamente e retire o conjunto de tubos.

O colchão suporta o paciente até 12 horas.

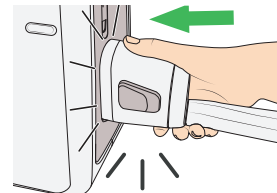

Desativar:


Ligue novamente o conjunto de tubos.


A bomba retorna ao modo anterior.

Enchimento e esvaziamento do coxim (apenas Auralis Plus)

Configurações do coxim:

- Um coxim insuflado (esquerdo ou direito)
- Ambos os coxins insuflados (esquerdo e direito)
- Ambos os coxins esvaziados (esquerdo e direito)

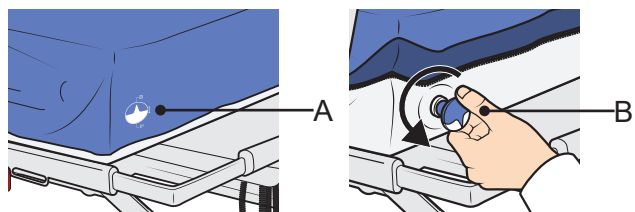

 Risco de ferimentos ou desconforto
Desativar o modo transportar

Enchimento do coxim:


Localize o símbolo da válvula (A).

Rode a válvula (B) no coxim totalmente para a esquerda

Repita no outro coxim, se necessário.

Deixe encher durante 8 minutos.

Nota: Largura da estrutura de cama estendida antes de encher os coxins.

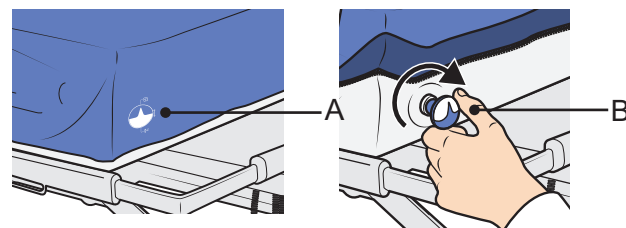

Esvaziamento do coxim:

Localize o símbolo da válvula (A).

Rode a válvula (B) no coxim totalmente para a direita.

Repita no outro coxim, se necessário.

Deixe esvaziar durante 5 minutos.

Nota: Esvazie os coxins antes de reduzir a largura da estrutura de cama.