

Potřebné pomůcky:

- Rozprašovací láhev s dezinfekčním roztokem (70% roztok alkoholu nebo roztok chlóru do 10 000 ppm)
- Neutrální čisticí prostředek (čisticí roztok)
- Rozprašovací láhev s vodou
- Hadříky

Čištění a dezinfekci provádějte před použitím dalším pacientem/klientem a v pravidelných intervalech při používání.



### VAROVÁNÍ

Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, pumpu před čištěním a kontrolou vždy odpojte od zdroje napájení.

Vždy si přečtěte návod k použití a bezpečnostní list dezinfekčního prostředku.

Z důvodu ochrany před podrážděním očí nebo pokožky nikdy neprovádějte dezinfekci v přítomnosti pacienta/klienta.

## Příprava

1. Odpojte pumpu od matrace nebo sedáku.
2. Vypněte pumpu a odpojte ji od zdroje elektřiny.

## Čištění pumpy

3. Otřete čistým hadříkem a čisticím roztokem pro odstranění usazenin nebo viditelných nečistot na:
  - hlavním plášti
  - membráně
  - štítcích
  - závěsných držácích
4. Všechna místa, na nichž zůstává nečistota, by měla být znovu přečištěna čisticím roztokem.
5. Vodou a novým čistým hadříkem otřete všechny zbytky čisticího roztoku, poté otřete suchým hadříkem.

## Dezinfekce pumpy

6. Dezinfekční roztok nastříkejte na suchý hadřík a rozetřete jej po celé pumpě.
7. Dezinfekci nechte působit.
8. Vodou a novým čistým hadříkem otřete všechny zbytky dezinfekčního roztoku.
9. Otřete suchým hadříkem.

## Čištění matrace nebo sedáku

10. Na všechny vnější povrchy vrchního potahu matrace nebo sedáku nastříkejte čisticí roztok a veškerou nečistotu otřete čistým hadříkem.
11. Než budete pokračovat, všechna místa, na nichž zůstává nečistota, by měla být znovu přečištěna čisticím roztokem.
12. Vodou a čistým hadříkem otřete všechny zbytky čisticího roztoku a poté suchým hadříkem odstraňte veškerou zbývající vlhkost.
13. Je-li to nutné, vyčistěte vnitřek matrace nebo sedáku. Rozepněte zip vrchního potahu pro přístup k vnitřním částem.
14. Nastříkejte čisticí roztok na suchý hadřík a otřete následující:
  - cely
  - spodní potah
  - popruhy
15. Vodou a novým čistým hadříkem otřete všechny zbytky čisticího roztoku, poté otřete suchým hadříkem.

## Dezinfekce matrace nebo sedáku

16. Dezinfekční roztok nastříkejte na suchý hadřík a rozetřete jej po všech vnějších částech horního potahu matrace nebo sedáku.
17. Dezinfekci nechte působit.
18. Vodou a novým čistým hadříkem otřete všechny zbytky dezinfekčního roztoku.
19. Otřete suchým hadříkem.
20. Horní potah matrace nebo sedáku nechte volně uschnout.
21. Je-li to nutné, vydezinfikujte vnitřek matrace nebo sedáku. Rozepněte zip vrchního potahu pro přístup k vnitřním částem.
22. Dezinfekční roztok nastříkejte na suchý hadřík a rozetřete jej po všech vnitřních částech.
23. Dezinfekci nechte působit.
24. Vodou a novým čistým hadříkem otřete všechny zbytky dezinfekčního roztoku.
25. Otřete suchým hadříkem.
26. Před opětovným připevněním horního potahu matrace nechte vnitřní části volně uschnout.
27. Bude-li to vyžadováno, popruhy a základnu matrace nebo sedáku je rovněž možno vyčistit stejným postupem. Pro snadnější přístup popruhy odepněte.

