

Notwendiges Zubehör:

- Sprühflasche mit Desinfektionslösung (entweder 70%ige Alkohollösung oder Chlorklösung bis 10.000 ppm)
- Neutrales Reinigungsmittel (Reinigungslösung)
- Sprühflasche mit Wasser
- Tücher

Reinigen und desinfizieren Sie das Produkt vor jedem Patientenwechsel und in regelmäßigen Abständen während des Betriebs.



WARNUNG

Trennen Sie den Kompressor vor der Reinigung und Wartung zur Vermeidung von Stromschlägen stets von der Stromquelle.

Lesen Sie stets die Bedienungsanleitung sowie das Sicherheitsdatenblatt des Desinfektionsmittels durch.

Um Augen- oder Hautreizungen zu vermeiden, dürfen Sie die Desinfektion nie in Anwesenheit eines Patienten durchführen.

Vorbereitung

1. Trennen Sie den Kompressor von der Matratze bzw. dem Sitzkissen.
2. Schalten Sie den Kompressor aus und trennen Sie ihn von der Stromquelle.

Reinigung des Kompressors

3. Verwenden Sie ein sauberes Tuch und Reinigungslösung und wischen Sie Ablagerungen oder sichtbaren Schmutz von:
 - Hauptgehäuse
 - Membran
 - Etiketten
 - Halterungen
4. Bereiche, in denen Schmutzrückstände verblieben sind, sollten erneut mit Reinigungslösung gereinigt werden.
5. Verwenden Sie Wasser und ein frisches Tuch, um sämtliche Rückstände der Reinigungslösung abzuwischen, und anschließend ein trockenes Tuch.

Desinfektion des Kompressors

6. Sprühen Sie Desinfektionslösung auf ein trockenes Tuch und verteilen Sie die Lösung auf alle Bereiche.
7. Lassen Sie das Desinfektionsmittel ausreichend einwirken.
8. Verwenden Sie Wasser und ein frisches Tuch, um sämtliche Rückstände der Desinfektionslösung abzuwischen.
9. Wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.

Reinigung der Matratze bzw. des Sitzkissens

10. Besprühen Sie alle Außenflächen des Schonbezugs der Matratze bzw. des Sitzkissens mit Reinigungslösung und wischen Sie etwaige Verschmutzungen mit einem sauberen Tuch ab.
11. Bereiche, in denen Schmutzrückstände verblieben sind, sollten vor dem Fortfahren erneut mit Reinigungslösung gereinigt werden.
12. Verwenden Sie Wasser und ein frisches Tuch, um sämtliche Rückstände der Reinigungslösung abzuwischen, und anschließend ein trockenes Tuch, um überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen.
13. Reinigen Sie bei Bedarf die Innenseite der Matratze bzw. des Sitzkissens. Öffnen Sie den Reißverschluss des Bezugs, um an die Innenkomponenten zu gelangen.
14. Sprühen Sie die Reinigungslösung auf ein trockenes Tuch und wischen Sie folgende Teile ab:
 - Zellen
 - Matratzenbasis
 - Befestigungsbänder
15. Verwenden Sie Wasser und ein frisches Tuch, um sämtliche Rückstände der Reinigungslösung abzuwischen, und anschließend ein trockenes Tuch.

Desinfektion der Matratze bzw. des Sitzkissens

16. Sprühen Sie die Desinfektionslösung auf ein trockenes Tuch und verteilen Sie die Lösung auf der gesamten Außenseite des Schonbezugs der Matratze bzw. des Sitzkissens.
17. Lassen Sie das Desinfektionsmittel ausreichend einwirken.
18. Verwenden Sie Wasser und ein frisches Tuch, um sämtliche Rückstände der Desinfektionslösung abzuwischen.
19. Wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.
20. Lassen Sie den Schonbezug der Matratze bzw. des Sitzkissens an der Luft trocknen.
21. Desinfizieren Sie bei Bedarf die Innenseite der Matratze bzw. des Sitzkissens. Öffnen Sie den Reißverschluss des Bezugs, um an die Innenkomponenten zu gelangen.
22. Sprühen Sie Desinfektionslösung auf ein trockenes Tuch und verteilen Sie diese auf alle Innenkomponenten.
23. Lassen Sie das Desinfektionsmittel ausreichend einwirken.
24. Verwenden Sie Wasser und ein frisches Tuch, um sämtliche Rückstände der Desinfektionslösung abzuwischen.
25. Wischen Sie mit einem trockenen Tuch nach.
26. Lassen Sie die Innenkomponenten an der Luft trocknen, bevor Sie den Schonbezug der Matratze wieder anbringen.
27. Bei Bedarf können auch die Befestigungsbänder und die Basis der Matratze bzw. des Sitzkissens nach dem vorstehenden Verfahren gereinigt werden. Entfernen Sie die Befestigungsbänder, um die Handhabung zu erleichtern.