

## 必要な付属品:

- 消毒液 (70 % アルコール溶液または塩素溶液いずれか最大 10,000 ppm) のスプレーボトル
- 中性洗剤 (洗浄液)
- 水入りスプレーボトル
- クロス

異なる患者に使用するときには、洗浄と消毒を行います。また、使用期間中には、定期的に洗浄と消毒を行います。



### 警告

感電を避けるため、クリーニングと点検の実施前に、必ずポンプを電源から外してください。

消毒剤の取扱説明書と安全データシートを必ずお読みください。

目や皮膚の炎症を防ぐために、患者様がいらっしゃる所で決して消毒しないでください。

## 準備

1. ポンプをマットレスまたはシートクッションから外します。
2. ポンプのスイッチを切り、電源から外します。

## ポンプの清掃

3. きれいな布と洗浄液を使用して、以下に記載する部品について、付着物や目に見える汚れを拭き取ります。
  - メインエンクロージャー
  - 膜縁部
  - ラベル
  - 吊り下げフック
4. 汚れが残っている部分は、洗浄液で再度洗浄する必要があります。
5. 水と新しい布を使って洗浄液の痕跡をすべて拭き取り、乾いた布で拭きます。

## ポンプの消毒

6. 乾いた布に消毒液を噴霧し、すべての部分に消毒液を広げます。
7. 消毒のため、しばらく待ちます。
8. 水と新しい布を使用して、消毒液をすべて拭き取ります。
9. 乾いた布で拭いてください。

## マットレスまたはシートクッションの清掃

10. マットレスまたはシートクッション上部カバーの外側部分すべてに洗剤液を噴霧し、清潔な布で汚れを拭き取ります。
11. 汚れが残っている部分は、次の手順に進む前に、洗剤液で再度洗浄する必要があります。
12. 水と新しい布を使って洗剤液の痕跡をすべて拭き取り、乾いた布で余分な水分を取り除きます。
13. 必要に応じて、マットレスまたはシートクッションの内側を清掃します。内部コンポーネントにアクセスするには、上部カバーのファスナーを開けます。
14. 乾いた布に洗剤液をスプレーして拭き取ります。
  - セル
  - ボトムカバー
  - ストラップ
15. 水と新しい布を使って洗剤液の痕跡をすべて拭き取り、乾いた布で拭きます。

## マットレスまたはシートクッションの消毒する

16. 乾いた布に消毒液を噴霧し、マットレスまたはシートクッション上部カバーの外側部分すべてに消毒液を広げます。
17. 消毒のため、しばらく待ちます。
18. 水と新しい布を使用して、消毒液をすべて拭き取ります。
19. 乾いた布で拭いてください。
20. マットレスまたはシートクッションの上部カバーを空気乾燥させます。
21. 必要に応じて、マットレスまたはシートクッションの内側を消毒します。内部コンポーネントにアクセスするには、上部カバーのファスナーを開けます。
22. 乾いた布に消毒液を噴霧し、内部部品に消毒液を広げます。
23. 消毒のため、しばらく待ちます。
24. 水と新しい布を使用して、消毒液をすべて拭き取ります。
25. 乾いた布で拭いてください。
26. マットレスの上部カバーを再取り付けする前に、内部部品を空気乾燥させてください。
27. マットレスまたはシートクッションのストラップとベースも、必要に応じて同じ方法で清掃できます。アクセスしやすいようにストラップを外します。