

Benodigde accessoires:

- Spuitflacon met desinfecterende oplossing (oplossing met 70% alcohol of chlooroplossing tot 10.000 ppm)
- Neutraal reinigingsmiddel (schoonmaakoplossing)
- Spuitflacon met water
- Doeken

Reinig en desinfecteer vóór elke nieuwe zorgvrager en met regelmatige tussenpozen tijdens het gebruik.



WAARSCHUWING

Koppel de pomp altijd los van de voedingsbron voordat u begint met reiniging of inspectie, om elektrische schokken te voorkomen.

Lees altijd de gebruiksaanwijzing en het veiligheidsinformatieblad voor het betreffende desinfectiemiddel.

Voer de desinfectie nooit uit in het bijzijn van de zorgvrager, om irritatie van ogen en huid te voorkomen.

Vorbereiding

1. Koppel de pomp los van de matras of het zitkussen.
2. Schakel de pomp uit en koppel hem los van de voedingsbron.

De pomp reinigen

3. Gebruik een schone doek en een reinigungsoplossing om de volgende oppervlakken af te nemen om afzettingen of zichtbaar vuil te verwijderen:
 - hoofdbehuizing
 - membraan
 - etiketten
 - ophangbeugels
4. Alle oppervlakken waarop restvuil is achtergebleven, moeten opnieuw worden gereinigd met de reinigungsoplossing.
5. Gebruik water en een nieuwe doek om alle sporen van het reinigungsmiddel te verwijderen en wrijf na met een droge doek.

De pomp desinfecteren

6. Spuit een desinfecterende oplossing op een droge doek en verspreid de oplossing over alle oppervlakken.
7. Laat het desinfectiemiddel even inwerken.
8. Gebruik water en een nieuwe doek om alle sporen van het desinfectiemiddel te verwijderen.
9. Wrijf na met een droge doek.

De matras of het zitkussen reinigen

10. Bespuit alle externe oppervlakken van de bovenhoezen van de matras of het zitkussen met een reinigungsoplossing en verwijder aanwezig vuil met een schone doek.
11. Alle oppervlakken waarop restvuil is achtergebleven, moeten opnieuw met de reinigungsoplossing worden gereinigd voordat u verdergaat.
12. Gebruik water en een nieuwe doek om alle sporen van het reinigungsmiddel te verwijderen en wrijf na met een droge doek om overmatig vocht te verwijderen.
13. Reinig zo nodig de binnenkant van de matras of het zitkussen. Rits de bovenhoes los om toegang te krijgen tot de interne componenten.
14. Spuit de reinigungsoplossing op een droge doek om de volgende elementen af te nemen:
 - cellen
 - onderhoes
 - banden
15. Gebruik water en een nieuwe doek om alle sporen van het reinigungsmiddel te verwijderen en wrijf na met een droge doek.

De matras of het zitkussen desinfecteren

16. Spuit een desinfecterende oplossing op een droge doek en verspreid de oplossing over alle externe oppervlakken van de bovenhoezen van de matras en het zitkussen.
17. Laat het desinfectiemiddel even inwerken.
18. Gebruik water en een nieuwe doek om alle sporen van het desinfectiemiddel te verwijderen.
19. Wrijf na met een droge doek.
20. Laat de bovenhoes van de matras of het zitkussen aan de lucht drogen.
21. Desinfecteer zo nodig de binnenkant van de matras of het zitkussen. Rits de bovenhoes los om toegang te krijgen tot de interne componenten.
22. Spuit een desinfecterende oplossing op een droge doek en verspreid de oplossing over alle interne componenten.
23. Laat het desinfectiemiddel even inwerken.
24. Gebruik water en een nieuwe doek om alle sporen van het desinfectiemiddel te verwijderen.
25. Wrijf na met een droge doek.
26. Laat de interne componenten aan de lucht drogen voordat u de bovenhoes van de matras weer aanbrengt.
27. Zo nodig kunt u de banden en basis van de matras of het zitkussen op dezelfde manier reinigen. Maak de banden los, zodat ze beter toegankelijk zijn.