

Nødvendig tilbehør:

- Sprayflaske med desinfeksjonsmiddel (enten 70 % alkoholløsning eller klorløsning på opptil 10 000 ppm)
- Nøytralt vaskemiddel
- Sprayflaske med vann
- Kluter

Rengjør og desinfiser mellom pasienter og regelmessig mens den er i bruk.



#### ADVARSEL

For å unngå elektrisk støt må du alltid koble pumpen fra strømkilden før du rengjør og inspiserer.

Les alltid bruksanvisningen og sikkerhetsdatabladet for desinfeksjonsmiddelet.

For å unngå hud- eller øyeirritasjon må desinfisering aldri utføres mens en pasient er til stede.

## Klargjøring

1. Koble pumpen fra madrassen eller seteputen.
2. Slå av pumpen og koble den fra strømkilden.

## Rengjøre pumpen

3. Bruk en ren klut og rengjøringsløsning, og tørk av for å fjerne eventuelle avsetninger eller synlig smuss på:
  - hoveddekselet
  - membran
  - etiketter
  - hengebraketter
4. Alle områder der det har vært smussrester, skal rengjøres på nytt med rengjøringsløsning.
5. Bruk vann og en ny klut til å tørke bort alle spor etter rengjøringsmiddelet, etterfulgt av en tørr klut.

## Desinfisere pumpen

6. Spray desinfeksjonsmiddel på en tørr klut, og spre middelet på alle områder.
7. Gi det tid til å desinfisere.
8. Bruk vann og en ny klut til å tørke bort alle spor etter desinfeksjonsmiddelet.
9. Tørk av med en tørr klut.

## Rengjør madrassen eller seteputen

10. Spray alle utvendige områder av madrassen eller seteputens topptrekk med rengjøringsmiddelet, og tørk bort smuss med en ren klut
11. Alle områder der det har vært smussrester, skal rengjøres på nytt med rengjøringsløsningen før du fortsetter.
12. Bruk vann og en ny klut til å tørke bort alle spor etter rengjøringsmiddelet, etterfulgt av en tørr klut for å fjerne overskytende fuktighet.
13. Rengjør om nødvendig innsiden av madrassen eller seteputen. Åpne glidelåsen i topptrekket for å komme til de innvendige komponentene.
14. Spray rengjøringsløsningen på en tørr klut for å tørke av:
  - celler
  - bunntrekk
  - remmer
15. Bruk vann og en ny klut til å tørke bort alle spor etter rengjøringsmiddelet, etterfulgt av en tørr klut.

## Desinfiser madrassen eller seteputen

16. Spray desinfeksjonsmiddel på en tørr klut, og spre middelet på alle utvendige områder av madrassen eller seteputens topptrekk.
17. Gi det tid til å desinfisere.
18. Bruk vann og en ny klut til å tørke bort alle spor etter desinfeksjonsmiddelet.
19. Tørk av med en tørr klut.
20. La madrassen eller seteputens topptrekk lufttørke.
21. Desinfiser om nødvendig innsiden av madrassen eller seteputen. Åpne glidelåsen i topptrekket for å komme til de innvendige komponentene.
22. Spray desinfeksjonsmiddel på en tørr klut, og spre middelet på alle innvendige komponenter.
23. Gi det tid til å desinfisere.
24. Bruk vann og en ny klut til å tørke bort alle spor etter desinfeksjonsmiddelet.
25. Tørk av med en tørr klut.
26. La de innvendige komponentene lufttørke før du fester topptrekket til madrassen igjen.
27. Remmene og underlaget på madrassen eller seteputen kan om nødvendig rengjøres med samme metode. Hekt løs remmene slik at du enkelt kommer til.