

Potrzebne akcesoria:

- Butelka z atomizerem zawierająca roztwór środka dezynfekującego (alkohol 70% lub podchloryn do 10 000 ppm)
- Neutralny detergent (roztwór czyszczący)
- Spryskiwacz z wodą
- Ściereczki

Czyść i dezynfekuj przed zmianą pacjenta oraz z regularną częstotliwością w czasie użycia.



UWAGA

Aby uniknąć porażenia prądem, przed czyszczeniem i dezynfekcją pompy należy zawsze odłączyć ją od zasilania.

Należy zawsze przeczytać instrukcję obsługi i kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej dla środka dezynfekcyjnego.

Aby uniknąć podrażnienia oczu lub skóry, nigdy nie należy przeprowadzać dezynfekcji w obecności pacjenta.

Przygotowanie

1. Odłączyć pompę od materaca lub siedziska.
2. Wyłączyć pompę i odłączyć ją od źródła zasilania.

Czyszczenie pompy

3. Używaj czystej szmatki i roztworu czyszczącego i wytrzyj, aby usunąć wszelkie osady lub widoczne zabrudzenia z:
 - głównej obudowy
 - osłony
 - etykiet
 - wsporników do zawieszania
4. Wszelkie obszary, na których pozostały resztki brudu, należy ponownie oczyścić roztworem czyszczącym.
5. Wodą i nową ściereczką zetrzeć wszystkie ślady roztworu do czyszczenia, a następnie wytrzeć suchą ściereczką.

Dezynfekcja pompy

6. Suchą ściereczkę spryskać środkiem dezynfekcyjnym i rozprowadzić roztwór po całej powierzchni pompy.
7. Pozostaw na jakiś czas do dezynfekcji.
8. Wodą i nową ściereczką zetrzeć wszystkie ślady środka dezynfekcyjnego.
9. Wytrzyj suchą ściereczką.

Czyszczenie materaca lub siedziska

10. Na całej zewnętrznej powierzchni materaca lub pokrowca siedziska rozpylić roztwór czyszczący i zetrzeć zabrudzenia czystą ściereczką.
11. Wszelkie obszary, na których pozostały resztki brudu, należy ponownie oczyścić roztworem czyszczącym przed podjęciem kolejnych kroków.
12. Wodą i nową ściereczką zetrzeć wszystkie ślady roztworu do czyszczenia, a następnie suchą ściereczką wytrzeć do sucha.
13. W razie potrzeby można wyczyścić wnętrze materaca lub siedziska. Rozepnij górny pokrowiec, aby uzyskać dostęp do wewnętrznych elementów.
14. Rozpyl roztwór czyszczący na suchą ściereczkę, aby zetrzeć:
 - komory
 - dolny pokrowiec
 - pasy
15. Wodą i nową ściereczką zetrzeć wszystkie ślady roztworu do czyszczenia, a następnie wytrzeć suchą ściereczką.

Dezynfekcja materaca lub siedziska

16. Rozpylić środek dezynfekcyjny na suchą szmatkę i rozprowadzić po wszystkich powierzchniach zewnętrznych materaca lub górnego pokrowca siedziska.
17. Pozostaw na jakiś czas do dezynfekcji.
18. Wodą i nową ściereczką zetrzeć wszystkie ślady środka dezynfekcyjnego.
19. Wytrzyj suchą ściereczką.
20. Pozostawić górny pokrowiec materaca lub siedziska do wyschnięcia na powietrzu.
21. W razie potrzeby można zdezynfekuj wnętrze materaca lub siedziska. Rozepnij górny pokrowiec, aby uzyskać dostęp do wewnętrznych elementów.
22. Suchą ściereczką spryskać środkiem dezynfekcyjnym i rozprowadzić po wszystkich podzespołach wewnętrznych.
23. Pozostaw na jakiś czas do dezynfekcji.
24. Wodą i nową ściereczką zetrzeć wszystkie ślady środka dezynfekcyjnego.
25. Wytrzyj suchą ściereczką.
26. Przed ponownym zamocowaniem górnego pokrowca materaca pozostawić podzespoły wewnętrzne do wyschnięcia.
27. W razie konieczności powyższą metodą można również wyczyścić pasy i podstawę materaca lub siedziska. W celu ułatwienia dostępu wypiąć pasy z zatrasków.