

Acessórios necessários:

- Garrafa pulverizadora com solução desinfetante (solução de álcool a 70% ou solução de cloro até 10 000 ppm)
- Detergente neutro (solução de limpeza)
- Garrafa pulverizadora com água
- Panos

Durante a utilização, limpe e desinfete entre pacientes e em intervalos regulares.



AVISO

Para evitar choques elétricos, desligue sempre a bomba da fonte de alimentação antes de limpar e inspecionar.

Leia sempre as instruções de utilização e a Ficha de dados de segurança do desinfetante.

Para evitar irritações nos olhos ou na pele, nunca desinfete na presença de um paciente.

Preparação

1. Desligue a bomba do colchão ou da almofada de assento.
2. Desligue a bomba e desligue-a da fonte de alimentação.

Limpar a bomba

3. Utilize um pano limpo e uma solução de limpeza para limpar e remover qualquer depósito ou sujidade visível:
 - na caixa principal
 - na membrana
 - nas etiquetas
 - nos grampos de suspensão
4. Qualquer área onde tenha ficado sujidade residual deve ser limpa de novo com uma solução de limpeza.
5. Utilize água e um pano novo para remover todos os vestígios da solução de limpeza e depois um pano seco.

Desinfetar a bomba

6. Pulverize solução desinfetante num pano seco e espalhe-a em todas as áreas.
7. Dê tempo para desinfetar.
8. Utilize água e um pano novo para remover todos os vestígios da solução desinfetante.
9. Limpe com um pano seco.

Limpar o colchão ou a almofada do assento

10. Pulverize todas as áreas externas das coberturas superiores do colchão ou da almofada do assento com a solução de limpeza e limpe qualquer sujidade com um pano limpo.
11. Qualquer área onde tenha ficado sujidade residual deve ser limpa de novo com a solução de limpeza antes de continuar.
12. Utilize água e um pano novo para remover todos os vestígios de solução de limpeza, seguido de um pano seco para remover qualquer excesso de humidade.
13. Se necessário, limpe o interior do colchão ou da almofada do assento. Abra o fecho da cobertura superior para aceder aos componentes internos.
14. Pulverize a solução de limpeza num pano seco para limpar:
 - células
 - cobertura inferior
 - extensões
15. Utilize água e um pano novo para remover todos os vestígios da solução de limpeza e depois um pano seco.

Desinfetar o colchão ou a almofada do assento

16. Pulverize solução desinfetante num pano seco e espalhe-a em todas as áreas externas das coberturas superiores do colchão ou da almofada do assento.
17. Dê tempo para desinfetar.
18. Utilize água e um pano novo para remover todos os vestígios da solução desinfetante.
19. Limpe com um pano seco.
20. Deixe a cobertura superior do colchão ou almofada do assento secar ao ar.
21. Se necessário, desinfete o interior do colchão ou da almofada do assento. Abra o fecho da cobertura superior para aceder aos componentes internos.
22. Pulverize solução desinfetante num pano seco e espalhe-a em todos os componentes internos.
23. Dê tempo para desinfetar.
24. Utilize água e um pano novo para remover todos os vestígios da solução desinfetante.
25. Limpe com um pano seco.
26. Deixe que os componentes internos sequem ao ar antes de voltar a fixar a cobertura superior do colchão.
27. Se necessário, as extensões e a base do colchão ou da almofada do assento também podem ser limpas utilizando o mesmo método. Desprenda as extensões para facilidade de acesso.