

Необходимые принадлежности:

- Бутыль с разбрызгивателем с дезинфицирующим средством (70%-й спиртовой раствор или раствор, содержащий хлор, до 10 000 м. д.).
- Нейтральное моющее средство (чистящий раствор).
- Разбрызгиватель с водой.
- Салфетки.

Проводите очистку и дезинфекцию между пациентами и через регулярные промежутки времени в процессе использования.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание поражения электрическим током обязательно отсоедините помпу от источника питания перед очисткой и проверкой.

Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации и паспорт безопасности дезинфицирующего средства.

Во избежание раздражения глаз или кожи не проводите дезинфекцию в присутствии пациента.

## Подготовка

1. Отсоедините помпу от матраса или подушки сиденья.
2. Выключите помпу и отсоедините ее от источника питания.

## Очистка помпы

3. Используя чистую салфетку и чистящий раствор, протрите, чтобы удалить отложения и видимую грязь, следующие компоненты:
  - основной корпус;
  - мембрану;
  - этикетки;
  - кронштейны для подвешивания.
4. Все зоны, где осталась грязь, следует повторно очистить чистящим раствором.
5. Используя воду и новую салфетку, сотрите остатки чистящего раствора, затем протрите начисто сухой салфеткой.

## Дезинфекция помпы

6. Распылите дезинфицирующее средство на сухую салфетку и распределите его по всем участкам изделия.
7. Выдержите установленное для дезинфекции время.
8. Используя воду и новую салфетку, сотрите остатки дезинфицирующего средства.
9. Затем протрите начисто сухой салфеткой.

## Очистка матраса или подушки сиденья

10. Распылите на все участки верхних чехлов матраса или подушки сиденья чистящий раствор и сотрите грязь чистой салфеткой.
11. Прежде чем продолжить, следует повторно очистить чистящим раствором все зоны, где осталась грязь.
12. Используя воду и новую салфетку, сотрите остатки чистящего раствора, затем сухой салфеткой удалите излишнюю влагу.
13. При необходимости очистите внутреннюю часть матраса или подушки сиденья. Откройте застежку-молнию верхнего чехла для доступа к внутренним компонентам.
14. Распылите чистящий раствор на сухую салфетку и протрите:
  - ячейки;
  - нижний чехол;
  - ремни.
15. Используя воду и новую салфетку, сотрите остатки чистящего раствора, затем протрите начисто сухой салфеткой.

## Дезинфекция матраса или подушки сиденья

16. Распылите дезинфицирующее средство на сухую салфетку и распределите раствор по всем наружным поверхностям верхнего чехла матраса или подушки сиденья.
17. Выдержите установленное для дезинфекции время.
18. Используя воду и новую салфетку, сотрите остатки дезинфицирующего средства.
19. Затем протрите начисто сухой салфеткой.
20. Дайте верхнему чехлу матраса или подушки сиденья высохнуть на воздухе.
21. При необходимости продезинфицируйте внутреннюю часть матраса или подушки сиденья. Откройте застежку-молнию верхнего чехла для доступа к внутренним компонентам.
22. Распылите дезинфицирующее средство на сухую салфетку и распределите его по всем внутренним компонентам.
23. Выдержите установленное для дезинфекции время.
24. Используя воду и новую салфетку, сотрите остатки дезинфицирующего средства.
25. Затем протрите начисто сухой салфеткой.
26. Дайте внутренним компонентам высохнуть на воздухе, прежде чем снова надевать верхний чехол матраса.
27. При необходимости ремни и основание матраса или подушки сиденья можно очистить аналогичным способом. Расстегните ремни для удобства доступа.