

Napust'te oporu pro nohy

1

Ujist'ete se, že je vana ve vzpřímené poloze.

2

Zavřete odtok.

3

Nebezpečí opaření

Stiskněte tlačítko autonapouštění. Holou rukou vyzkoušejte teplotu vody a podle potřeby upravte.

4

Napouštění se zastaví, jakmile se opora pro nohy naplní vodou.

Usad'te pacienta/klienta

5

Otevřete zcela dvířka vany.

6

Upravte výšku vany tak, aby byla pro pacienta/klienta pohodlná.

7

Nebezpečí pádu

Pomozte pacientovi/klientovi vstoupit do vany.

8

Nebezpečí zachycení

Zavřete a uzamkněte dvířka vany.

Vykoupejte pacienta/klienta

9

Zakloňte vanu.

10

Upravte výšku vany tak, aby byla pohodlná pro ošetřující personál.

11

Nebezpečí opaření

Stiskněte tlačítko autonapouštění pro doplnění vody. Holou rukou vyzkoušejte teplotu vody a podle potřeby upravte.

Osprchujte pacienta/klienta

12

Zvedněte rukojeť sprchy.

13

Aktivujte tlačítko sprchy.

14

Nebezpečí opaření

Stiskněte spoušť na rukojeti sprchy. Holou rukou vyzkoušejte teplotu vody.

15

Nechte pacienta/klienta vyzkoušet teplotu vody. Upravte teplotu podle potřeby.

16

Umyjte a osprchujte pacienta/klienta.

Ukončete koupel

17

Deaktivujte tlačítko sprchy.

18

Rukojeť sprchy vložte do držáku.

19

Otevřete odtok.

20

Postupně zvedejte vanu zpět do vzpřímené polohy.

21

Použijte sprchu nebo ručníky, abyste pacienta/klienta udržovali v teple.

22

Snižte vanu.

23

Zkontrolujte, zda je hladina vody pod úrovní dvířek.

24

Otevřete zcela dvířka vany.

25

Nebezpečí pádu

Osušte pacienta/klienta. Pomozte pacientovi/klientovi vystoupit z vany.

26

Nebezpečí kontaminace

Po každém pacientovi/klientovi vyčistěte a vydezinfikujte vanu podle pokynů uvedených v návodu a stručné referenční příručce pro čištění a dezinfekci.