

Parker

Fyld fodbund op med vand

1

Sørg for, at badekarret befinder sig i opret stilling.

2

Luk for afløbet.

3

Risiko for skoldning

Tryk på knappen Autofyld. Mærk på vandet, og tilpas temperaturen om nødvendigt.

4

Fyldningen standser, når fodbunden er fyldt op.

Anbring plejemodtageren i badekarret

5

Åbn badekarslågen helt op.

6

Juster badekarrets højde, så det passer til plejemodtageren.

7

Risiko for fald

Hjælp plejemodtageren med at komme ned i badekarret.

8

Risiko for fastklemning

Luk og lås badekarslågen.

Vask plejemodtageren

9

Læn badekarret tilbage.

10

Juster badekarrets højde, så det passer til plejepersonalet.

11

Risiko for skoldning

Tryk på knappen Autofyld for at fylde mere vand i. Mærk på vandet, og tilpas temperaturen om nødvendigt.

Brusebadning af plejemodtageren

12

Løft håndbruseren af.

13

Aktivér knappen Bruser.

14

Risiko for skoldning

Tryk på udløseren på håndbruseren. Mærk på vandet med hånden.

15

Lad plejemodtageren mærke vandet. Tilpas vandtemperaturen efter behov.

16

Vask og bad plejemodtageren.

Afslutning af badet

17

Deaktivér knappen Bruser.

18

Sæt håndbruseren i holderen.

19

Åbn for afløbet.

20

Løft badekarret op i opret stilling i intervaller.

21

Hold plejemodtageren varm ved hjælp af bruseren eller håndklæder.

22

Sænk badekarret.

23

Sørg for, at vandstanden står under døråbningen.

24

Åbn badekarslågen helt op.

25

Risiko for fald

Tør plejemodtageren. Hjælp plejemodtageren med at komme op af badekarret.

26

Risiko for kontaminering

Efter hver plejemodtager: Rengør og desinficer badekarret som angivet i instruktionerne i brugsvejledningen eller i lynvejledningen (QRG) vedrørende rengøring og desinfektion.