

## Befüllen des Fußraums vor dem Baden

**1**

Achten Sie darauf, dass sich die Badewanne in der aufrechten Position befindet.

**2**

Schließen Sie den Abfluss.

**3**

**Verbrühungsgefahr**

Drücken Sie die Taste für die automatische Wannenfällung. Prüfen Sie die Wassertemperatur mit der bloßen Hand und regulieren Sie die Temperatur gegebenenfalls.

**4**

Der Füllvorgang hört automatisch auf, wenn der Fußraum gefüllt ist.

## Patienten in die Wanne setzen

**5**

Öffnen Sie die Badewannentür vollständig.

**6**

Stellen Sie die Badewannenhöhe für den Patienten ein.

**7**

**Sturzgefahr**

Helfen Sie dem Patienten beim Einstieg in die Badewanne.

**8**

**Einklemmgefahr**

Schließen und verriegeln Sie die Badewannentür.

## Baden des Patienten

**9**

Neigen Sie die Badewanne zurück.

**10**

Stellen Sie die Badewannenhöhe für die Pflegekraft ein.

**11**

**Verbrühungsgefahr**

Drücken Sie die Taste für die automatische Wannenfällung, um Wasser hinzuzufügen. Prüfen Sie die Wassertemperatur mit der bloßen Hand und regulieren Sie die Temperatur gegebenenfalls.

## Duschen des Patienten

**12**

Nehmen Sie den Duschgriff ab.

**13**

Drücken Sie die Duschtaste.

**14**

**Verbrühungsgefahr**

Drücken Sie den Hebel am Duschgriff. Prüfen Sie die Wassertemperatur mit der bloßen Hand.

**15**

Lassen Sie den Patienten das Wasser fühlen. Die Wassertemperatur ggf. regulieren.

**16**

Waschen und duschen Sie den Patienten.

## Beenden des Badevorgangs

**17**

Deaktivieren Sie die Duschtaste.

**18**

Stecken Sie den Duschgriff in den Halter zurück.

**19**

Öffnen Sie den Abfluss.

**20**

Bringen Sie die Badewanne schrittweise in die aufrechte Position.

**21**

Halten Sie den Patienten mit der Dusche oder mit Handtüchern warm.

**22**

Senken Sie die Badewanne ab.

**23**

Achten Sie darauf, dass sich der Wasserstand unterhalb der Tür befindet.

**24**

Öffnen Sie die Badewannentür vollständig.

**25**

**Sturzgefahr**

Trocknen Sie den Patienten ab. Helfen Sie dem Patienten beim Ausstieg aus der Badewanne.

**26**

**Risiko einer Kontamination**

**Nach jedem Patienten:** Reinigen und desinfizieren Sie die Badewanne gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung oder in der Kurzanleitung „Reinigung und Desinfektion“.