

Llene previamente el espacio para las piernas

<p>1</p> <p>Asegúrese de que la bañera esté en posición vertical.</p>	<p>2</p> <p>Cierre el desagüe.</p>	<p>3</p> <p>Riesgo de quemadura</p> <p>Pulse el botón de llenado automático. Compruebe la temperatura del agua con la mano y ajústela si fuera necesario.</p>	<p>4</p> <p>El llenado se detiene cuando el espacio para las piernas está lleno.</p>
--	---	--	---

Siente al paciente

<p>5</p> <p>Abra por completo la mampara de la bañera.</p>	<p>6</p> <p>Ajuste la altura de la bañera en función del paciente.</p>	<p>7</p> <p>Riesgo de caída</p> <p>Ayude al paciente a introducirse en la bañera.</p>	<p>8</p> <p>Riesgo de atrapamiento</p> <p>Cierre la mampara de la bañera y bloquéela.</p>
---	---	--	--

Asee al paciente

<p>9</p> <p>Recline la bañera.</p>	<p>10</p> <p>Ajuste la altura de la bañera en función del cuidador.</p>	<p>11</p> <p>Riesgo de quemadura</p> <p>Pulse el botón de llenado automático para añadir agua. Compruebe la temperatura del agua con la mano y ajústela si fuera necesario.</p>
---	--	--

Duche al paciente

<p>12</p> <p>Levante el cabezal de ducha.</p>	<p>13</p> <p>Active el botón de la ducha.</p>	<p>14</p> <p>Riesgo de quemadura</p> <p>Presione el gatillo del cabezal de ducha. Compruebe la temperatura del agua con la mano.</p>	<p>15</p> <p>Permita que el paciente toque el agua. Regule la temperatura, en caso necesario.</p>	<p>16</p> <p>Lave y duche al paciente.</p>
--	--	---	--	---

Termine el baño

<p>17</p> <p>Desactive el botón de la ducha.</p>	<p>18</p> <p>Coloque el cabezal de ducha en el soporte.</p>	<p>19</p> <p>Abra el desagüe.</p>	<p>20</p> <p>A intervalos, incline la bañera hasta que esté en posición vertical.</p>	<p>21</p> <p>Utilice la ducha o toallas para evitar que el paciente se enfríe.</p>
<p>22</p> <p>Baje la bañera.</p>	<p>23</p> <p>Asegúrese de que el nivel del agua está por debajo de la abertura de la puerta.</p>	<p>24</p> <p>Abra por completo la mampara de la bañera.</p>	<p>25</p> <p>Riesgo de caída</p> <p>Seque al paciente. Ayude al paciente a salir de la bañera.</p>	<p>26</p> <p>Riesgo de contaminación</p> <p>Después de cada paciente: limpie y desinfecte la bañera tal y como se indica en las IDU o en la QRG de limpieza y desinfección.</p>