

Parker

Fylle fotbrønnen

1

Sørg for at badekaret står i oppreist stilling.

2

Lukk avløpet.

3

Risiko for skålding

Trykk på knappen for automatisk fylling. Kjenn på vanntemperaturen med en bar hånd, og juster om nødvendig temperaturen.

4

Fyllingen stopper når fotbrønnen er fylt.

Plassere pasienten

5

Åpne badekardøren helt.

6

Juster badekarets høyde slik at den passer for pasienten.

7

Risiko for å falle

Hjelp pasienten ned i badekaret.

8

Risiko for å bli sittende fast

Lukk og lås badekardøren.

Bade pasienten

9

Len badekaret bakover.

10

Juster badekarets høyde slik at den passer for pleieren.

11

Risiko for skålding

Trykk på knappen for automatisk fylling for å fylle på mer vann. Kjenn på vanntemperaturen med en bar hånd, og juster om nødvendig temperaturen.

Dusje pasienten

12

Løft av dusjhåndtaket.

13

Aktiver dusjknappen.

14

Risiko for skålding

Trykk på utløseren på dusjhåndtaket. Kjenn på vannet med en bar hånd.

15

La pasienten kjenne på vannet. Juster temperaturen hvis det er nødvendig.

16

Vask og dusj pasienten.

Avslutte badet

17

Deaktiver dusjknappen.

18

Sett dusjhåndtaket i holderen.

19

Åpne avløpet.

20

Vipp badekaret litt etter litt til oppreist stilling.

21

Hold pasienten varm med dusjen eller håndklær.

22

Senk badekaret.

23

Kontroller at vannivået er lavere enn døråpningen.

24

Åpne badekardøren helt.

25

Risiko for å falle

Tørk pasienten. Hjelp pasienten ut av badekaret.

26

Risiko for kontaminering

Rengjør og desinfiser badekaret etter hver pasient. Følg instruksjonene i bruksanvisningen eller hurtigveiledningen for Rengjøring og desinfisering.