

Napełnianie niecki na stopy

1

Sprawdzić, czy wanna jest ustawiona w pozycji pionowej/wyprostowanej.

2

Zamknąć odpływ.

3

Ryzyko oparzenia

Wcisnąć przycisk automatycznego napełniania. Sprawdzić temperaturę wody ręką i odpowiednio wyregulować w razie potrzeby.

4

Napełnianie wyłączy się po napełnieniu niecki na stopy.

Umieszczenie pacjenta

5

Całkowicie otworzyć drzwi wanny.

6

Ustawić wysokość wanny w zależności od potrzeb pacjenta.

7

Ryzyko upadku

Pomóc pacjentowi wejść do wanny.

8

Ryzyko uwięzienia

Zamknąć i zablokować drzwi wanny.

Kąpiel pacjenta

9

Obniżyć wannę.

10

Ustawić wysokość wanny w zależności od potrzeb opiekuna.

11

Ryzyko oparzenia

Wcisnąć przycisk automatycznego napełniania, aby dolać wody. Sprawdzić temperaturę wody ręką i odpowiednio wyregulować w razie potrzeby.

Mycie pacjenta pod prysznicem

12

Unieść słuchawkę prysznicową z uchwytu.

13

Aktywować przycisk prysznica.

14

Ryzyko oparzenia

Nacisnąć język spustowy słuchawki prysznicowej. Sprawdzić temperaturę wody ręką.

15

Pozwolić pacjentowi sprawdzić temperaturę wody. Jeśli potrzeba, dostosować temperaturę wody.

16

Umyć i opłukać pacjenta.

Kończenie kąpieli

17

Aktywować przycisk prysznica.

18

Słuchawkę prysznicową wstawić do uchwytu.

19

Otworzyć odpływ.

20

Stopniowo ustawić wannę w pozycji wyprostowanej.

21

Zapobiegać przeziębieniu pacjenta ogrzewając go wodą z prysznica lub ręcznikami.

22

Obniżyć wannę.

23

Upewnić się, że poziom wody jest niższy od drzwi.

24

Całkowicie otworzyć drzwi wanny.

25

Ryzyko upadku

Osuszyć pacjenta. Pomóc pacjentowi wyjść z wanny.

26

Ryzyko zakażenia

Umyć i zdezynfekować wannę **po każdym pacjencie**, zgodnie z instrukcją obsługi lub skróconą instrukcją obsługi „Czyszczenie i dezynfekcja”.