



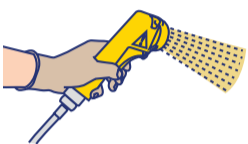


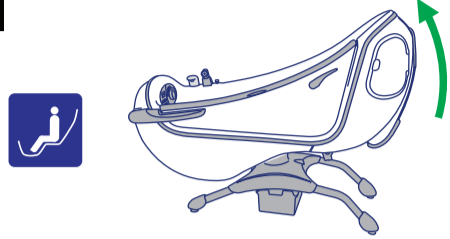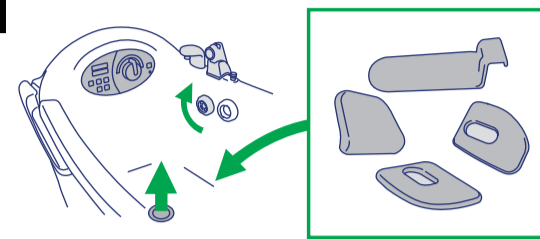

## Vydezinfikujte integrovanou rozprašovací rukojeť

### Odstranění viditelných usazenin

<p><b>1</b></p>  <p>Nasadte si ochranné rukavice a brýle.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Vana by měla být ve vzpřímené pozici a všechny funkce by měly být vypnuté.</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Otevřete odtok. Veškeré příslušenství položte na dno.</p>	<p><b>4</b></p>  <p>Viditelné zbytky osprchujte vodou.</p>
--	---	--	---

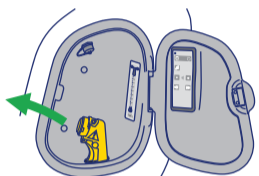





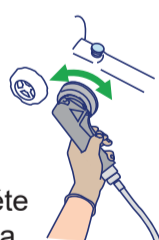

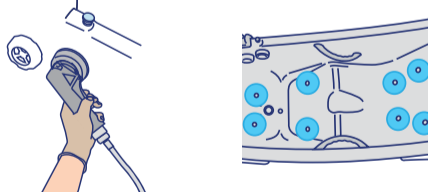


### Určete směsný poměr dezinfekčního prostředku

<p><b>5</b></p>  <p>Zvedněte rozprašovací dezinfekční rukojeť.</p>	<p><b>6</b></p> <p>5 sekund</p>  <p>Aktivujte tlačítko dezinfekce.</p>	<p><b>7</b></p>   <p>Stříkejte do vany, dokud průtokoměr neukáže správnou směsnou hodnotu podle návodu k použití. Podle potřeby upravte knoflík na sací hadici.</p>	<p><b>8</b></p>  <p>Teplota mísení 20 °C (68 °F).</p>
--	--	--	---

### Čištění

<p><b>9</b></p>  <p>Nastříkejte dezinfekční prostředek do odtoku. Odtok vydrhněte kartáčem.</p>	<p><b>10</b></p>  <p>Zavřete odtok.</p>	<p><b>11</b></p>  <p>Dezinfekční prostředek nastříkejte na všechny vnitřní povrchy a všechny strany příslušenství.</p>	<p><b>12</b></p>  <p>Vnitřní povrchy a příslušenství důkladně vydrhněte.</p>	<p>U vany Parker bez perličky pokračujte krokem 24.</p>
--	--	--	---	---
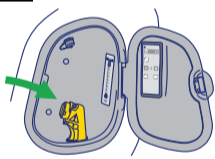
### Kroky 13–23 platí pouze pro perličku

<p><b>13</b></p>  <p>Zakloňte vanu.</p>	<p><b>14</b></p>  <p>Rozprašovací dezinfekční rukojeť zasuňte do vstupu. Upevněte otočením doleva nebo doprava.</p>	<p><b>15</b></p>  <p>Stiskněte a přidržeťe spoušť. Dezinfekční prostředek musí proudit ze všech trysek nejméně 30 sekund.</p>	<p><b>16</b></p>  <p>Uvolněte spoušť a odstraňte rozprašovací rukojeť.</p>	<p><b>17</b></p>  <p>Rozprašovací rukojeť vložte zpět.</p>	
<p><b>18</b></p> <p>5 sekund</p>  <p>Deaktivujte tlačítko dezinfekce.</p>	<p><b>19</b></p>  <p>Rukojeť sprchy zasuňte do vstupu. Upevněte otočením doleva nebo doprava.</p>	<p><b>20</b></p>  <p>Aktivujte tlačítko sprchy.</p>	<p><b>21</b></p>  <p>Stiskněte a přidržeťe spoušť. Čistá voda musí proudit ze všech trysek nejméně 30 sekund.</p>	<p><b>22</b></p>  <p>Odstraňte rukojeť sprchy.</p>	<p><b>23</b></p>  <p>Zvedněte vanu do vzpřímené polohy.</p>

Pokračujte kroky na následující straně.

**24**

Otevřete odtok.

**25**

Teplota vody  
25 °C (77 °F).

**26**

Opláchněte vnitřní povrchy  
a příslušenství vodou.

**27**

Deaktivujte  
tlačítko sprchy.

**28**

Namočte hadřík do dezinfekčního prostředku.  
Otřete všechny vnější povrchy

## Dezinfekce

**29**

Veškerý dezinfekční prostředek odstraňte  
novou utěrkou a vodou.

**30**

5 sekund

Aktivujte  
tlačítko  
dezinfekce.

**31**

Nastříkejte dezinfekční  
prostředek do odtoku.

**32**

Zavřete odtok.

Kroky 35–46 platí pouze pro perličku

**33**

Dezinfekční prostředek nastříkejte na  
všechny vnitřní povrchy a všechny strany  
příslušenství.

**34**

Dezinfekční prostředek nechejte  
působit po předepsanou dobu  
podle pokynů jeho výrobce  
uvedených v návodu.

U vany  
Parker bez  
perličky  
pokračujte  
krokem 47.

**35**

Zakloňte  
vanu.

**36**

Rozprašovací  
dezinfekční  
rukojeť zasuňte  
do vstupu.  
Upevněte  
otočením doleva  
nebo doprava.

**37**

Stiskněte a přidržte spoušť. Dezinfekční  
prostředek musí proudit ze všech trysek  
nejméně 30 sekund.

**38**

Uvolněte spoušť  
a odstraňte rozprašovací  
rukojeť.

**39**

5 sekund

Deaktivujte  
tlačítko  
dezinfekce.

**40**

Rozprašovací  
rukojeť vložte  
zpět.

**41**

Dezinfekční prostředek nechejte  
působit po předepsanou dobu  
podle pokynů jeho výrobce  
uvedených v návodu.

**42**

Rukojeť sprchy  
zasuňte do  
vstupu. Upevněte  
otočením doleva  
nebo doprava.

**43**

Aktivujte  
tlačítko sprchy.

**44**

Stiskněte a přidržte spoušť. Čistá voda musí  
proudit ze všech trysek nejméně 30 sekund.

**45**

Odstraňte  
rukojeť sprchy.

**46**

Zvedněte vanu do  
vzpřímené polohy.

Pokračujte kroky na následující straně.

**47**

Otevřete odtok.

**48**

Aktivujte tlačítko sprchy.

**49**

Opláchněte vnitřní povrchy a příslušenství vodou.

**50**

Všechny vnější povrchy otřete dezinfekčním prostředkem.

**51**

Dezinfekční prostředek nechte působit po předepsanou dobu podle pokynů jeho výrobce uvedených v návodu.

**52**

Veškerý dezinfekční prostředek odstraňte novou utěrkou a vodou.

Kroky 53–54 platí pouze pro perličku

**53**

Stiskněte dvakrát tlačítko perličky. Nastavte nejvyšší intenzitu a nechte běžet 30 sekund.

**54**

Stiskněte jednou pro vypnutí.


**55**

Nechte vyschnout na vzduchu.

## Vydezinfikujte láhvi s rozprašovačem


### Odstranění viditelných usazenin

**1**




Nasadte si ochranné rukavice a brýle.

**2**

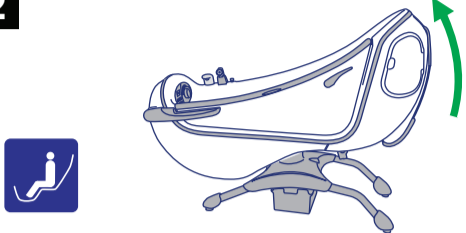


Vana by měla být ve vzpřímené pozici a všechny funkce by měly být vypnuté.

**3**

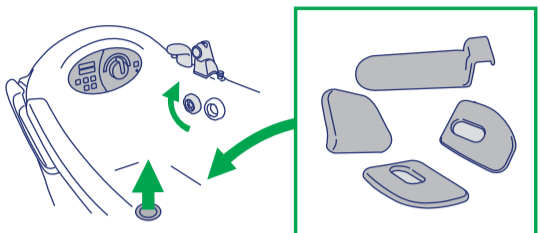

Otevřete odtok. Veškeré příslušenství položte na dno.


**4**

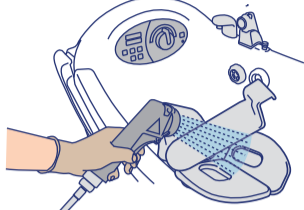

Viditelné zbytky osprchujte vodou.


### Čištění

**5**




Nastříkejte dezinfekční prostředek do odtoku. Odtok vydrhněte kartáčem.

**6**

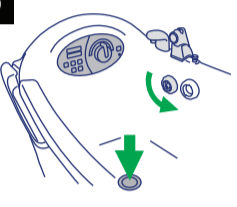


Zavřete odtok.

**7**




Dezinfekční prostředek nastříkejte na všechny vnitřní povrchy a všechny strany příslušenství.

**8**

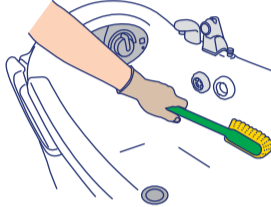


Vnitřní povrchy a příslušenství důkladně vydrhněte.

**9**

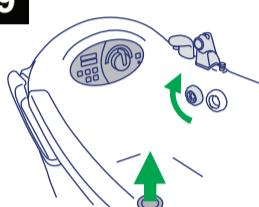


Otevřete odtok.

**10**

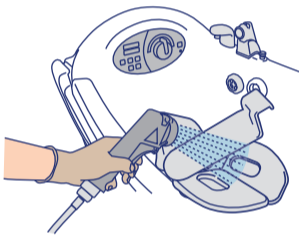


Opláchněte vnitřní povrchy a příslušenství vodou.

**11**

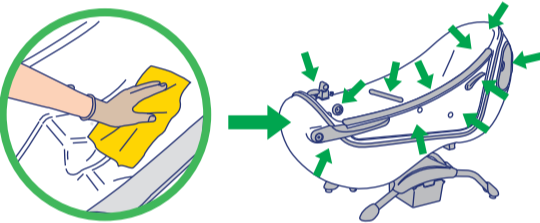

Všechny vnější povrchy otřete dezinfekčním prostředkem.


**12**

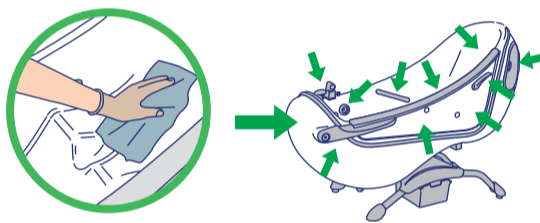

Veškerý dezinfekční prostředek odstraňte novou utěrkou a vodou.


### Dezinfekce

**13**




Nastříkejte dezinfekční prostředek do odtoku.

**14**

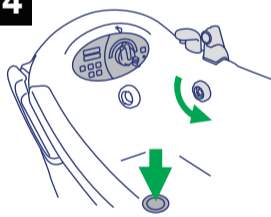


Zavřete odtok.

**15**




Dezinfekční prostředek nastříkejte na všechny vnitřní povrchy a všechny strany příslušenství.

**16**




Dezinfekční prostředek nechte působit po předepsanou dobu podle pokynů jeho výrobce uvedených v návodu.

**17**

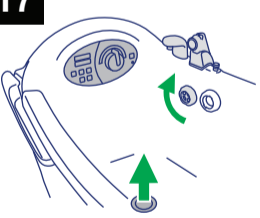


Otevřete odtok.

**18**

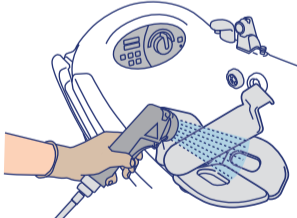


Opláchněte vnitřní povrchy a příslušenství vodou.

**19**

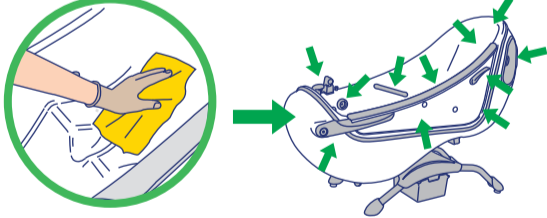


Všechny vnější povrchy otřete dezinfekčním prostředkem.

**20**




Dezinfekční prostředek nechte působit po předepsanou dobu podle pokynů jeho výrobce uvedených v návodu.

**21**

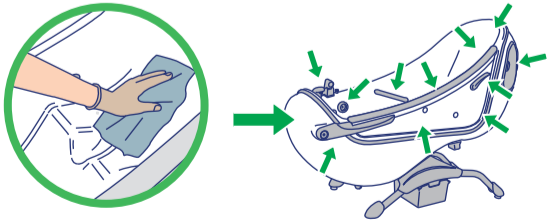

Veškerý dezinfekční prostředek odstraňte novou utěrkou a vodou.

**22**

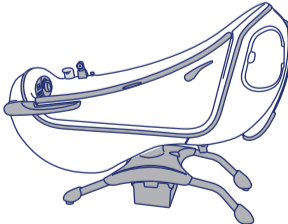

Nechte vyschnout na vzduchu.