


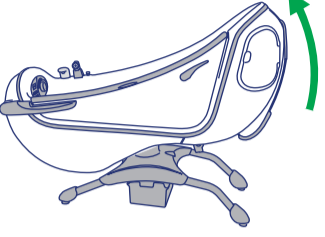
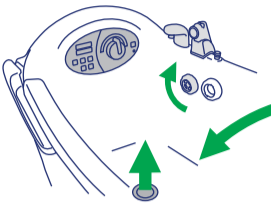
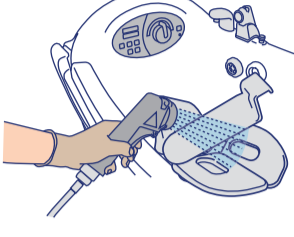






Desinficer med integreret sprayflaske


Fjernelse af synlige fremmedlegemer

1   Tag beskytteshandsker og -briller/-maske på.	2   Badekarret bør være i en opretstående position med alle funktioner slukket.	3  Åbn for afløbet. Placer alt tilbehør i bunden.	4  Skyl med vand for at fjerne synlige urenheder.
---	--	--	--

Bestem desinfektionsmidlets blandingsforhold

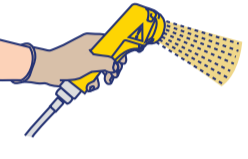5  Løft desinfektionspistolen ud.	6  5 sekunder Aktivér desinfektionsknappen.	7  Sprøjt ned i badekarret, indtil flowmåleren viser det korrekte blandingsforhold i henhold til brugsvejledningen. Juster sugeslangens knap efter behov.	8  Blandings-temperatur 20 °C (68 °F).
---	--	--	--

Rengøring

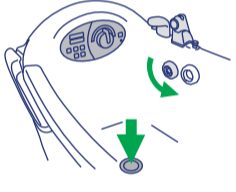9  Sprøjt desinfektionsmiddel i afløbet. Skrub afløbet med en børste.	10  Luk for afløbet.	11  Spray desinfektionsmiddel på alle indvendige overflader og alle sider af tilbehøret.	12  Skrub indvendige overflader og tilbehør grundigt.	Hvis dit Parker-bad ikke har luftspa, gå til trin 24.
--	---	--	--	---

Trin 13–23 kun for luftspa

13  Læn badekarret tilbage.	14  Placer desinfektionspistolen i indløbet. Drej til venstre eller højre for at låse den fast.	15  Tryk på og hold udløseren nede. Desinfektionsmidlet skal løbe fra alle dyser i mindst 30 sekunder.	16  Slip udløseren, og fjern desinfektionspistolen.	17  Sæt desinfektionspistolen tilbage.	
18  5 sekunder Deaktivér desinfektionsknappen.	19  Placer håndbruseren i indløbet. Drej til venstre eller højre for at låse den fast.	20  Aktivér knappen Bruser.	21  Tryk på og hold udløseren nede. Desinfektionsmidlet skal løbe fra alle dyser i mindst 30 sekunder.	22  Fjern håndbruseren.	23  Løft badekarret til opret stilling.

Fortsæt med trinnene på næste side

Parker

24

Åbn for afløbet.

25

Vandtemperatur 25 °C (77 °F).

26

Skyl indvendige overflader og tilbehør med vand.

27

Deaktiver knappen Bruser.

28

Opblød en klud i desinfektionsmiddel. Tør alle udvendige overflader af.

Desinficer

29

Fjern al desinfektionsmiddel med en ny klud og vand.

30

5 sekunder

Aktivér desinfektionsknappen.

31

Sprøjt desinfektionsmiddel i afløbet.

32

Luk for afløbet.

Trin 35-46 kun for luftspa

33

Spray desinfektionsmiddel på alle indvendige overflader og alle sider af tilbehøret.

34

Lad desinfektionsmidlet virke i det tidsrum, der er angivet i producentens brugsvejledning.

Hvis dit Parker-bad ikke har luftspa, gå til trin 47.

35

Læn badekarret tilbage.

36

Placer desinfektionspistolen i indløbet. Drej til venstre eller højre for at låse den fast.

37

Tryk på og hold udløseren nede. Desinfektionsmidlet skal løbe fra alle dyser i mindst 30 sekunder.

38

Slip udløseren, og fjern desinfektionspistolen.

39

5 sekunder

Deaktiver desinfektionsknappen.

40

Sæt desinfektionspistolen tilbage.

41

Lad desinfektionsmidlet virke i det tidsrum, der er angivet i producentens brugsvejledning.

42

Placer håndbruseren i indløbet. Drej til venstre eller højre for at låse den fast.

43

Aktivér knappen Bruser.

44

Tryk på og hold udløseren nede. Desinfektionsmidlet skal løbe fra alle dyser i mindst 30 sekunder.

45

Fjern håndbruseren.

46

Løft badekarret til opret stilling.

Fortsæt med trinnene på næste side

Parker

47

Åbn for afløbet.

48

Aktivér knappen Bruser.

49

Skyl indvendige overflader og tilbehør med vand.

50

Tør alle udvendige overflader af med desinfektionsmiddel.

51

Lad desinfektionsmidlet virke i det tidsrum, der er angivet i producentens brugsvejledning.

52

Fjern al desinfektionsmiddel med en ny klud og vand.

Trin 53–54 kun for luftspa

53

Tryk to gange på knappen luftspa. Kør på højeste intensitet i 30 sekunder.

54

Tryk én gang for at slukke.

55


Lad emnerne lufttørre.

Parker

Desinficer med sprayflaske


Fjernelse af synlige fremmedlegemer

1




Tag beskytteshandsker og -briller/-maske på.

2

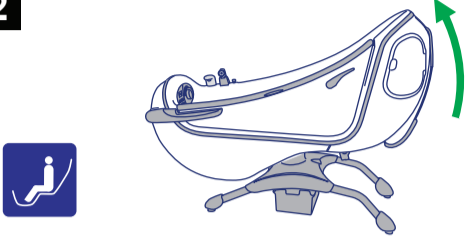


Badekarret bør være i en opretstående position med alle funktioner slukket.

3

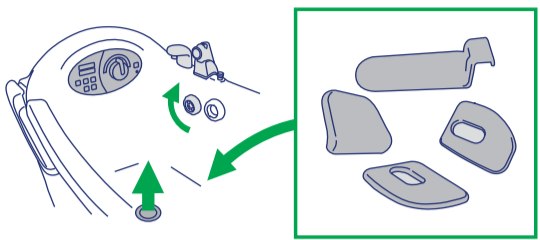

Åbn for afløbet. Placer alt tilbehør i bunden.


4

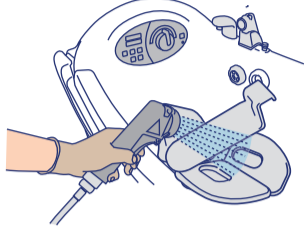

Skyl med vand for at fjerne synlige urenheder.


Rengøring

5




Sprøjt desinfektionsmiddel i afløbet. Skrub afløbet med en børste.

6

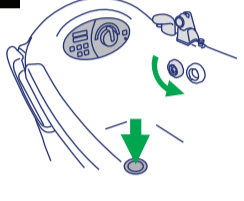


Luk for afløbet.

7

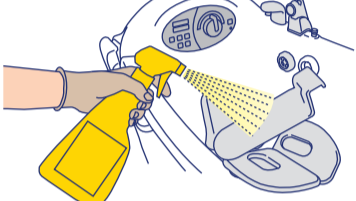


Spray desinfektionsmiddel på alle indvendige overflader og alle sider af tilbehøret.

8

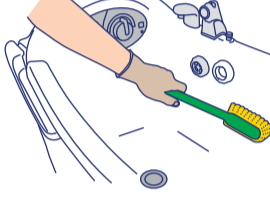


Skrub indvendige overflader og tilbehør grundigt.

9

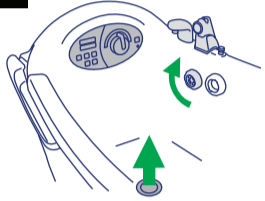


Åbn for afløbet.

10

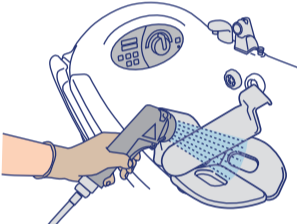


Skyl indvendige overflader og tilbehør med vand.

11

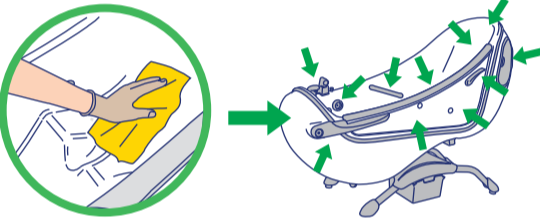

Tør alle udvendige overflader af med desinfektionsmiddel.


12

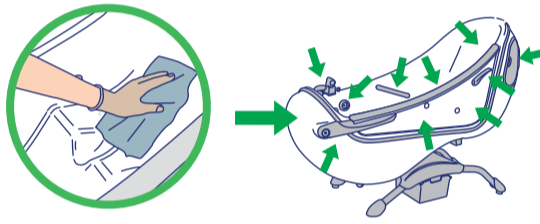

Fjern al desinfektionsmiddel med en ny klud og vand.


Desinficer

13




Sprøjt desinfektionsmiddel i afløbet.

14

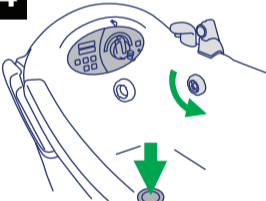


Luk for afløbet.

15

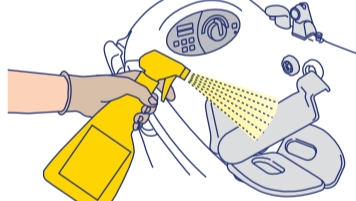


Spray desinfektionsmiddel på alle indvendige overflader og alle sider af tilbehøret.

16

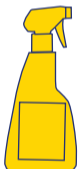


Lad desinfektionsmidlet virke i det tidsrum, der er angivet i producentens brugsvejledning.

17

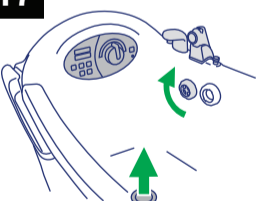


Åbn for afløbet.

18

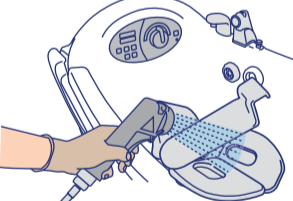


Skyl indvendige overflader og tilbehør med vand.

19

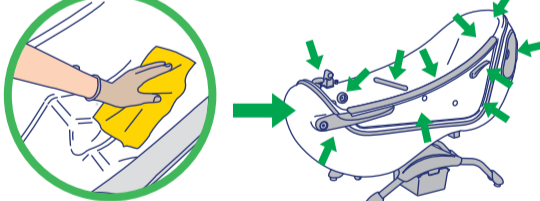


Tør alle udvendige overflader af med desinfektionsmiddel.

20




Lad desinfektionsmidlet virke i det tidsrum, der er angivet i producentens brugsvejledning.

21

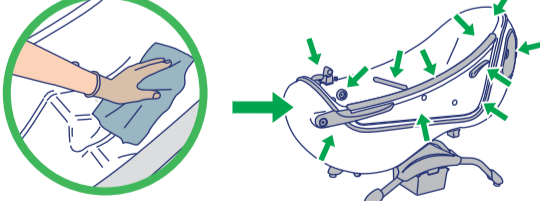

Fjern al desinfektionsmiddel med en ny klud og vand.

22

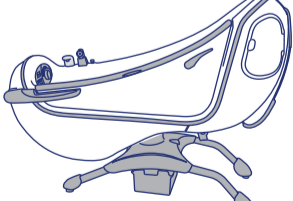

Lad emnerne lufttørre.