

## Desinfiser med det integrerte sprayhåndtaket



### Fjern synlige rester

<p><b>1</b></p> <p>Ta på hansker og vernebriller.</p>	<p><b>2</b></p> <p>Badekaret skal være i oppreist stilling med alle funksjonene slått av.</p>	<p><b>3</b></p> <p>Åpne avløpet. Legg alt tilbehøret i bunnen.</p>	<p><b>4</b></p> <p>Dusj med vann for å fjerne synlige rester.</p>
---	---	--	---

### Fastsett blandeforholdet for desinfeksjonsmiddel

<p><b>5</b></p> <p>Løft ut håndtaket til desinfeksjonssprayen.</p>	<p><b>6</b></p> <p>5 sekunder</p> <p>Aktiver desinfiseringsknappen.</p>	<p><b>7</b></p> <p>Spray i badekaret til strømningsmåleren viser riktig blandeverdi i henhold til bruksanvisningen. Juster om nødvendig knappen på sugeslangen.</p>	<p><b>8</b></p> <p>Blandetemperatur 20 °C (68 °F).</p>
--	---	---	--

### Rengjør

<p><b>9</b></p> <p>Spray desinfeksjonsmiddel i avløpet. Skrubb sluket med en børste.</p>	<p><b>10</b></p> <p>Lukk avløpet.</p>	<p><b>11</b></p> <p>Spray desinfeksjonsmiddel på alle innvendige overflater og på alle sider av tilbehøret.</p>	<p><b>12</b></p> <p>Skrubb innvendige overflater og tilbehøret grundig.</p>	<p>For Parker uten luftmassasje går du til trinn 24.</p>
--	---------------------------------------	---	---	--

### Trinn 13–23 kun for luftmassasje

<p><b>13</b></p> <p>Len badekaret bakover.</p>	<p><b>14</b></p> <p>Sett sprayhåndtaket for desinfeksjon i inntaket. Drei mot venstre eller høyre for å feste det godt.</p>	<p><b>15</b></p> <p>Trykk og hold inne utløseren. Desinfeksjonsmiddel må renne fra alle dysene i minst 30 sekunder.</p>	<p><b>16</b></p> <p>Slipp utløseren og fjern sprayhåndtaket.</p>	<p><b>17</b></p> <p>Sett sprayhåndtaket tilbake.</p>	
<p><b>18</b></p> <p>5 sekunder</p> <p>Deaktiver desinfiseringsknappen.</p>	<p><b>19</b></p> <p>Sett dusjhåndtaket i inntaket. Drei mot venstre eller høyre for å feste det godt.</p>	<p><b>20</b></p> <p>Aktiver dusjknappen.</p>	<p><b>21</b></p> <p>Trykk og hold inne utløseren. Det skal renne rent vann fra alle dysene i minst 30 sekunder.</p>	<p><b>22</b></p> <p>Fjern dusjhåndtaket.</p>	<p><b>23</b></p> <p>Hev badekar til oppreist stilling.</p>

Fortsett med trinnene på neste side

**24**

Åpne avløpet.

**25**

Vann-temperatur 25 °C (77 °F).

**26**

Skyll innvendige overflater og tilbehøret med vann.

**27**

Deaktiver dusjknappen.

**28**

Dynk en klut i desinfeksjonsmiddel. Tørk av alle utvendige overflater.

## Desinfisering

**29**

Fjern alt desinfeksjonsmiddel med en ny klut og vann.

**30**

5 sekunder

Aktiver desinfiseringsknappen.

**31**

Spray desinfeksjonsmiddel i avløpet.

**32**

Lukk avløpet.

## Trinn 35–46 kun for luftmassasje

**33**

Spray desinfeksjonsmiddel på alle innvendige overflater og på alle sider av tilbehøret.

**34**

La desinfeksjonsmiddelet virke så lenge det er angitt i bruksanvisningen fra produsenten av desinfeksjonsmiddelet.

For Parker uten luftmassasje går du til trinn 47.

**35**

Len badekaret bakover.

**36**

Sett sprayhåndtaket for desinfeksjon i inntaket. Drei mot venstre eller høyre for å feste det godt.

**37**

Trykk og hold inne utløseren. Desinfeksjonsmiddel må renne fra alle dysene i minst 30 sekunder.

**38**

Slipp utløseren og fjern sprayhåndtaket.

**39**

5 sekunder

Deaktiver desinfiseringsknappen.

**40**

Sett sprayhåndtaket tilbake.

**41**

La desinfeksjonsmiddelet virke så lenge det er angitt i bruksanvisningen fra produsenten av desinfeksjonsmiddelet.

**42**

Sett dusjhåndtaket i inntaket. Drei mot venstre eller høyre for å feste det godt.

**43**

Aktiver dusjknappen.

**44**

Trykk og hold inne utløseren. Det skal renne rent vann fra alle dysene i minst 30 sekunder.

**45**

Fjern dusjhåndtaket.

**46**

Hev badekar til oppreist stilling.

Fortsett med trinnene på neste side

# Parker

**47**

Åpne avløpet.

**48**

Aktiver dusjknappen.

**49**

Skyll innvendige overflater og tilbehøret med vann.

**50**

Tørk av alle utvendige overflater med desinfeksjonsmiddel.

**51**

La desinfeksjonsmiddelet virke så lenge det er angitt i bruksanvisningen fra produsenten av desinfeksjonsmiddelet.

**52**

Fjern alt desinfeksjonsmiddel med en ny klut og vann.

Trinn 53–54 kun for luftmassasje

**53**

Trykk på luftmassasjeknappen to ganger. Kjør på høyeste intensitet i 30 sekunder.

**54**

Trykk én gang for å slå av.

**55**


La lufttørke.

# Parker

## Desinfiser med sprayflaske


### Fjern synlige rester

**1**

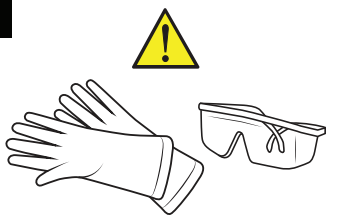


Ta på hansker og vernebriller.

**2**

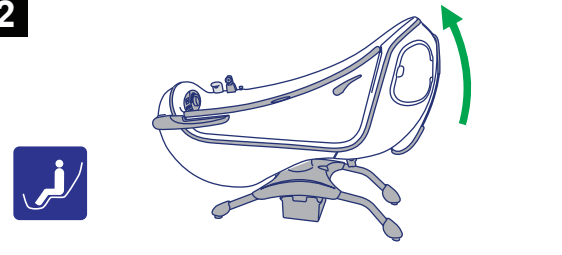


Badekaret skal være i oppreist stilling med alle funksjonene slått av.

**3**

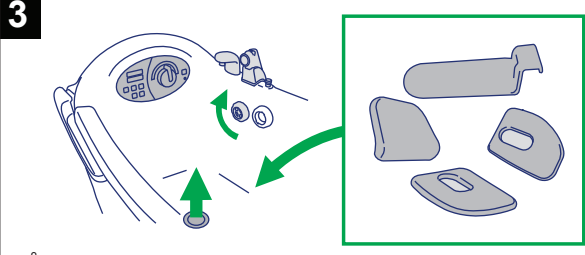

Åpne avløpet. Legg alt tilbehøret i bunnen.


**4**

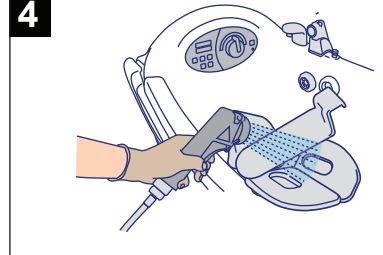

Dusj med vann for å fjerne synlige rester.


### Rengjør

**5**




Spray desinfeksjonsmiddel i avløpet. Skrubb sluket med en børste.

**6**

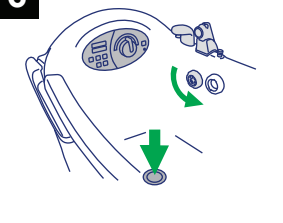


Lukk avløpet.

**7**

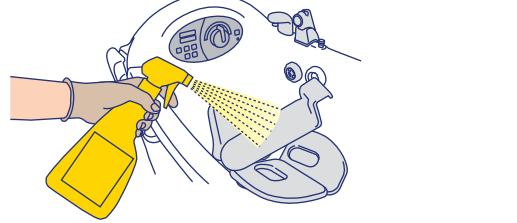


Spray desinfeksjonsmiddel på alle innvendige overflater og på alle sider av tilbehøret.

**8**




Skrubb innvendige overflater og tilbehøret grundig.

**9**

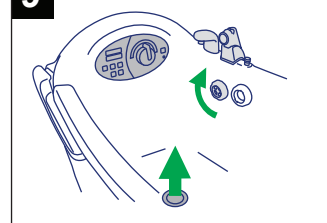


Åpne avløpet.

**10**

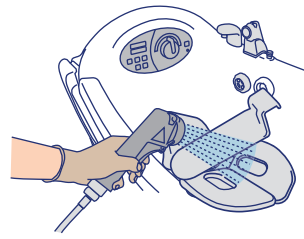


Skyll innvendige overflater og tilbehøret med vann.

**11**

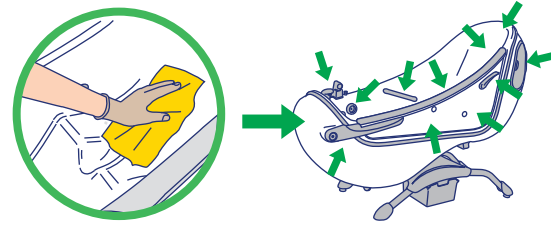

Tørk av alle utvendige overflater med desinfeksjonsmiddel.


**12**

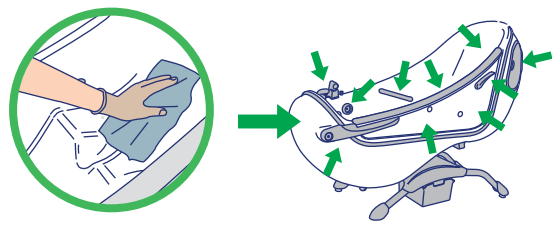

Fjern alt desinfeksjonsmiddel med en ny klut og vann.


### Desinfisering

**13**




Spray desinfeksjonsmiddel i avløpet.

**14**

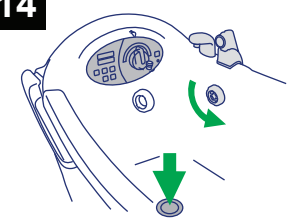


Lukk avløpet.

**15**




Spray desinfeksjonsmiddel på alle innvendige overflater og på alle sider av tilbehøret.

**16**

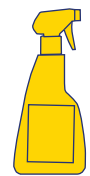


La desinfeksjonsmiddelet virke så lenge det er angitt i bruksanvisningen fra produsenten av desinfeksjonsmiddelet.

**17**

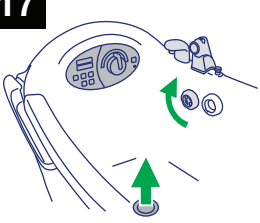


Åpne avløpet.

**18**

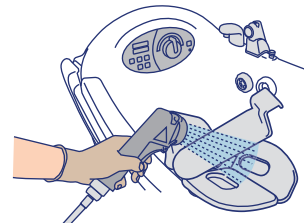


Skyll innvendige overflater og tilbehøret med vann.

**19**

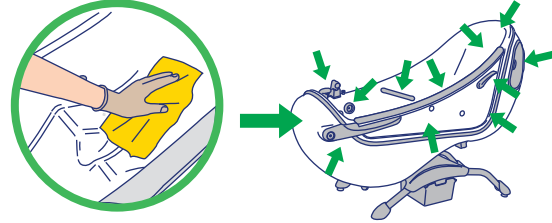


Tørk av alle utvendige overflater med desinfeksjonsmiddel.

**20**

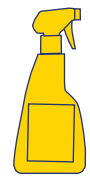


La desinfeksjonsmiddelet virke så lenge det er angitt i bruksanvisningen fra produsenten av desinfeksjonsmiddelet.

**21**

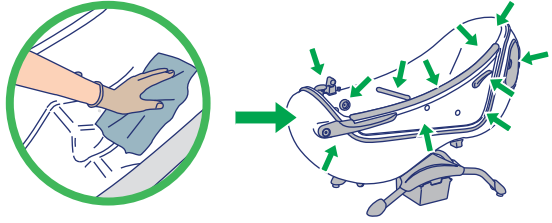

Fjern alt desinfeksjonsmiddel med en ny klut og vann.

**22**

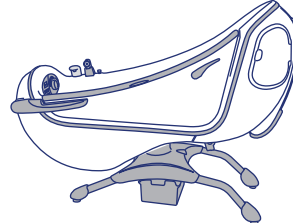

La lufttørke.