
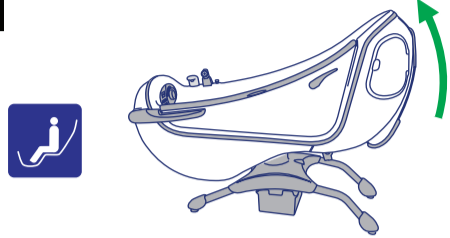
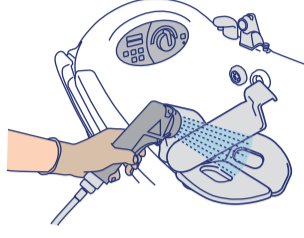
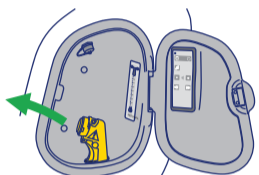

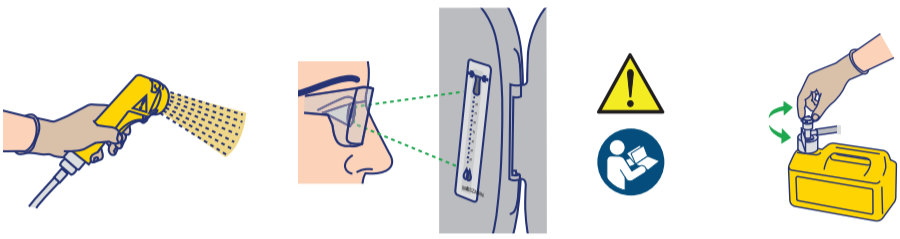



Dezynfekcja za pomocą zintegrowanego spryskiwacza

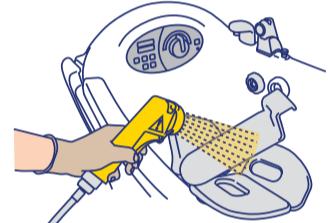
Usunąć widoczne zanieczyszczenia

<p>1</p>  <p>Założyć rękawice i okulary ochronne.</p>	<p>2</p>  <p>Wanna powinna być ustawiona w pozycji pionowej z wyłączonymi wszystkimi funkcjami.</p>	<p>3</p>  <p>Otworzyć odpływ. Umieścić wszystkie akcesoria na dnie.</p>	<p>4</p>  <p>Spryskać wodą, aby usunąć widoczny osad.</p>
---	---	---	---


Ustalić proporcję mieszania środka dezynfekującego

<p>5</p>  <p>Podnieść dźwignię spryskiwacza dezynfekującego.</p>	<p>6</p> <p>5 sekund</p>  <p>Aktywować przycisk dezynfekcji.</p>	<p>7</p>  <p>Rozpylać do wanny tak długo, aż przepływomierz pokaże prawidłową wartość mieszania zgodnie z instrukcją obsługi. W razie potrzeby wyregulować pokrętko na wężu ssącym.</p>	<p>8</p>  <p>Temperatura mieszania 20°C (68°F).</p>
---	---	---	--

Oczyścić

<p>9</p>  <p>Spryskać odpływ środkiem dezynfekcyjnym. Wyszorować odpływ przy pomocy szczotki.</p>	<p>10</p>  <p>Zamknąć odpływ.</p>	<p>11</p>  <p>Rozpylić środek dezynfekujący na wszystkie powierzchnie wewnętrzne oraz na wszystkie strony akcesoriów.</p>	<p>12</p>  <p>Dokładnie wyszorować powierzchnie wewnętrzne i akcesoria.</p>	<p>W przypadku modelu Parker bez Air spa przejdź do kroku 24.</p>
---	---	--	---	---

Kroki 13-23 tylko dla Air spa

<p>13</p>  <p>Obniżyć wannę.</p>	<p>14</p>  <p>Umieścić dźwignię spryskiwacza dezynfekującego we wlocie. Obrócić w lewo lub prawo, aby dokładnie zabezpieczyć.</p>	<p>15</p>  <p>Nacisnąć i przytrzymać przełącznik. Środek dezynfekcyjny musi wypływać ze wszystkich dysz przez co najmniej 30 sekund.</p>	<p>16</p>  <p>Zwolnić przełącznik oraz wyjąć końcówkę natryskującą.</p>	<p>17</p>  <p>Odłożyć rączkę rozpylacza.</p>	
<p>18</p> <p>5 sekund</p>  <p>Dezaktywować przycisk dezynfekcji.</p>	<p>19</p>  <p>Umieścić słuchawkę prysznicową we wlocie. Obrócić w lewo lub prawo, aby dokładnie zabezpieczyć.</p>	<p>20</p>  <p>Aktywować przycisk prysznica.</p>	<p>21</p>  <p>Nacisnąć i przytrzymać przełącznik. Czysta woda musi wypływać ze wszystkich dysz przez co najmniej 30 sekund.</p>	<p>22</p>  <p>Wyjąć słuchawkę prysznicową.</p>	<p>23</p>  <p>Podnieść wannę do pozycji wyprostowanej.</p>

Dalsze kroki na następnej stronie

24

Otworzyć odpływ.

25

Temperatura wody 25°C (77°F).

26

Przepłukać powierzchnie wewnętrzne oraz akcesoria przy pomocy wody.

27

Aktywować przycisk prysznica.

28

Nasączyć ścierkę środkiem dezynfekcyjnym. Przetrzeć wszystkie powierzchnie zewnętrzne.

Dezynfekcja

29

Usunąć cały środek dezynfekujący przy pomocy nowej szmatki oraz wody.

30

5 sekund

Aktywować przycisk dezynfekcji.

31

Spryskać odpływ środkiem dezynfekcyjnym.

32

Zamknąć odpływ.

Kroki 35-46 tylko dla Air spa

33

Rozpylić środek dezynfekujący na wszystkie powierzchnie wewnętrzne oraz na wszystkie strony akcesoriów.

34

Zapewnić właściwy czas na działanie środka dezynfekcyjnego zgodnie z instrukcją obsługi otrzymaną od producenta.

W przypadku modelu Parker bez Air spa przejdź do kroku 47.

35

Obniżyć wannę.

36

Umieścić dźwignię spryskiwacza dezynfekującego we wlocie. Obrócić w lewo lub prawo, aby dokładnie zabezpieczyć.

37

Nacisnąć i przytrzymać przełącznik. Środek dezynfekcyjny musi wypływać ze wszystkich dysz przez co najmniej 30 sekund.

38

Zwolnić przełącznik oraz wyjąć końcówkę natryskującą.

39

5 sekund

Dezaktywować przycisk dezynfekcji.

40

Odłożyć rączkę rozpylacza.

41

Zapewnić właściwy czas na działanie środka dezynfekcyjnego zgodnie z instrukcją obsługi otrzymaną od producenta.

42

Umieścić słuchawkę prysznicową we wlocie. Obrócić w lewo lub prawo, aby dokładnie zabezpieczyć.

43

Aktywować przycisk prysznica.

44

Nacisnąć i przytrzymać przełącznik. Czysta woda musi wypływać ze wszystkich dysz przez co najmniej 30 sekund.

45

Wyjąć słuchawkę prysznicową.

46

Podnieść wannę do pozycji wyprostowanej.

Dalsze kroki na następnej stronie

47

Otworzyć odpływ.

48

Aktywować przycisk prysznica.

49

Przepłukać powierzchnie wewnętrzne oraz akcesoria przy pomocy wody.

50

Przetrzeć środkiem dezynfekcyjnym wszystkie powierzchnie zewnętrzne.

51

Zapewnić właściwy czas na działanie środka dezynfekcyjnego zgodnie z instrukcją obsługi otrzymaną od producenta.

52

Usunąć cały środek dezynfekujący przy pomocy nowej szmatki oraz wody.

Kroki 53-54 tylko dla Air spa

53

Nacisnąć dwa razy przycisk Air spa. Uruchomić z najwyższą intensywnością przez 30 sekund.

54


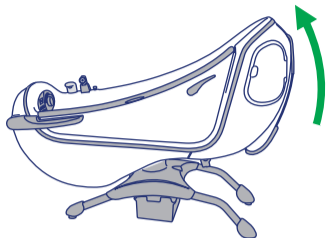
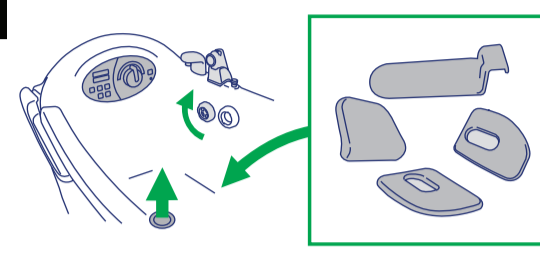
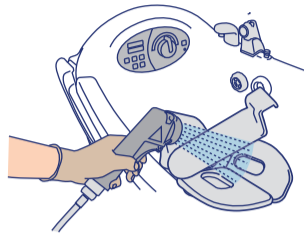
Nacisnąć raz, aby wyłączyć.

55


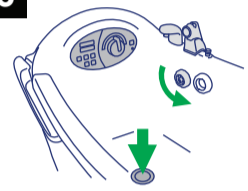

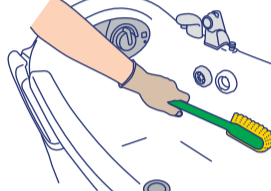
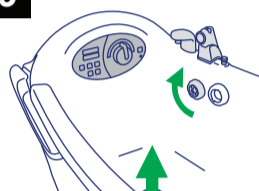
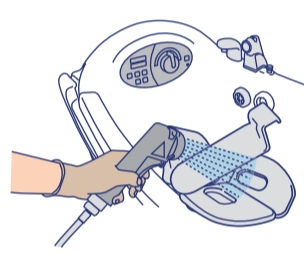
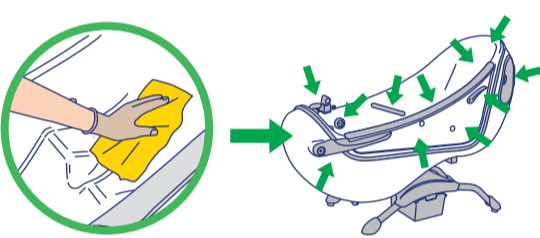
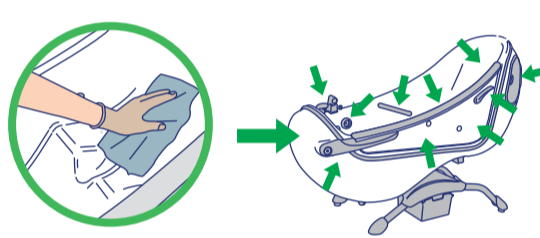
Pozostawić do wyschnięcia.

Dezynfekcja za pomocą butelki


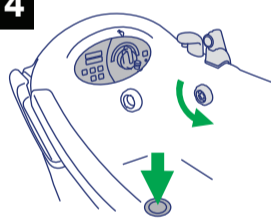


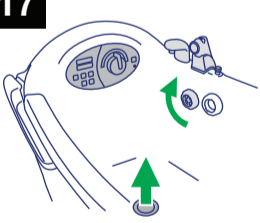
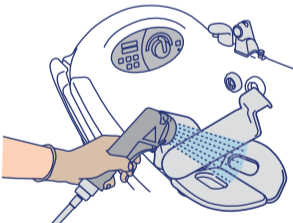
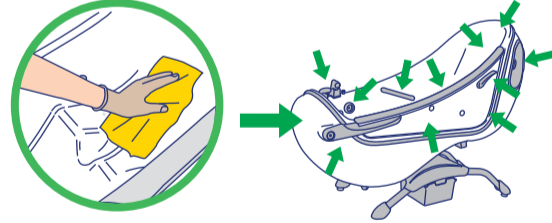

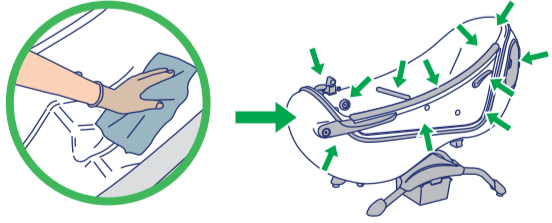
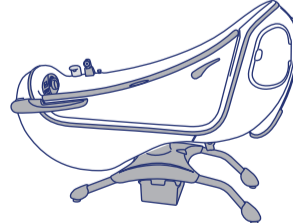
Usunąć widoczne zanieczyszczenia

<p>1</p>  <p>Założyć rękawice i okulary ochronne.</p>	<p>2</p>  <p>Wanna powinna być ustawiona w pozycji pionowej z wyłączonymi wszystkimi funkcjami.</p>	<p>3</p>  <p>Otworzyć odpływ. Umieścić wszystkie akcesoria na dnie.</p>	<p>4</p>  <p>Spryskać wodą, aby usunąć widoczny osad.</p>
---	---	---	---

Oczyścić

<p>5</p>  <p>Spryskać odpływ środkiem dezynfekcyjnym. Wyszorować odpływ przy pomocy szczotki.</p>	<p>6</p>  <p>Zamknąć odpływ.</p>	<p>7</p>  <p>Rozpylić środek dezynfekujący na wszystkie powierzchnie wewnętrzne oraz na wszystkie strony akcesoriów.</p>	<p>8</p>  <p>Dokładnie wyszorować powierzchnie wewnętrzne i akcesoria.</p>	<p>9</p>  <p>Otworzyć odpływ.</p>
<p>10</p>  <p>Przepłukać powierzchnie wewnętrzne oraz akcesoria przy pomocy wody.</p>	<p>11</p>  <p>Przetrzeć środkiem dezynfekcyjnym wszystkie powierzchnie zewnętrzne.</p>	<p>12</p>  <p>Usunąć cały środek dezynfekujący przy pomocy nowej szmatki oraz wody.</p>		

Dezynfekcja

<p>13</p>  <p>Spryskać odpływ środkiem dezynfekcyjnym.</p>	<p>14</p>  <p>Zamknąć odpływ.</p>	<p>15</p>  <p>Rozpylić środek dezynfekujący na wszystkie powierzchnie wewnętrzne oraz na wszystkie strony akcesoriów.</p>	<p>16</p>  <p>Zapewnić właściwy czas na działanie środka dezynfekcyjnego zgodnie z instrukcją obsługi otrzymaną od producenta.</p>
<p>17</p>  <p>Otworzyć odpływ.</p>	<p>18</p>  <p>Przepłukać powierzchnie wewnętrzne oraz akcesoria przy pomocy wody.</p>	<p>19</p>  <p>Przetrzeć środkiem dezynfekcyjnym wszystkie powierzchnie zewnętrzne.</p>	<p>20</p>  <p>Zapewnić właściwy czas na działanie środka dezynfekcyjnego zgodnie z instrukcją obsługi otrzymaną od producenta.</p>
<p>21</p>  <p>Usunąć cały środek dezynfekujący przy pomocy nowej szmatki oraz wody.</p>	<p>22</p>  <p>Pozostawić do wyschnięcia.</p>		