


Autonapouštění

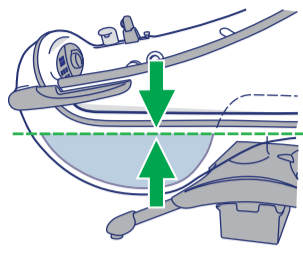


Stiskněte tlačítko autonapouštění. Napouštění se automaticky zastaví po dosažení správné hladiny vody.

Stiskněte tlačítko autonapouštění, aby napouštění pokračovalo dalších 60 sekund.

Napouštění můžete kdykoliv zastavit stisknutím tlačítka autonapouštění.

Rukojeť sprchy

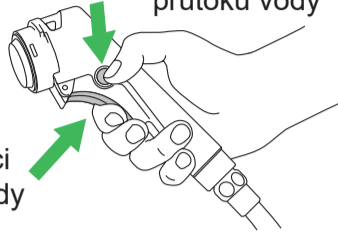


Stiskněte pro uzamčení průtoku vody

Stiskněte pro regulaci průtoku vody

Stiskněte pro aktivaci funkce sprchy.

Odemkněte stisknutím spouště.


Displej pro teplotu

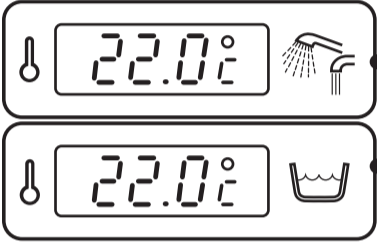

Zobrazuje teplotu napouštěné vody, sprchy nebo směsi dezinfekčního prostředku.

Zobrazuje aktuální teplotu vody ve vaně.

Ochrana proti opaření




Displej pro teplotu bliká a zazní pípnutí. Přívod vody se po 10 sekundách automaticky uzavře.

45 °C (113 °F)


Pomozte pacientovi/klientovi vystoupit z vany a tu už dále nepoužívejte.

Nouzové zastavení

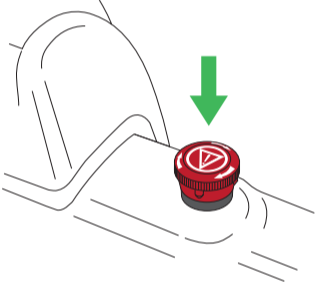


Stiskněte tlačítko pro zastavení všech funkcí. Pro uvolnění otočte ve směru chodu hodinových ručiček.

Zablokování funkcí



Stiskněte pro uzamčení všech funkcí kromě ochrany proti opaření a nouzového zastavení. Stiskněte znovu pro odemčení.


Zámek dvířek

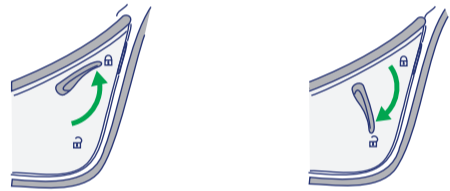


Uzamkněte dvířka vany.

Odemkněte dvířka vany.


System perličky (volitelná funkce)



Celá vana



Pouze opora pro nohy




Stiskněte pro zapnutí perličky a volbu intenzity.

Použijte max. 15 minut.

Stiskněte pro vypnutí.

System Sound & Vision (volitelná funkce)

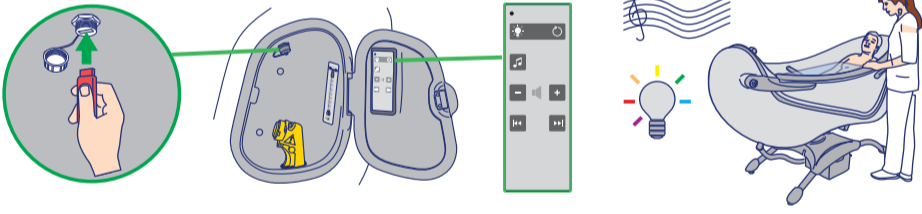

Odšroubujte krytku a zapojte paměťovou kartu USB.

Použijte ruční ovladač k ovládání zvuku a světla.

Dezinfekční jednotka (volitelná funkce)




Láhev z dezinfekčním prostředkem je umístěna mezi nohami vany.



Rukojeť dezinfekční sprchy je umístěna za krytem.



Určete směsný poměr dezinfekčního prostředku: dezinfekční prostředek nastříkejte do vany a zároveň kontrolujte vnitřní kryt průtokoměru, knoflík na sací hadici nastavte podle potřeby.




Bliká, když je láhev s dezinfekčním prostředkem prázdná.