

# Parker

## Autofyld

Tryk på knappen Autofyld igen, og forsæt med at fylde op i yderligere 60 sekunder.

Afbryd fyldningen når som helst ved at trykke på knappen Autofyld.

Tryk på knappen Autofyld. Fyldningen afbrydes automatisk, når det korrekte vandniveau er nået.

## Håndbruser til brusebadning

Tryk for at låse vandtilførslen

Tryk for at regulere vandtilførslen

Tryk for at aktivere brusefunktionen.

Lås op ved at trykke på udløseren.

## Temperaturdisplay

Viser temperaturen for det aktuelle fyldnings- eller brusevand eller den aktuelle desinfektionsmiddelblanding.

Viser den aktuelle vandtemperatur i badekarret.

## Skoldningsbeskyttelse

45 °C (113 °F)

Temperaturdisplayet blinker, og der afgives en biplyd. Der lukkes automatisk af for vandet efter 10 sekunder.

Hjælp plejemandtageren sikkert ud, og stop med at bruge badekarret

## Nødstop

Tryk på knappen for at afbryde alle funktioner. Drej den med uret for at udløse den.

## Funktionslås

Tryk for at låse alle funktioner på nær skoldningsbeskyttelse og nødstop. Tryk igen for at låse op.

## Dørlås

Lås badekarsslåge. Lås badekarsslåge op.

## Luftspasystem (ekstraudstyr)

Hele badekarret

Kun fodbund

Tryk for at tænde for luftspafunktionen og vælge intensiteten.

Må højst anvendes i 15 minutter.

Tryk for at slukke.

## Sound & Vision-system (ekstraudstyr)

Skrue hættten af, og sæt USB-nøglen i.

Brug håndbetjeningen til at regulere lyd og lys.

## Desinfektionsenhed (ekstraudstyr)

Desinfektionsbeholderen er placeret mellem badekarrets ben.

Desinfektionshåndtaget er placeret bag beskyttelseskappen.

Fastslå blandingsforholdet for desinfektionsmidlet: Spray desinfektionsmiddel i badekarret, mens flowmåleren kontrolleres inden i beskyttelseskappen. Sugelangens knap kan justeres efter behov.

Blinker, når desinfektionsbeholderen er tom.