

Einfüllautomatik

Drücken Sie die Taste für die Einfüllautomatik erneut, um den Füllvorgang 60 Sekunden lang fortzusetzen.

Sie können den Füllvorgang durch Drücken der Taste für die Einfüllautomatik jederzeit unterbrechen.

Drücken Sie die Taste für die Einfüllautomatik. Der Füllvorgang stoppt bei korrektem Füllstand automatisch.

Duschgriff

Zum Einstellen des Wasserstrahls

Zum Aktivieren der Duschfunktion drücken.

Zum Feststellen des Wasserstrahls drücken

Entsperren durch Drücken des Auslösers.

Temperatur-Display

Zeigt die Temperatur des aktiven Füll- oder Duschvorgangs bzw. der Desinfektionsmittelmischung an.

Zeigt die aktuelle Badewannenwassertemperatur an.

Verbrühschutz

Die Temperaturanzeige blinkt und es ertönt ein Signalton. Die Wasserzufuhr wird nach 10 Sekunden automatisch beendet.

45 °C (113 °F)

Holen Sie den Patienten sicher aus der Wanne und brechen Sie die Anwendung ab.

Not-Aus-Schalter

Drücken Sie den Schalter, um alle Funktionen abzubrechen. Zum Lösen im Uhrzeigersinn drehen.

Funktionssperre

Drücken, um alle Funktionen außer Verbrühschutz und Not-Aus zu sperren. Zum Entsperren erneut drücken.

Türsperre

Badewannentür verriegeln.

Badewannentür entriegeln.

Luftperlbad (Air Spa) (Sonderausstattung)

Ganze Badewanne

Nur Fußraum

Zum Einschalten des Luftperlbads (Air Spa) und zum Einstellen der Intensität drücken.

Maximal 15 Minuten verwenden.

Zum Ausschalten drücken.

Sound & Vision-System (Sonderausstattung)

Kappe abschrauben und USB-Stick einstecken.

Verwenden Sie zum Einstellen von Licht und Ton die Handbedienung.

Desinfektionsgerät (Sonderausstattung)

Die Desinfektionsmittelflasche befindet sich zwischen den Badewannenbeinen.

Der Griff der Desinfektionsdusche befindet sich hinter der Abdeckung.

Mischverhältnis für das Desinfektionsmittel bestimmen: Desinfektionsmittel in die Badewanne sprühen und dabei den Durchflussmesser auf der Innenseite der Abdeckung überprüfen, ggf. Knopf am Saugschlauch einstellen.

Blinkt bei leerer Desinfektionsmittelflasche.