


Llenado automático

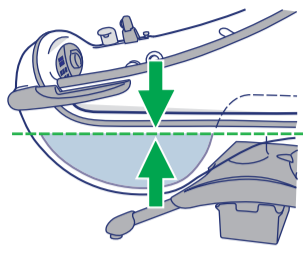


Pulse el botón de llenado automático. El llenado se detiene automáticamente al alcanzar el nivel de agua adecuado.

Pulse el botón de llenado automático y el llenado se prolongará durante otros 60 segundos.

Detenga el llenado en cualquier momento pulsando el botón de llenado automático.

Cabezal de ducha

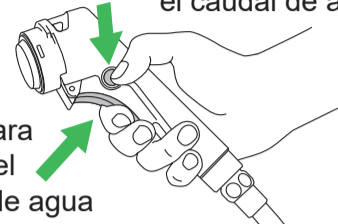


Pulse este botón para activar la función de ducha.

Pulse para regular el caudal de agua

Pulse para bloquear el caudal de agua

Pulse el gatillo para desbloquear.


Indicador de temperatura

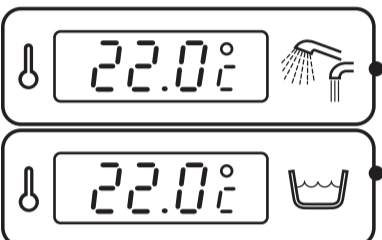

Indica la temperatura del agua de llenado, de la ducha activa o de la mezcla desinfectante.

Muestra la temperatura actual del agua de la bañera.


Protección contra quemaduras

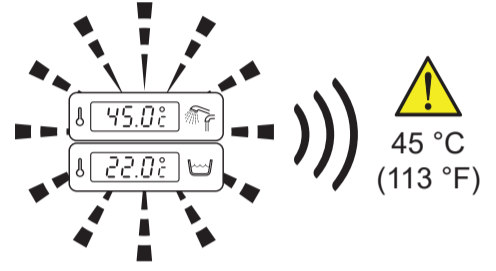

La temperatura parpadea y emite un pitido. El agua se detiene automáticamente al cabo de 10 segundos.


Saque al paciente con cuidado y deje de usar la bañera.

Parada de emergencia

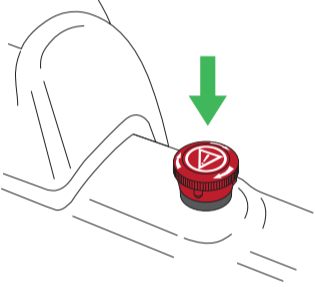


Pulse el botón para detener todas las funciones. Gírelo en el sentido de las agujas del reloj para liberarlo.

Bloqueo de funciones



Pulse este botón para bloquear todas las funciones excepto la protección contra quemaduras y la parada de emergencia. Púlselo de nuevo para desbloquearlas.

Bloqueo de la mampara

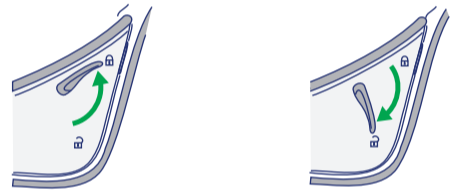

Bloqueo de la mampara de la bañera.

Desbloqueo de la mampara de la bañera.

Sistema Air spa (función opcional)



Bañera entera


Solo el espacio para las piernas

Pulse para activar el sistema Air spa y para seleccionar su intensidad.

Tiempo de uso máximo: 15 min.

Pulse para apagar.


Sistema Sound & Vision (función opcional)

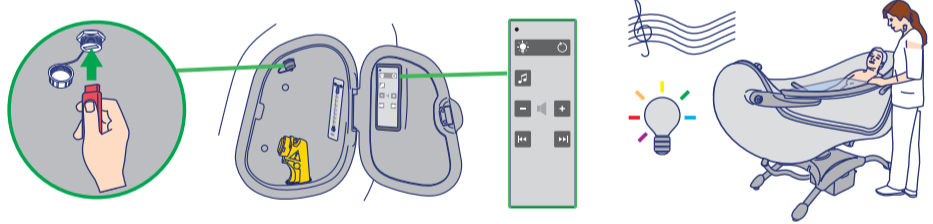

Desenrosque la tapa e inserte el dispositivo USB.

Utilice el mando de control para regular el sonido y la luz.

Unidad de desinfección (función opcional)

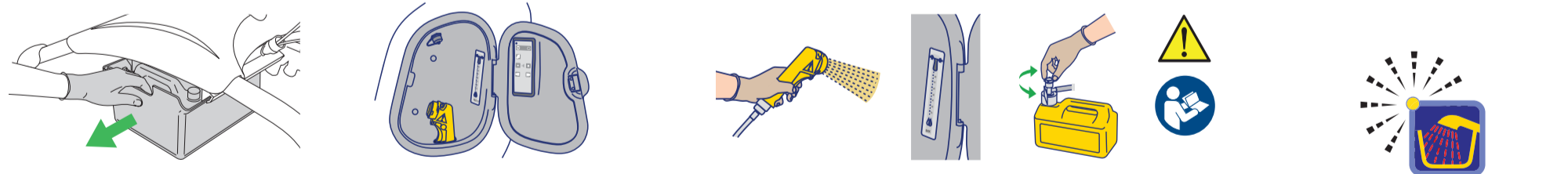

La botella de desinfectante se encuentra entre las patas de la bañera.

El cabezal de desinfección se encuentra detrás de la tapa.

Ajuste la proporción de la mezcla: rocíe la bañera con el desinfectante comprobando el caudalímetro situado dentro de la tapa, y ajuste la boquilla de la manguera de succión si fuera necesario.

Parpadea cuando la botella de desinfectante está vacía.