


Automatisk fylling

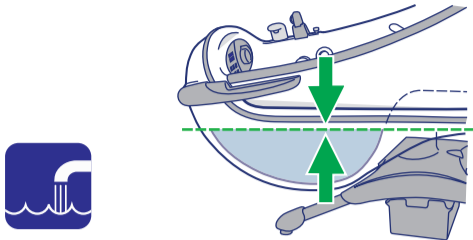


Trykk på knappen for automatisk fylling. Fyllingen stopper automatisk ved riktig vannivå.

Trykk på knappen for automatisk fylling på nytt for å fortsette å fylle i 60 sekunder.

Fyllingen kan stoppes når som helst ved å trykke på knappen for automatisk fylling.

Dusjhåndtak

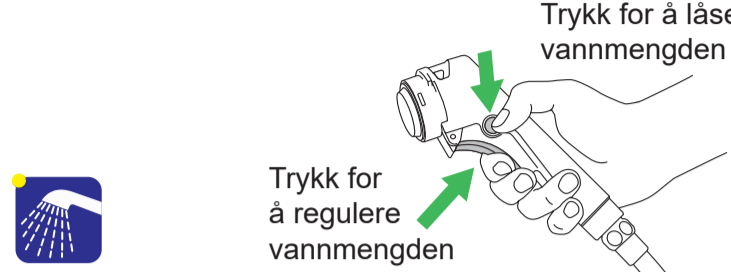


Trykk for å aktivere dusjfunksjonen.

Trykk for å regulere vannmengden

Trykk for å låse vannmengden

Lås opp ved å trykke på utløseren.


Temperaturdisplay

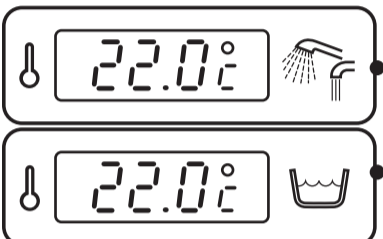

Viser temperaturen på den aktive fyllingen, dusjen eller desinfeksjonsmiddelblandingen.

Viser gjeldende vanntemperatur i badekaret.


Skåldingsbeskyttelse

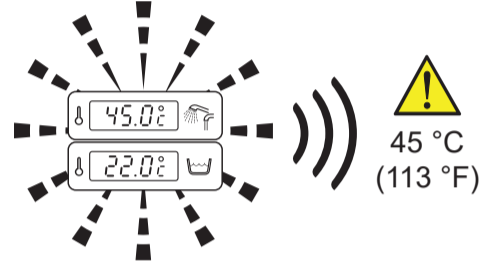

Temperaturdisplayet blinker, og et pipesignal høres. Vannet slås automatisk av etter 10 sekunder.


Få pasienten trygt ut, og avslutt bruken av badekaret.

Nødstopp

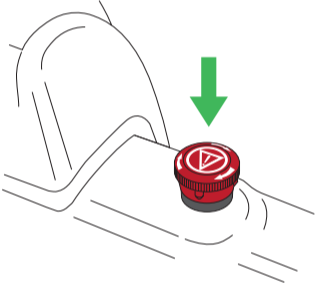


Trykk på knappen for å stoppe alle funksjoner. Drei med klokken for å frigjøre.

Funksjonssperre



Trykk for å låse alle funksjoner unntatt skåldingsbeskyttelse og nødstopp. Trykk på nytt for å låse opp.

Dørlås

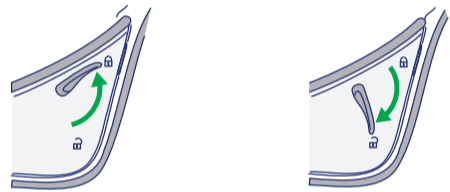

Lås badekardøren.

Lås opp badekardøren.

Luftmassasjesystem (tilleggsutstyr)



Hele badekaret


Bare fotbrønnen

Trykk for å slå på luftmassasje og velge intensitet.

Brukes i maksimalt 15 minutter.

Trykk for å slå av.


Sound & Vision-system (tilleggsutstyr)

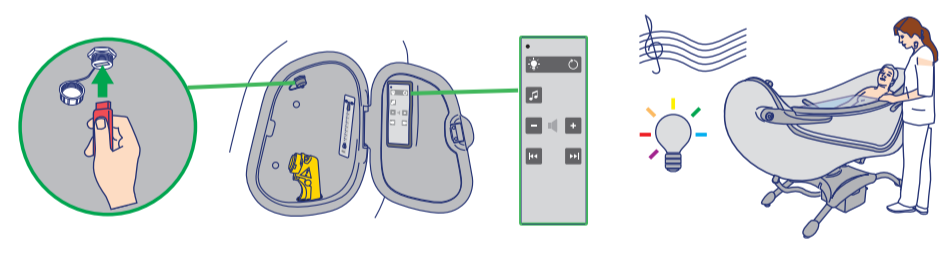

Skru av hetten og sett inn USB-pinnen.

Bruk håndkontrollen til å regulere lyd og lys.

Desinfiseringsenhet (tilleggsutstyr)

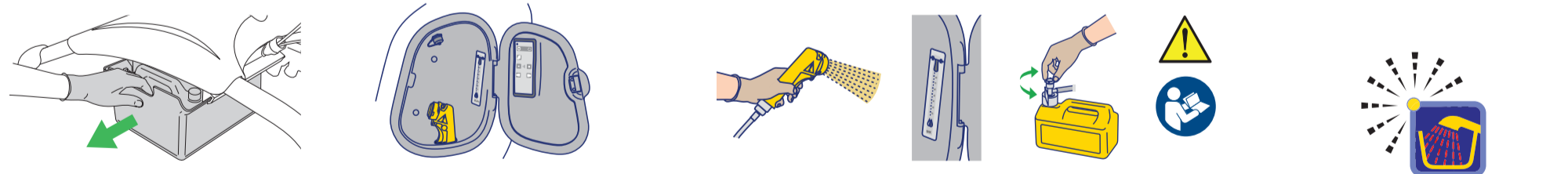

Flasken med desinfeksjonsmiddel er plassert mellom bena på badekaret.

Desinfiseringshåndtaket er plassert bak dekselet.

Fastsett blandingsforhold for desinfeksjonsmiddel: Spray desinfeksjonsmiddel i badekaret samtidig som du sjekker flytmåleren bak dekselet. Bruk om nødvendig justeringsknappen på sugeslangen.

Blinker når flasken med desinfeksjonsmiddel er tom.