

Automatyczne napełnianie

Wcisnąć przycisk automatycznego napełniania. Napełnianie zatrzymuje się automatycznie przy właściwym poziomie wody.

Nacisnąć ponownie przycisk automatycznego napełniania, aby kontynuować napełnianie przez 60 sekund.

Aby wyłączyć napełnianie wanny, wcisnąć przycisk automatycznego napełniania.

Słuchawka prysznicowa

Wcisnąć, aby aktywować funkcję prysznica.

Wcisnąć, aby regulować przepływ wody

Wcisnąć, aby zablokować przepływ wody

Odblokować, naciskając spust.

Wyświetlacz temperatury

Pokazuje temperaturę aktywnego napełniania, prysznica lub środka dezynfekującego.

Pokazuje aktualną temperaturę wody w wannie.

Ochrona przed poparzeniem

Wskaźniki temperatury migają i słychać sygnał dźwiękowy. Woda zamyka się automatycznie po 10 sekundach.

Bezpiecznie wyciągnąć pacjenta i przestać korzystać z kąpieli.

45 °C (113 °F)

Zatrzymanie awaryjne

Nacisnąć przycisk, aby wyłączyć wszystkie funkcje. Obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwolnić.

Blokada funkcji

Wcisnąć, aby zablokować wszystkie funkcje oprócz ochrony przed oparzeniem i zatrzymania awaryjnego. Nacisnąć znowu, aby odblokować.

Blokada drzwi

Zamknij drzwi wanny.

Otwórz drzwi wanny.

System air spa (opcjonalnie)

Cała wanna

Tylko niecka na stopy

Nacisnąć, aby włączyć air spa i wybrać intensywność.

Używać maksymalnie przez 15 minut.

Nacisnąć, aby wyłączyć.

System Sound & Vision (opcjonalnie)

Odkręcić nakrętkę i podłączyć pamięć USB.

Używać pilota, aby regulować dźwięk i światło.

Jednostka dezynfekcji (opcjonalnie)

Butelka środka dezynfekcyjnego znajduje się między nogami wanny.

Uchwyt do dezynfekcji znajduje się za pokrywą.

Określić proporcje mieszanki do dezynfekcji: rozpylić środek dezynfekujący do wanny, sprawdzając przepływomierz wewnątrz pokrywy, w razie potrzeby wyregulować pokrętkę na wężu ssącym.

Miga, gdy butelka środka dezynfekcyjnego jest pusta.