System 2000



Einfüllautomatik

EIN/AUS-Taste für die Einfüllautomatik






Der Füllvorgang stoppt bei vorgegebenen Wasserfüllstand automatisch.

Durch Drücken der Taste für die Einfüllautomatik kann der Füllvorgang jederzeit unterbrochen werden.

Duschtaste und Duschgriff

EIN-/AUS-Taste für die Dusche



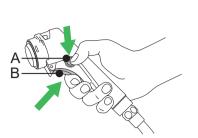


Die Sperrtaste (A) stellt den Wasserstrahl fest.

Der Auslöser (B) reguliert und entsperrt den Wasserstrahl.

Anzeige P300



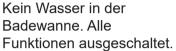



Wassertemperatur für: aktiven Füllvorgang, Dusche oder gefüllte Badewanne.

P300 ist mit drei Einfüllautomatikhöhen ausgestattet. Voreingestellt ist die normale Höhe.







Einfüllautomatik niedriger Füllstand



Einfüllautomatik hoher Füllstand

Zur Änderung der Einfüllhöhe:

(-) oder (+) innerhalb von 8 Sekunden nach Beginn der Einfüllautomatik drücken.

Anzeige P220



Wassertemperatur für: aktiven Füllvorgang, Dusche oder gefüllte Badewanne.

Verbrühschutz



Wenn der Verbrühschutz aktiviert ist, transferieren Sie den Patienten sicher aus dem Bad.

Wenn eine gefährliche Temperatur von 45 °C (113 °F) erreicht wird, schaltet der elektronische Verbrühschutz in weniger als 10 s das Wasser ab.

P300




Auf der Anzeige erscheinen vier Striche und ein Signalton ertönt. In dieser Zeit kalibriert sich die Mischbatterie automatisch neu.





Beide LEDs leuchten und ein Signalton ertönt.

Hydromassage oder Hydrosound (Sonderausstattung)

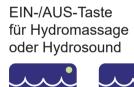

P300

















Korrektur der Intensität



Hydrosound



Der USB-Anschluss befindet sich unter der Bedienfeldabdeckung.




Verwenden Sie zum Einstellen von Licht und Ton die Handbedienung.


Desinfektionsgerät (Sonderausstattung)



Die Ein/Aus-Taste blinkt bei leerer Desinfektionsmittelflasche. (Nur P300)

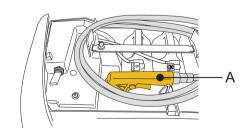

Die Desinfektionseinheit befindet sich unter der Bedienfeldabdeckung. Desinfektionssprühgriff (A)

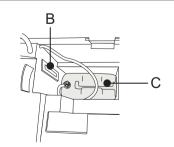

Durchflussmesser (B) Desinfektionsmittelflasche (C) (unter Shampoo/Badeöl)









Mischverhältnis für das Desinfektionsmittel bestimmen:

Desinfektionsmittel in die Badewanne sprühen. Überprüfen, ob das Mischverhältnis auf dem Durchflussmesser korrekt ist. Ggf. den Drehknopf am Saugschlauch einstellen.