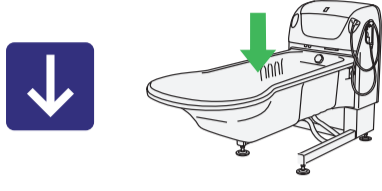
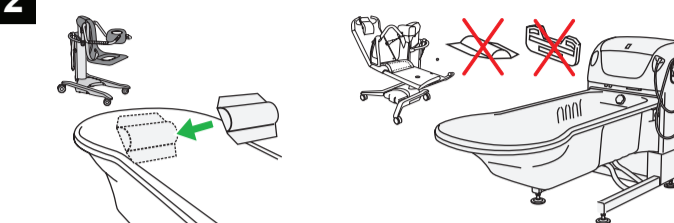

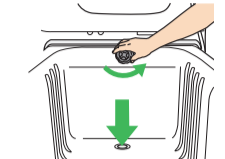




System 2000 Rhapsody, Primo y Harmonie

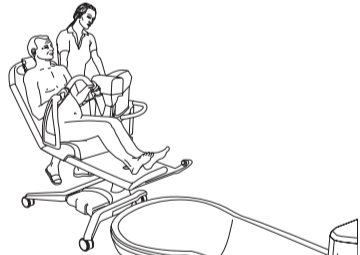
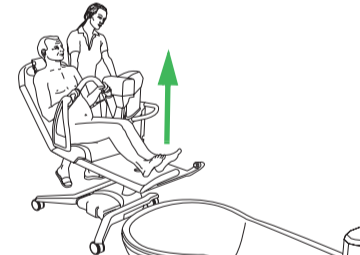
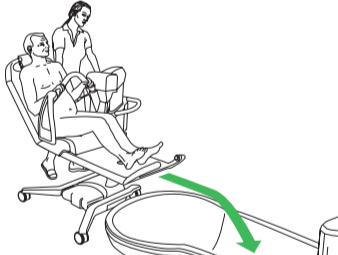
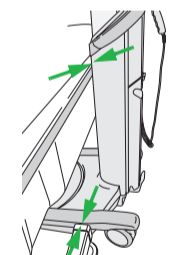
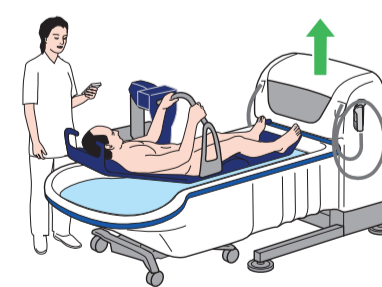

Preparativos

<p>1</p>  <p>Baje la bañera hasta su altura mínima.</p>	<p>2</p>  <p>Baño con una silla de higiene: coloque el cojín para la cabeza. Baño con camilla de baño: no coloque el cojín para la cabeza ni el reposapiés.</p>	<p>3</p>  <p>Riesgo de quemadura</p> <p>Pulse el botón de autollenado. Compruebe la temperatura del agua con la mano. Regule la temperatura, en caso necesario.</p>	<p>4</p>  <p>Cierre el desagüe.</p>
---	--	---	---


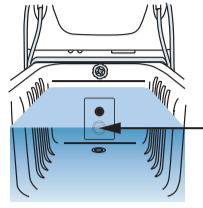
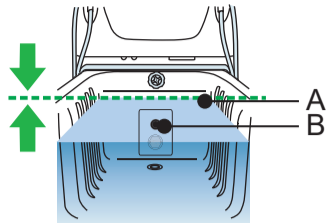
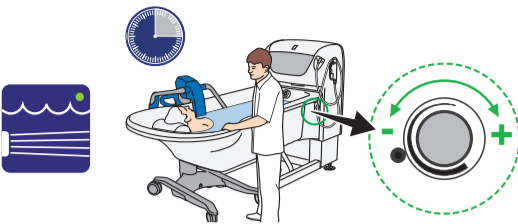
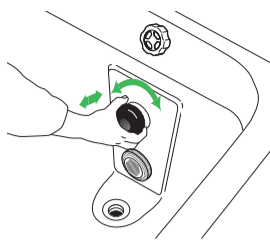

Baño del paciente con una silla grúa para higiene

<p>5</p>  <p>Coloque la silla grúa para higiene en diagonal respecto al lateral de la bañera.</p>	<p>6</p>  <p>Riesgo de aplastamiento</p> <p>Eleve la silla grúa para higiene de forma que quede un espacio entre los genitales del paciente y el borde de la bañera.</p>	<p>7</p>  <p>Riesgo de atrapamiento</p> <p>Mueva la silla grúa para higiene hacia la bañera. Levante las piernas del paciente por encima del borde de la bañera mientras gira la grúa hasta su posición.</p>	<p>8</p>  <p>Deje que el paciente sienta el agua con sus pies. Regule la temperatura, en caso necesario.</p>
<p>9</p>  <p>Centre la silla sobre la bañera hasta que entre en contacto con los pies y el borde de esta.</p>	<p>10</p>  <p>Riesgo de aplastamiento</p> <p>Ajuste la silla grúa para higiene a una altura ergonómica para el cuidador. Suba la bañera. Asegúrese de que haya espacio suficiente entre los genitales del paciente y el fondo de la bañera.</p>	<p>11</p>  <p>Coloque el reposapiés si es necesario. Bañe al paciente.</p>	


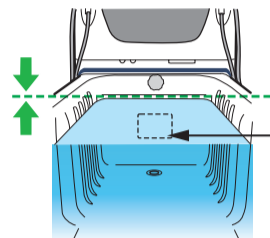


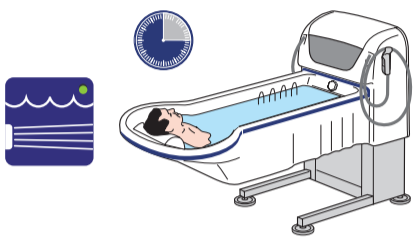
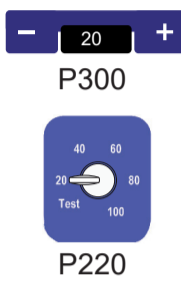

Baño del paciente con una camilla grúa de baño

<p>12</p>  <p>Coloque la camilla grúa de baño en la parte posterior de la bañera, hacia un lateral.</p>	<p>13</p>  <p>Eleve la camilla grúa de baño lo suficiente para que no toque el borde de la bañera.</p>	<p>14</p>  <p>Desplace la camilla grúa de baño con el paciente en diagonal sobre el borde de la bañera.</p>	<p>15</p>  <p>Centre la camilla sobre la bañera hasta que entre en contacto con los pies y el borde de esta.</p>
<p>16</p>  <p>Ajuste la camilla grúa de baño a una altura ergonómica para el cuidador. Eleve la bañera hasta que la camilla toque el fondo de esta.</p>	<p>17</p>  <p>Coloque el reposapiés si es necesario. Bañe al paciente.</p>		

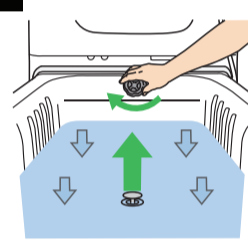
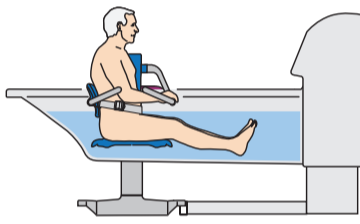
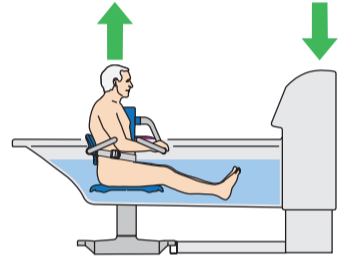
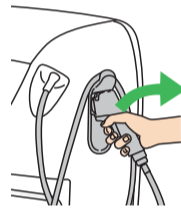




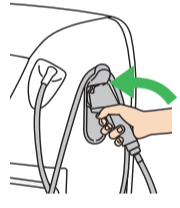
Hydromassage (opcional)

 <p>Riesgo de atrapamiento</p>  <p>Instale la tapa del sistema de aspiración antes de usar el dispositivo.</p>	 <p>Llene con agua hasta cubrir la salida del sistema Hydromassage (A) y el sensor superior (B).</p>	 <p>Pulse el botón del sistema Hydromassage. El tiempo de funcionamiento predeterminado es de 15 minutos. Empiece con una intensidad baja y ajústela si es necesario.</p>	 <p>Ajuste la dirección del chorro de agua.</p>	 <p>Después de la sesión, apague el sistema Hydromassage.</p>
--	---	---	--	--

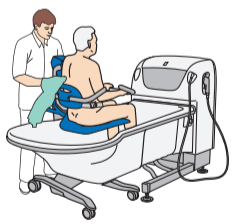
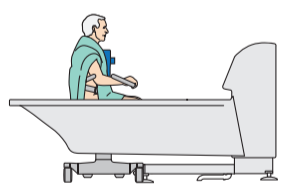
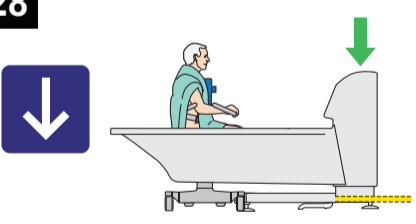
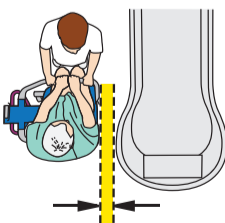

Hydrosound (opcional)

 <p>No use nunca el dispositivo con personas embarazadas.</p>  <p>Llene con agua hasta cubrir la placa del transductor del sistema Hydrosound. Añada acondicionador de agua Arjo Sound.</p>	 <p>Riesgo de quemaduras y daño auditivo.</p>  <p>No toque la placa del transductor y mantenga la cabeza del paciente fuera del agua.</p>	 <p>Pulse el botón del sistema Hydrosound. El tiempo de funcionamiento predeterminado es de 15 minutos.</p>	 <p>Ajuste la intensidad del sistema Hydrosound.</p>	 <p>Después de la sesión, apague el sistema Hydrosound.</p>
---	---	--	---	--

Ducha del paciente

<p>18</p>  <p>Abra el desagüe.</p>	<p>19</p>  <p>Levante el respaldo. Deje que el paciente se agarre al reposamanos.</p>	<p>20</p>  <p>Baje la bañera hasta su altura mínima.</p>	<p>21</p>  <p>Coja el cabezal de ducha. Pulse el botón de la ducha. No dirija el cabezal de ducha hacia el paciente.</p>
<p>22</p>  <p>Riesgo de quemadura</p>  <p>Apriete el gatillo del cabezal de ducha. Compruebe la temperatura del agua con la mano. Regule la temperatura, en caso necesario.</p>	<p>23</p>  <p>Deje que el paciente sienta el agua con la mano antes de dirigir hacia él el chorro de agua. Regule la temperatura, en caso necesario.</p>	<p>24</p>  <p>Duche al paciente.</p>	<p>25</p>  <p>Si el botón de bloqueo está activado, desbloquee el gatillo del cabezal de ducha. Pulse el botón de la ducha. Vuelva a colocar el cabezal de ducha en su lugar.</p>

Fin del baño

<p>26</p>  <p>Seque al paciente.</p>	<p>27</p>  <p>Utilice toallas o un albornoz para evitar que el paciente se enfríe.</p>	<p>28</p>  <p>Baje la bañera hasta su altura mínima.</p>	<p>29</p>  <p>Eleve la silla grúa para higiene de forma que quede un espacio entre los genitales del paciente y el borde de la bañera.</p>
<p>30</p>  <p>Riesgo de aplastamiento</p>  <p>Ayude al paciente a pasar las piernas por encima del borde mientras gira la grúa para retirarla de la bañera.</p>	<p>31</p>  <p>Asegúrese de que haya espacio suficiente entre el lateral de la bañera y la silla grúa para higiene.</p>	<p>32</p>  <p>Baje la silla grúa de higiene. Seque las partes que aún estén mojadas.</p>	<p>33</p>  <p>Riesgo de contaminación Después de cada paciente: Limpie y desinfecte la bañera tal y como se indica en las instrucciones de uso (IDU) o en la guía de referencia rápida (QRG) de limpieza y desinfección.</p>