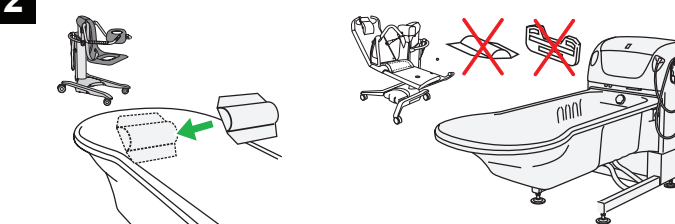
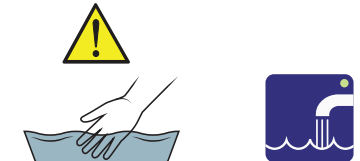
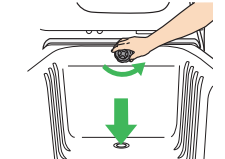
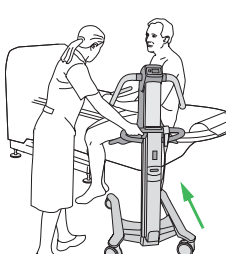

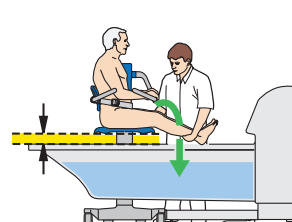

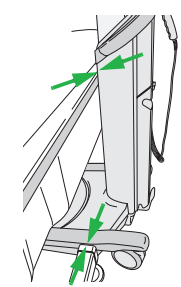

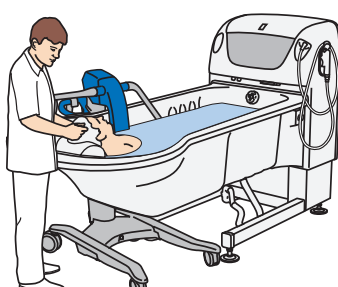


System 2000 Rhapsody, Primo, Harmonie

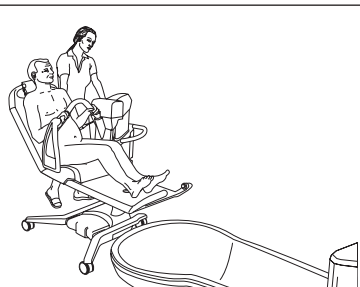
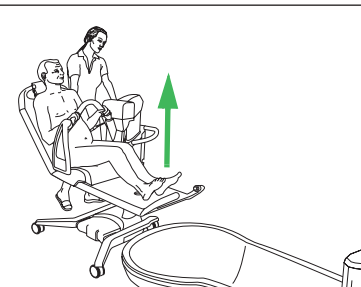
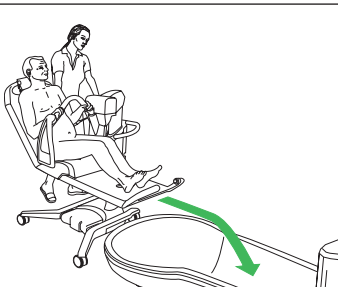
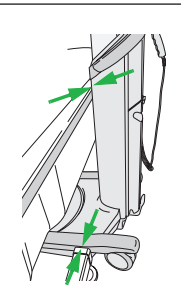
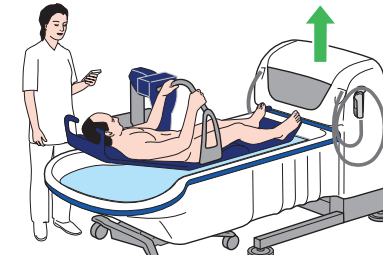

Predisposizioni per l'utilizzo

<p>1</p>  <p>Abbassare completamente la vasca.</p>	<p>2</p>  <p>Fare il bagno con il sollevapazienti igienico a sedia: fissare il cuscino per la testa. Fare il bagno con il sollevapazienti igienico a barella: non fissare il cuscino per la testa o il poggiatesta.</p>	<p>3</p>  <p>Rischio di scottatura</p> <p>Premere il pulsante di riempimento automatico. Controllare la temperatura dell'acqua con la mano nuda. Se necessario, regolare la temperatura.</p>	<p>4</p>  <p>Chiudere lo scarico.</p>
--	--	--	---


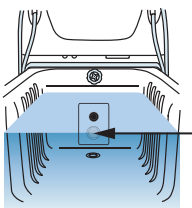
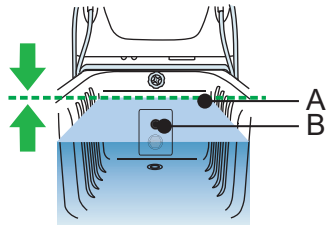
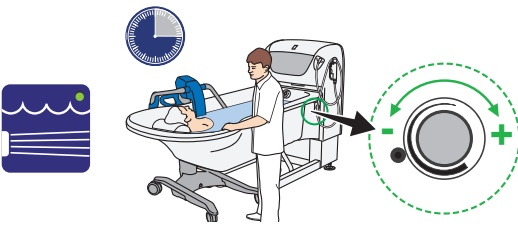
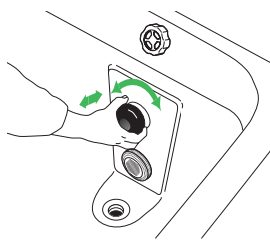

Fare il bagno al paziente con il sollevapazienti igienico a sedia

<p>5</p>  <p>Posizionare il sollevapazienti igienico a sedia in diagonale verso il lato della vasca.</p>	<p>6</p>  <p>Rischio di intrappolamento</p> <p>Sollevare il sollevapazienti igienico a sedia quanto basta per lasciare spazio tra i genitali del paziente e il bordo della vasca.</p>	<p>7</p>  <p>Rischio di intrappolamento</p> <p>Spostare il sollevapazienti igienico a sedia verso la vasca. Sollevare le gambe del paziente sul bordo della vasca ruotando il sollevapazienti in posizione.</p>	<p>8</p>  <p>Lasciare che il paziente senta la temperatura dell'acqua con i piedi. Se necessario, regolare la temperatura.</p>
<p>9</p>  <p>Centrare la sedia sopra la vasca finché non si blocca contro le gambe e il bordo della vasca.</p>	<p>10</p>  <p>Rischio di intrappolamento</p> <p>Regolare il sollevapazienti igienico a sedia per ottenere un'altezza ergonomica per l'assistente. Sollevare la vasca. Assicurarsi che vi sia abbastanza spazio tra i genitali del paziente e il fondo della vasca.</p>	<p>11</p>  <p>Fissare il poggiatesta se necessario. Fare il bagno al paziente.</p>	

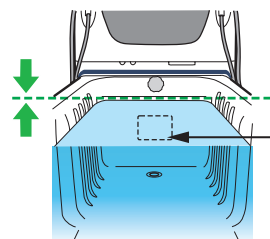
Fare il bagno al paziente con un sollevapazienti igienico a barella

<p>12</p>  <p>Posizionare il sollevapazienti igienico a barella dietro e di fianco alla vasca.</p>	<p>13</p>  <p>Sollevare il sollevapazienti igienico a barella oltre il bordo della vasca.</p>	<p>14</p>  <p>Spostare il sollevapazienti igienico a barella con il paziente diagonalmente sopra il bordo della vasca.</p>	<p>15</p>  <p>Centrare la barella sopra la vasca finché non si blocca contro le gambe e il bordo della vasca.</p>
<p>16</p>  <p>Regolare il sollevapazienti igienico a barella per ottenere un'altezza ergonomica per l'assistente. Sollevare la vasca finché la barella non tocca il fondo.</p>	<p>17</p>  <p>Fissare il poggiatesta se necessario. Fare il bagno al paziente.</p>		

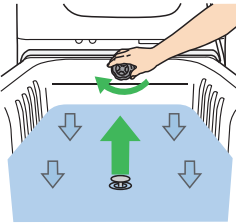
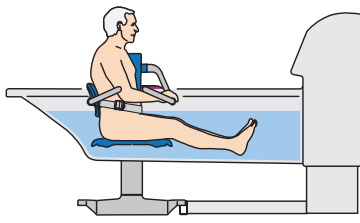
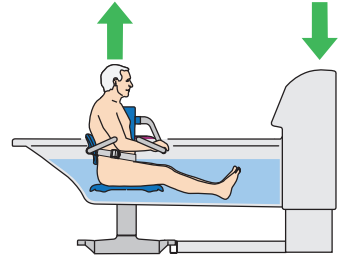
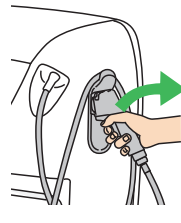

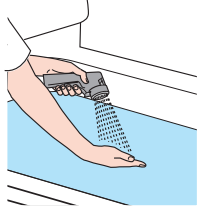
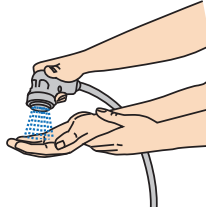

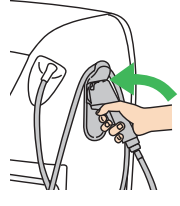
Hydromassage (opzionale)

 <p>Rischio di intrappolamento</p>  <p>Installare la cover di aspirazione prima dell'uso.</p>	 <p>Riempire con acqua per coprire la bocchetta del sistema Hydromassage (A) e il sensore superiore (B).</p>	 <p>Premere il pulsante del sistema Hydromassage. La durata preimpostata è di 15 minuti. Iniziare con la bassa intensità. Regolare se necessario.</p>	 <p>Regolare la direzione del getto d'acqua.</p>	 <p>Al termine della sessione, spegnere il sistema Hydromassage.</p>
---	---	---	---	---

Hydrosound (opzionale)

 <p>Non usare mai in gravidanza.</p>  <p>Riempire con acqua per coprire la piastra di trasduzione del sistema Hydrosound. Aggiungere il condizionatore per acqua ArjoSound.</p>	 <p>Rischio di ustioni e danni all'udito.</p>  <p>Non toccare la piastra di trasduzione e tenere la testa del paziente sopra il livello dell'acqua.</p>	 <p>Premere il pulsante del sistema Hydrosound. La durata preimpostata è di 15 minuti.</p>	 <p>Regolare l'intensità di Hydrosound.</p>	 <p>Al termine della sessione, spegnere il sistema Hydrosound.</p>
---	---	---	--	---

Fare la doccia al paziente

<p>18</p>  <p>Aprire lo scarico.</p>	<p>19</p>  <p>Sollevare lo schienale. Lasciare che il paziente si appoggi al bracciolo.</p>	<p>20</p>  <p>Abbassare completamente la vasca.</p>	<p>21</p>  <p>Prendere la doccetta. Premere il pulsante per doccia. Orientare la doccetta lontano dal paziente.</p>
<p>22</p>  <p>Rischio di scottatura</p>  <p>Premere il grilletto della doccetta. Controllare la temperatura dell'acqua con la mano nuda. Se necessario, regolare la temperatura.</p>	<p>23</p>  <p>Lasciare che il paziente senta la temperatura dell'acqua con la mano prima di dirigere il getto d'acqua sul paziente. Se necessario, regolare la temperatura.</p>	<p>24</p>  <p>Fare la doccia al paziente.</p>	<p>25</p>  <p>Sbloccare il grilletto della doccetta se il pulsante di blocco è attivato. Premere il pulsante per doccia. Riporre la doccetta.</p>

Fine del bagno

<p>26</p>  <p>Asciugare il paziente.</p>	<p>27</p>  <p>Mantenere il paziente al caldo usando degli asciugamani o un accappatoio.</p>	<p>28</p>  <p>Abbassare completamente la vasca.</p>	<p>29</p>  <p>Sollevare il sollevapazienti igienico a sedia quanto basta per lasciare spazio tra i genitali del paziente e il bordo della vasca.</p>
<p>30</p>  <p>Rischio di intrappolamento</p>  <p>Aiutare il paziente a spostare le gambe oltre il bordo mentre si ruota il sollevapazienti lontano dalla vasca.</p>	<p>31</p>  <p>Accertarsi che vi sia spazio sufficiente tra il lato della vasca e il sollevapazienti igienico a sedia.</p>	<p>32</p>  <p>Abbassare il sollevapazienti igienico a sedia. Asciugare le parti del corpo ancora bagnate.</p>	<p>33</p>  <p>Rischio di contaminazione</p> <p>Dopo ogni paziente: pulire e disinfettare la vasca secondo le istruzioni riportate nelle Istruzioni per l'uso (IFU) o nella Guida rapida (QRG) sulla pulizia e la disinfezione.</p>