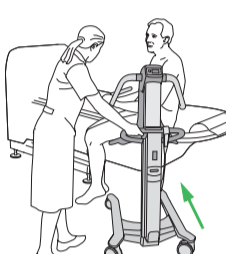

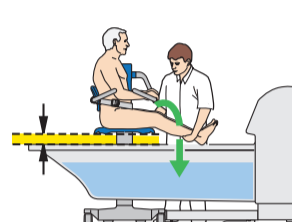

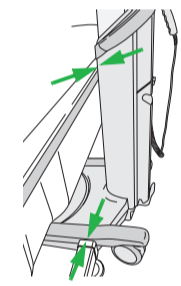

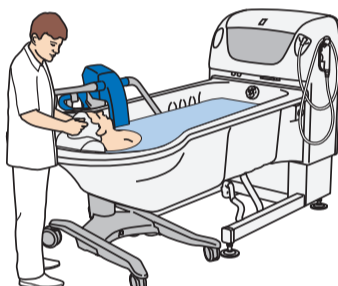


Stysteem 2000 Rhapsody, Primo, Harmonie

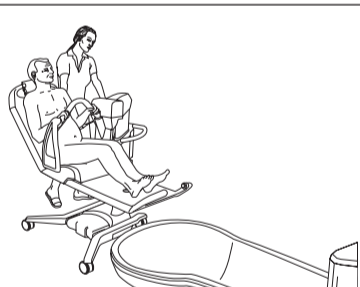
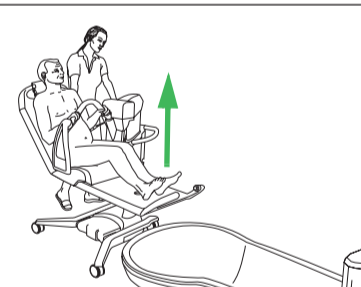
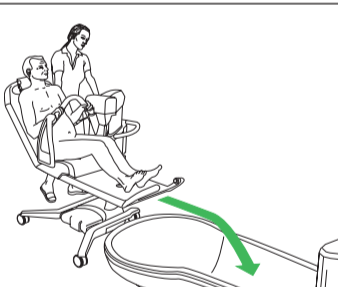
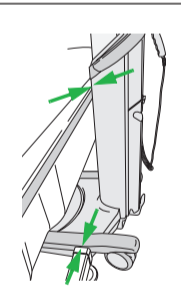
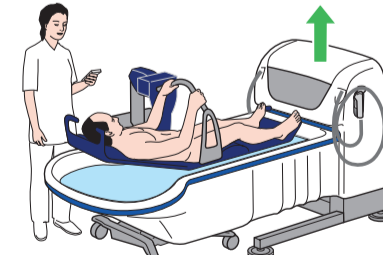

Vorbereiding

<p>1</p>   <p>Zet de badkuip in de laagste stand.</p>	<p>2</p>  <p>Baden met hygiënestoel: het hoofdkussen plaatsen. Baden met badwagen: het hoofdkussen of de voetensteun niet bevestigen.</p>	<p>3</p>  <p>Gevaar voor verbranding</p> <p>Druk op de knop 'Automatisch vullen'. Controleer de watertemperatuur met een blote hand. Pas de temperatuur zo nodig aan.</p>	<p>4</p>  <p>Sluit de afvoer af.</p>
--	--	---	--

Zorgvrager baden met hygiëneliftstoel

<p>5</p>  <p>Plaats de hygiëneliftstoel diagonaal ten opzichte van de zijkant van het bad.</p>	<p>6</p>  <p>Risico van beknelling</p> <p>Breng de hygiëneliftstoel omhoog zodat er ruimte is tussen de genitaliën van de zorgvrager en de rand van de badkuip.</p>	<p>7</p>  <p>Gevaar voor beknelling</p> <p>Verplaats de hygiëneliftstoel naar het bad toe. Til de benen van de zorgvrager over de badkuiprand terwijl u de lift draait.</p>	<p>8</p>  <p>Laat de zorgvrager het water met zijn of haar voeten voelen. Pas de temperatuur zo nodig aan.</p>
<p>9</p>  <p>Plaats de stoel boven het midden van de badkuip tot hij tegen de poten en rand van de badkuip komt.</p>	<p>10</p>  <p>Risico van beknelling</p> <p>Stel de hygiëneliftstoel af op een voor de zorgverlener ergonomische hoogte. Breng de badkuip omhoog. Zorg dat er voldoende ruimte is tussen de genitaliën van de zorgvrager en de bodem van de badkuip.</p>	<p>11</p>  <p>Bevestig de voetensteun indien nodig. Baden.</p>	

Zorgvrager baden met liftbadwagen

<p>12</p>  <p>Plaats de liftbadwagen achter en naast het bad.</p>	<p>13</p>  <p>Beweeg de stretcher van de liftbadwagen voldoende omhoog om de rand van de badkuip vrij te maken.</p>	<p>14</p>  <p>Verplaats de liftbadwagen met de zorgvrager in diagonale positie over de badkuiprand.</p>	<p>15</p>  <p>Plaats de wagen tot hij tegen de poten en rand van de badkuip komt.</p>
<p>16</p>  <p>Stel de liftbadwagen af op een voor de zorgverlener ergonomische hoogte. Breng de badkuip omhoog totdat de stretcher de bodem van de badkuip raakt.</p>	<p>17</p>  <p>Bevestig de voetensteun indien nodig. Baad de zorgvrager.</p>		

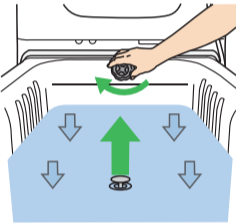
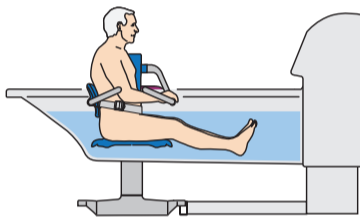
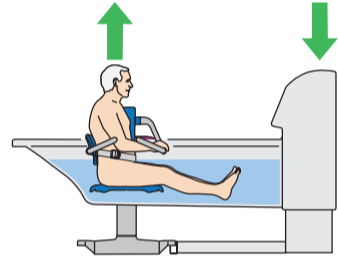
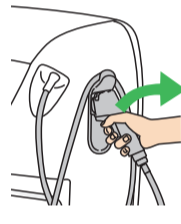




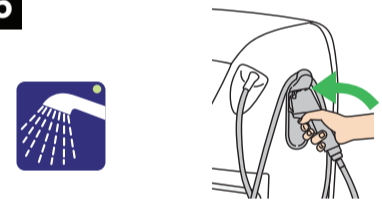
Hydromassage (optioneel)

 <p>Gevaar voor beknelling</p>  <p>Installeer vóór het gebruik het aanzuigdekseel.</p>	 <p>Vul met water tot boven de uitlaat van het Hydromassage-systeem (A) en de bovenste sensor (B).</p>	 <p>Druk op de knop van het Hydromassage-systeem. De standaardduur is 15 minuten. Begin met een lage intensiteit. Pas zo nodig aan.</p>	 <p>Pas de richting van de waterstraal aan.</p>	 <p>Schakel het Hydromassage-systeem na de sessie uit.</p>
--	---	---	--	---

Hydrosound (optioneel)

 <p>Nooit gebruiken als u zwanger bent.</p>  <p>Vu met water tot boven de transducerplaat van het Hydrosound-systeem. Voeg Arjo Sound-waterconditioner toe.</p>	 <p>Risico op brandwonden en gehoorschade.</p>  <p>Raak de transducerplaat niet aan en houd het hoofd van de zorgvrager boven water.</p>	 <p>Druk op de knop van het Hydrosound-systeem. De standaardduur is 15 minuten.</p>	 <p>Pas de Hydrosound-intensiteit aan.</p>	 <p>Schakel het Hydrosound-systeem na de sessie uit.</p>
---	--	--	---	---

De zorgvrager douchen

<p>18</p>  <p>Open de afvoer.</p>	<p>19</p>  <p>Breng de rugsteun omhoog. Laat de zorgvrager zich aan de handsteun vasthouden.</p>	<p>20</p>  <p>Zet de badkuip in de laagste stand.</p>	<p>21</p>  <p>Pak de douchehandgreep. Druk de doucheknop in. Richt de douchehandgreep van de zorgvrager af.</p>
<p>22</p>  <p>Gevaar voor verbranding</p>  <p>Druk op de aan/uit-knop op de douchehandgreep. Controleer de watertemperatuur met een blote hand. Pas de temperatuur zo nodig aan.</p>	<p>23</p>  <p>Laat de zorgvrager met zijn/haar hand aan het water voelen voordat u de waterstraal op de zorgvrager richt. Pas de temperatuur zo nodig aan.</p>	<p>24</p>  <p>Douch de zorgvrager</p>	<p>25</p>  <p>Ontgrendel de aan/uit-knop op de douchehandgreep als de vergrendelknop is geactiveerd. Druk de doucheknop in. Plaats de douchehandgreep terug.</p>

Het baden beëindigen

<p>26</p>  <p>Droog de zorgvrager af.</p>	<p>27</p>  <p>Houd de zorgvrager warm met handdoeken of een badjas.</p>	<p>28</p>  <p>Zet de badkuip in de laagste stand.</p>	<p>29</p>  <p>Breng de hygiënelftstoel omhoog zodat er ruimte is tussen de genitaliën van de zorgvrager en de rand van de badkuip.</p>
<p>30</p>  <p>Risico van beknelling</p>  <p>Help de zorgvrager om zijn/haar benen over de rand te krijgen, terwijl u de lift van de badkuip vandaan draait.</p>	<p>31</p>  <p>Zorg dat er aan de zijkant tussen badkuip en stoel voldoende ruimte is.</p>	<p>32</p>  <p>Breng de hygiënelftstoel omlaag. Droog de overige natte lichaamsdelen af.</p>	<p>33</p>  <p>Het risico op kruisbesmetting</p> <p>Na elke zorgvrager: reinig en desinfecteer de badkuip volgens de instructies in de gebruiksaanwijzing of de beknopte handleiding 'Reinigen en desinfectie'.</p>