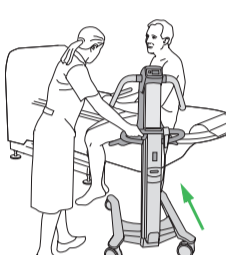

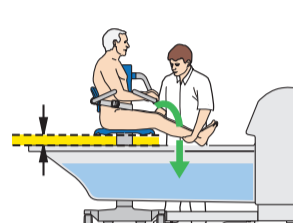

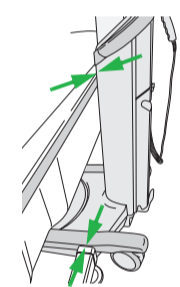
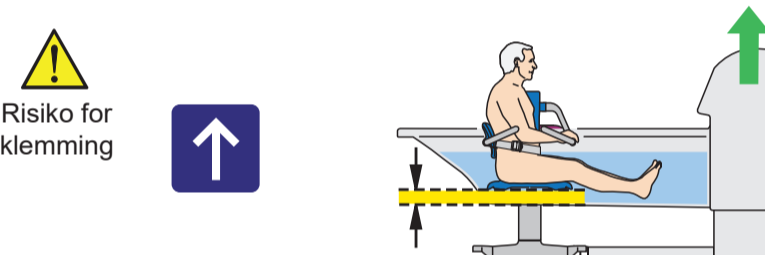
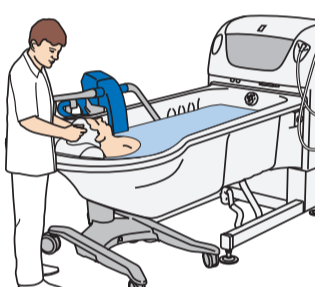


System 2000 Rhapsody, Primo, Harmonie

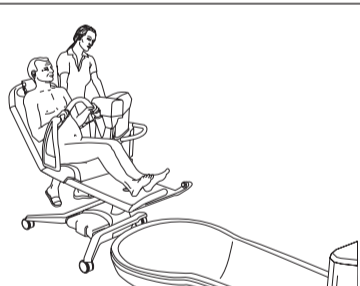
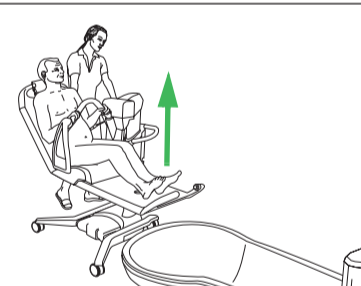
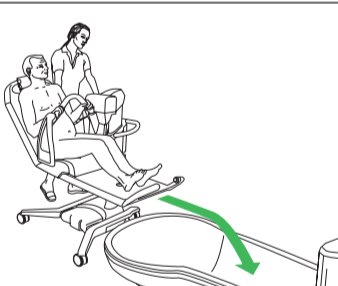
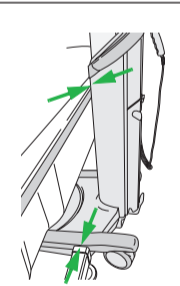
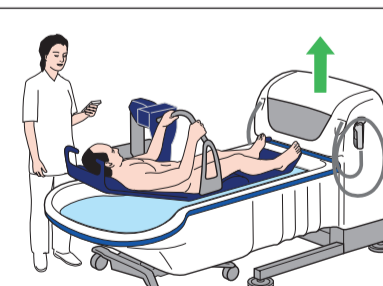

Forberedelser

<p>1</p>   <p>Senk badekaret til laveste stilling.</p>	<p>2</p>  <p>Bading med hygienestol: Fest hodeputen. Bading med badevogn: Ikke fest hodeputen eller fotstøtten.</p>	<p>3</p>  <p>Risiko for skålding</p> <p>Trykk på knappen for autofylling. Kontroller vanntemperaturen med en bar hånd. Juster temperaturen hvis det er nødvendig.</p>	<p>4</p>  <p>Lukk avløpet.</p>
---	--	---	--


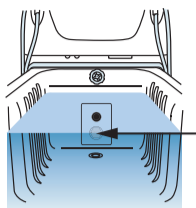
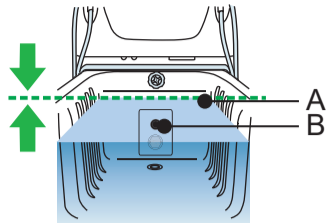
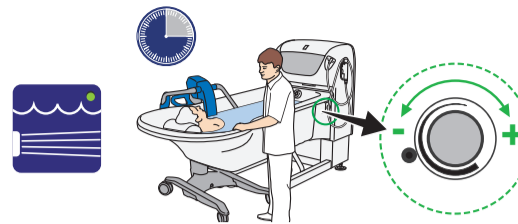
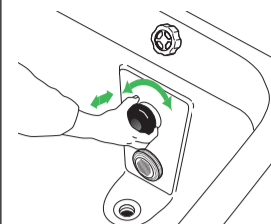

Bade pasienten med en høyderegulerbar hygienestol

<p>5</p>  <p>Plasser den høyderegulerbare hygienestolen diagonalt ved siden av badekaret.</p>	<p>6</p>  <p>Risiko for klemming</p> <p>Løft hygienestolen slik at det er litt plass mellom pasientens genitalier og badekarkanten.</p>	<p>7</p>  <p>Risiko for å bli sittende fast</p> <p>Flytt den høyderegulerbare hygienestolen mot badekaret. Løft pasientens ben over badekarkanten samtidig som du dreier heisen på plass.</p>	<p>8</p>  <p>La pasienten kjenne på vannet med foten. Juster temperaturen hvis det er nødvendig.</p>
<p>9</p>  <p>Plasser stolen midt over badekaret til den stopper mot badekarbena og -kanten.</p>	<p>10</p>  <p>Risiko for klemming</p> <p>Juster hygienestolen til en ergonomisk høyde for pleieren. Hev badekaret. Pass på at det er nok plass mellom pasientens genitalier og bunnen av badekaret.</p>	<p>11</p>  <p>Fest om nødvendig fotstøtten. Bad pasienten.</p>	


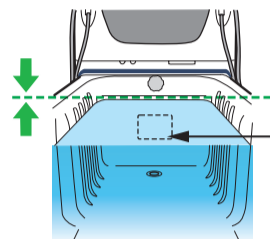


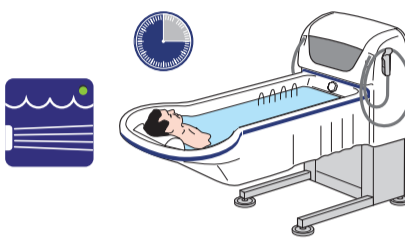
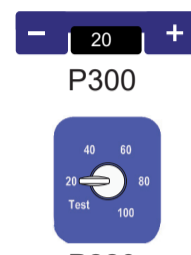

Bade pasienten med en høyderegulerbar badevogn

<p>12</p>  <p>Plasser badevognen bak badekaret, til siden.</p>	<p>13</p>  <p>Løft den regulerbare vognbåren slik at den går klar av badekarkanten</p>	<p>14</p>  <p>Flytt badevognen med pasienten diagonalt inn over badekarkanten.</p>	<p>15</p>  <p>Plasser vognen midt over badekaret til den stopper mot badekarbena og -kanten.</p>
<p>16</p>  <p>Juster badevognen til en ergonomisk høyde for pleieren. Hev badekaret til båren berører bunnen av badekaret.</p>	<p>17</p>  <p>Fest om nødvendig fotstøtten. Bad pasienten.</p>		

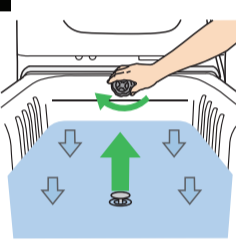
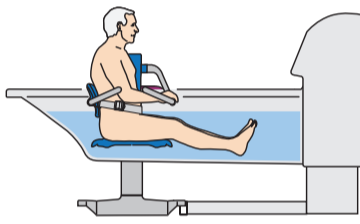
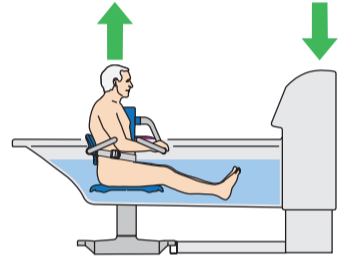
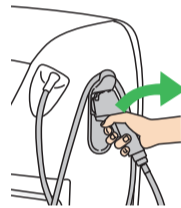


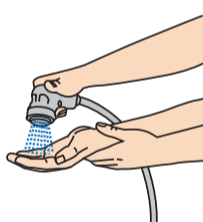

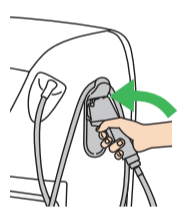
Hydromassage (ekstrautstyr)

 <p>Risiko for å bli sittende fast</p>  <p>Monter sugedekselet før bruk.</p>	 <p>Fyll badekaret med vann over Hydromassage-systemutløpet (A) og toppsensoren (B).</p>	 <p>Trykk på Hydromassage-knappen. Standard driftstid er 15 minutter. Start med lav intensitet. Juster etter behov.</p>	 <p>Juster vannstrålens retning.</p>	 <p>Slå av Hydromassage-systemet etter økten.</p>
--	---	---	---	--

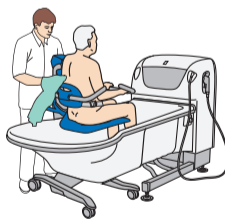
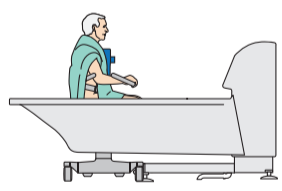
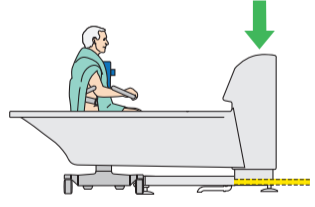
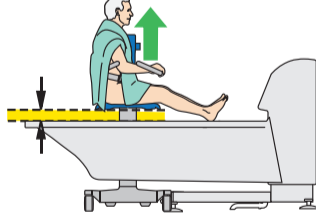

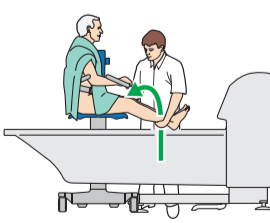
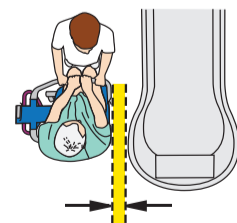


Hydrosound (ekstrautstyr)

 <p>Må ikke brukes av gravide</p>  <p>Fyll badekaret med vann over Hydrosound-systemets omformerplate. Tilsett Arjo Sound vannbehandlingsvæske.</p>	 <p>Fare for brannskade og hørselsskade</p>  <p>Ikke berør transduserplaten, og hold pasientens hode over vann.</p>	 <p>Trykk på Hydrosound-knappen. Standard driftstid er 15 minutter.</p>	 <p>Juster Hydrosound-intensiteten.</p>	 <p>Slå av Hydrosound-systemet etter økten.</p>
---	---	--	--	--

Dusje pasienten

<p>18</p>  <p>Åpne avløpet.</p>	<p>19</p>  <p>Hev ryggstøtten. La pasienten holde seg i håndstøtten.</p>	<p>20</p>  <p>Senk badekaret til laveste stilling.</p>	<p>21</p>  <p>Grip dusjhåndtaket. Trykk på dusjknappen. Rett dusjhåndtaket bort fra pasienten.</p>
<p>22</p>  <p>Risiko for skålding</p>  <p>Trykk på utløseren på dusjhåndtaket. Kontroller vanntemperaturen med en bar hånd. Juster temperaturen hvis det er nødvendig.</p>	<p>23</p>  <p>La pasienten kjenne på vannet med hånden før du retter vannstrømmen mot ham eller henne. Juster temperaturen hvis det er nødvendig.</p>	<p>24</p>  <p>Dusj pasienten.</p>	<p>25</p>  <p>Lås opp dusjhåndtakets utløser hvis låseknappen er aktivert. Trykk på dusjknappen. Sett dusjhåndtaket tilbake.</p>

Avslutte badet

<p>26</p>  <p>Tørk pasienten.</p>	<p>27</p>  <p>Hold pasienten varm med håndklær eller en badekåpe.</p>	<p>28</p>  <p>Senk badekaret til laveste stilling.</p>	<p>29</p>  <p>Løft hygienestolen slik at det er litt plass mellom pasientens genitalier og badekarkanten.</p>
<p>30</p>  <p>Risiko for klemming</p>  <p>Hjelp pasienten med å flytte bena over badekarkanten mens løfteren roteres bort fra badekaret.</p>	<p>31</p>  <p>Kontroller at det er tilstrekkelig plass mellom badekarets side og hygienestolen.</p>	<p>32</p>  <p>Senk den høyderegulerbare hygienestolen. Tørk resten av de våte områdene.</p>	<p>33</p>  <p>Risiko for kontaminering Etter hver pasient: Rengjør og desinfiser badekaret i henhold til instruksjonene i bruksanvisningen eller hurtigveiledningen for Rengjøring og desinfisering.</p>