

# System 2000 Rhapsody, Primo, Harmonie



## Подготовка

<p><b>1</b></p> <p>Опустите ванну на самую низкую высоту.</p>	<p><b>2</b></p> <p>Купание пациента с использованием гигиенического кресла: прикрепите головную подушку. Купание с использованием каталки для ванны: не прикрепляйте головную подушку или опору для ног.</p>	<p><b>3</b></p> <p>Риск ожога</p> <p>Нажмите кнопку «Автоматическое наполнение». Проверьте температуру воды рукой без перчатки. При необходимости отрегулируйте температуру.</p>	<p><b>4</b></p> <p>Закройте сливное отверстие.</p>
---	--	--	--

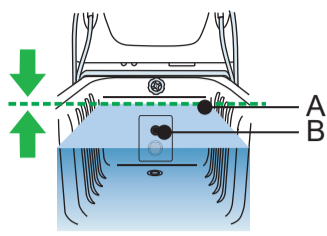

## Купание пациента с использованием гигиенического кресла-подъемника

<p><b>5</b></p> <p>Расположите гигиеническое кресло-подъемник по диагонали к боковой стороне ванны.</p>	<p><b>6</b></p> <p>Риск защемления</p> <p>Поднимите гигиеническое кресло-подъемник так, чтобы между краем ванны и гениталиями пациента было достаточно места.</p>	<p><b>7</b></p> <p>Риск защемления</p> <p>Придвиньте гигиеническое кресло-подъемник к ванне. Поднимите ноги пациента над краем ванны, одновременно поворачивая подъемник на место.</p>	<p><b>8</b></p> <p>Дайте пациенту почувствовать ступнями воду. При необходимости отрегулируйте температуру.</p>
<p><b>9</b></p> <p>Расположите кресло над ванной так, чтобы оно коснулось ножек и края ванны.</p>	<p><b>10</b></p> <p>Риск защемления</p> <p>Установите гигиеническое кресло-подъемник на высоту, удобную для лица, осуществляющего уход. Поднимите ванну. Проследите за тем, чтобы между дном ванны и гениталиями было достаточно места.</p>	<p><b>11</b></p> <p>При необходимости установите опору для ног. Вымойте пациента.</p>	



## Купание пациента с использованием каталки-подъемника для ванны

<p><b>12</b></p> <p>Расположите каталку для душа с переменной высотой позади и немного сбоку от ванны.</p>	<p><b>13</b></p> <p>Поднимите платформу подъемника каталки для ванны так, чтобы она находилась выше края ванны.</p>	<p><b>14</b></p> <p>Передвиньте каталку с пациентом и расположите ее по диагонали над краем ванны.</p>	<p><b>15</b></p> <p>Расположите каталку по центру над ванной так, чтобы она коснулась ножек и края ванны.</p>
<p><b>16</b></p> <p>Установите каталку-подъемник для ванны на высоту, удобную для лица, осуществляющего уход. Поднимите ванну так, чтобы платформа касалась дна ванны.</p>	<p><b>17</b></p> <p>При необходимости установите опору для ног. Вымойте пациента.</p>		

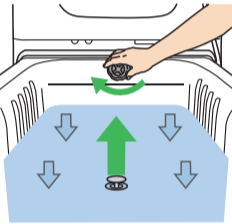
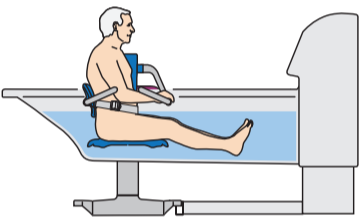
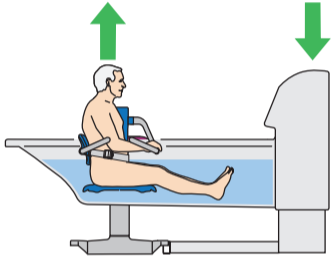
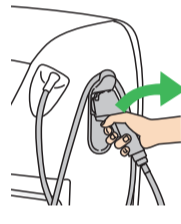


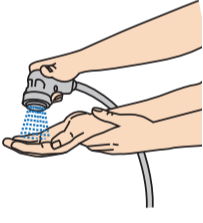

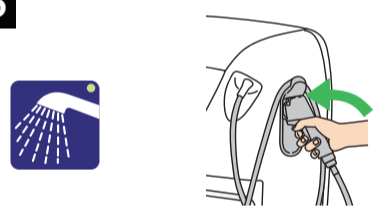
## Hydromassage (опция)

 <p>Риск защемления</p>  <p>Перед использованием установите крышку отсоса.</p>	 <p>Наполните ванну водой до уровня, покрывающего патрубки системы Hydromassage (A) и верхний датчик (B)</p>	 <p>Нажмите кнопку системы Hydromassage. По умолчанию время работы составляет 15 минут. Начинайте с низкой интенсивности. При необходимости отрегулируйте.</p>	 <p>Отрегулируйте направление водной струи.</p>	 <p>После сеанса выключите систему Hydromassage.</p>
--	---	--	--	---

## Hydrosound (опция)

 <p>Использование для беременных запрещается</p>  <p>Наполните ванну водой до уровня, покрывающего пластину преобразователя системы Hydrosound. Добавьте кондиционер для воды Arjo Sound.</p>	 <p>Опасность ожогов и поврежденной слуха</p>  <p>Не прикасайтесь к пластине преобразователя и удерживайте голову пациента над водой.</p>	 <p>Нажмите кнопку системы Hydrosound. По умолчанию время работы составляет 15 минут.</p>	 <p>Отрегулируйте интенсивность системы Hydrosound.</p>	 <p>После сеанса выключите систему Hydrosound.</p>
---	---	--	--	---

## Мытье пациента под душем

<p><b>18</b></p>  <p>Откройте слив.</p>	<p><b>19</b></p>  <p>Поднимите спинку. Пациент должен взяться за опору для рук.</p>	<p><b>20</b></p>  <p>Опустите ванну на самую низкую высоту.</p>	<p><b>21</b></p>  <p>Возьмите лейку душа. Нажмите кнопку душа. Направьте лейку душа в сторону от пациента.</p>
<p><b>22</b></p>  <p>Риск ошпаривания</p>  <p>Нажмите курок на лейке душа. Проверьте температуру воды рукой без перчатки. При необходимости отрегулируйте температуру.</p>	<p><b>23</b></p>  <p>Позвольте пациенту потрогать воду руками, прежде чем направлять на него поток воды. При необходимости отрегулируйте температуру.</p>	<p><b>24</b></p>  <p>Вымойте пациента под душем</p>	<p><b>25</b></p>  <p>Разблокируйте пусковой крючок лейки для душа, если активирована кнопка блокировки. Нажмите кнопку душа. Верните на место лейку душа.</p>

## Завершение принятия ванны

<p><b>26</b></p>  <p>Оботрите пациента.</p>	<p><b>27</b></p>  <p>Укутайте пациента в полотенца или банный халат.</p>	<p><b>28</b></p>  <p>Опустите ванну на самую низкую высоту.</p>	<p><b>29</b></p>  <p>Поднимите гигиеническое кресло-подъемник так, чтобы между краем ванны и гениталиями пациента было достаточно места.</p>
<p><b>30</b></p>  <p>Риск защемления</p>  <p>Помогите пациенту перенести ноги через край, одновременно поворачивая подъемник в сторону от ванны.</p>	<p><b>31</b></p>  <p>Проследите за тем, чтобы между боковой стороной ванны и гигиеническим креслом-подъемником было достаточно места.</p>	<p><b>32</b></p>  <p>Опустите гигиеническое кресло. Вытрите оставшиеся влажные участки тела.</p>	<p><b>33</b></p>  <p>Риск заражения</p> <p><b>После каждого пациента:</b> выполните очистку и дезинфекцию ванны в соответствии с указаниями в Инструкции по эксплуатации или в кратком справочном руководстве (КСП) «Очистка и дезинфекция».</p>