

System 2000 Rhapsody, Primo, Harmonie




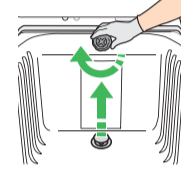

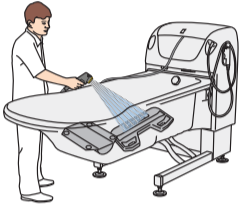


Reinigen en desinfecteren:


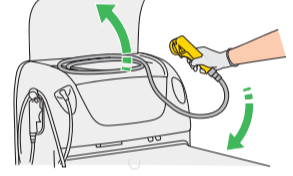

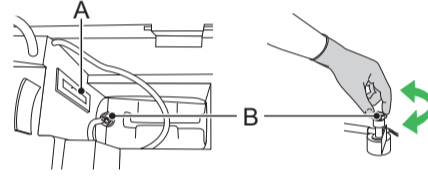
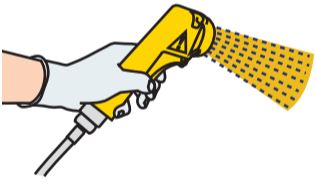
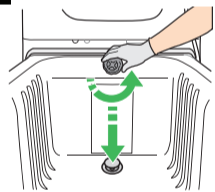
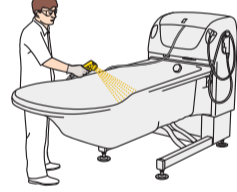
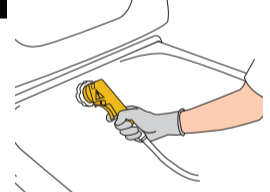

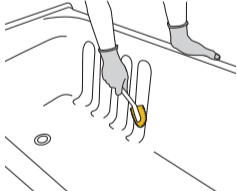
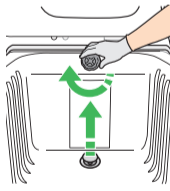

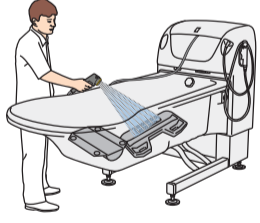
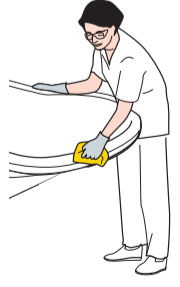
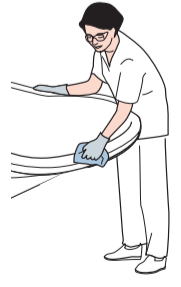
- met de desinfectie-eenheid (standaard badkuip en Hydrosound-systeem) op pagina 1-2
- met een spuitflacon (standaard badkuip en Hydrosound-systeem, pagina 3)
- het Hydromassage-systeem met automatische desinfectie, pagina 4
- het Hydromassage-systeem zonder automatische desinfectie, pagina 5

Reinigen en desinfecteren met de desinfectie-eenheid (standaard badkuip en Hydrosound-systeem)

Verwijder zichtbare resten

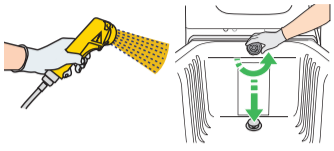
<p>1</p>  <p>Controleer het niveau van het desinfectiemiddel.</p>	<p>2</p>  <p>Breng de badkuip omhoog tot een ergonomisch verantwoorde werkstand.</p>	<p>3</p>  <p>Controleer of alle functies zijn uitgeschakeld.</p>	<p>4</p>  <p>Open de afvoer. Verwijder alle accessoires en plaats ze op de bodem van de badkuip.</p>	<p>5</p>   <p>Spoel de badkuip en de accessoires met water om zichtbare resten te verwijderen. Keer de accessoires om en spoel opnieuw.</p>
--	---	---	---	---

Reiniging

<p>6</p>  <p>Gebruik beschermende handschoenen en een veiligheidsbril</p>	<p>7</p>  <p>Neem de desinfectiesproeier uit.</p>	<p>8</p>  <p>Druk op de desinfectieknop.</p>	<p>9</p>  <p>Sproei desinfectiemiddel in de badkuip totdat de stroommeter (A) de juiste mengwaarde aangeeft volgens de gebruiksaanwijzing. Pas zo nodig aan (B).</p>	
<p>10</p> <p>°C (°F)</p> <p>Stel de watertemperatuur in op ongeveer 25 °C (77 °F), om te voorkomen dat het desinfectiemiddel dampen produceert.</p>	<p>11</p>  <p>Sproei desinfectiemiddel in de afvoer. Schrob de afvoer met een borstel.</p>	<p>12</p>  <p>Sluit de afvoer af.</p>	<p>13</p>  <p>Spuit desinfectiemiddel op alle oppervlakken aan de binnenkant van het bad en op alle zijkanten van de accessoires.</p>	<p>14</p>  <p>Besproei het oppervlak van de overloop.</p>
<p>15</p>  <p>Druk op de desinfectieknop om de functie uit te schakelen.</p>	<p>16</p>  <p>Schrob de oppervlakken van de badkuip, losse onderdelen en accessoires grondig met een zachte borstel.</p>	<p>17</p>  <p>Open de afvoer.</p>	<p>18</p>   <p>Spoel alle onderdelen met ruim water met een temperatuur van ongeveer 25 °C (77 °F).</p>	
<p>19</p> <p>Drenk een doek in desinfectiemiddel en neem hiermee alle andere contactdelen af: de buitenkant van de badkuip, de afstandsbediening en de metalen sensorknoppen.</p> 	<p>20</p> <p>Maak een nieuwe doek nat met water en verwijder het desinfectiemiddel. Spoel de doek regelmatig uit onder stromend water.</p> 	<p>Ga verder met Desinfectie voor <i>standaard badkuip en Hydrosound-systeem</i> op pagina 2.</p>		

Reiniging/desinfectie

21

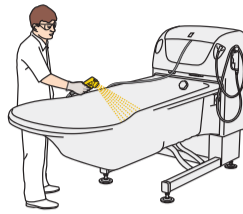


Sproei desinfectiemiddel in de afvoer. Sluit de afvoer af.

22

Spuit desinfectiemiddel op alle oppervlakken aan de binnenkant van het bad en op alle zijanten van de accessoires.

Laat het desinfectiemiddel voldoende lang inwerken zoals aangegeven in de gebruiksinstructies van het desinfectiemiddel.



23

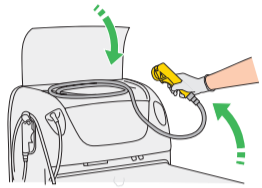
Druk op de desinfectieknop om de desinfectiecyclus te beëindigen.



Alleen bij automatische desinfectie:

Als de vooraf ingestelde desinfectieduur niet is verstreken, zijn andere functies 2-10 minuten uitgeschakeld, afhankelijk van het model.

24

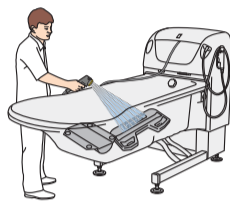


Plaats de desinfectie-sproeier terug.

25

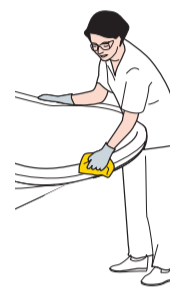


Open de afvoer. Spoel alle onderdelen schoon met water met een temperatuur van 25 °C (77 °F).



26

Drenk een doek in desinfectiemiddel en neem alle andere contactoppervlakken af: de buitenkant van de badkuip, de afstandsbediening en de metalen sensorknoppen. Laat het desinfectiemiddel lang genoeg inwerken volgens de gebruiksinstructies van het desinfectiemiddel.

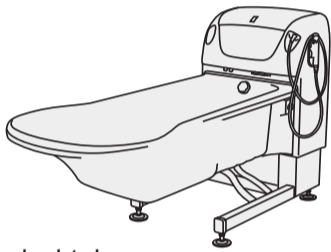


27

Maak een nieuwe doek nat met water en verwijder het desinfectiemiddel. Spoel de doek regelmatig uit onder stromend water.




28

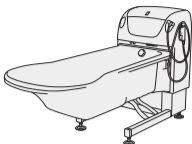


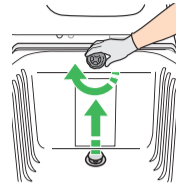
Laat aan de lucht drogen. Bevestig alle accessoires.


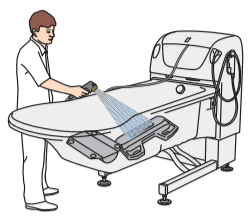
Reinigen en desinfecteren met een spuitflacon

Verwijder zichtbare resten


1  Breng de badkuip omhoog tot een ergonomisch verantwoorde werkstand.


2  Controleer of alle functies zijn uitgeschakeld.

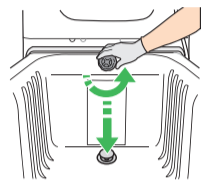
3  Open de afvoer. Verwijder alle accessoires en plaats ze op de bodem van de badkuip.

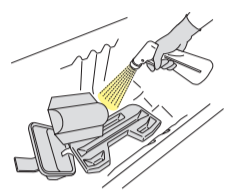
4   Spoel de badkuip en de accessoires met water om zichtbare resten te verwijderen. Keer de accessoires om en spoel opnieuw.

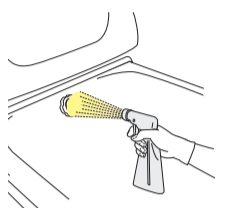
Reiniging

5  Gebruik beschermende handschoenen en een veiligheidsbril

6  Sproei desinfectiemiddel in de afvoer. Schrob de afvoer met een borstel.

7  Sluit de afvoer af.

8  Spuit desinfectiemiddel op alle oppervlakken aan de binnenkant van het bad en op alle zijanten van de accessoires.

9  Besproei het oppervlak van de overloop.

10  Schrob de oppervlakken van de badkuip, losse onderdelen en accessoires grondig met een zachte borstel.


11  Open de afvoer.

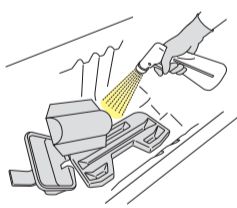
12   Spoel alle onderdelen schoon met een ruime hoeveelheid water met een temperatuur van 25 °C (77 °F).

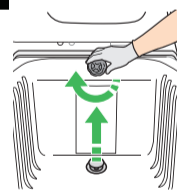
13  Drenk een doek in desinfectiemiddel en neem hiermee alle andere contactdelen af: de buitenkant van de badkuip, de afstandsbediening en de metalen sensorknoppen.

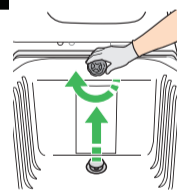
14  Maak een nieuwe doek nat met water en verwijder het desinfectiemiddel. Spoel de doek regelmatig uit onder stromend water.


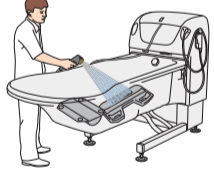
Reiniging/desinfectie


15  Sproei desinfectiemiddel in de afvoer. Sluit de afvoer af.


16  Spuit desinfectiemiddel op alle oppervlakken aan de binnenkant van het bad en op alle zijanten van de accessoires.


17  Laat het desinfectiemiddel lang genoeg inwerken volgens de gebruiksinstructies van het desinfectiemiddel.

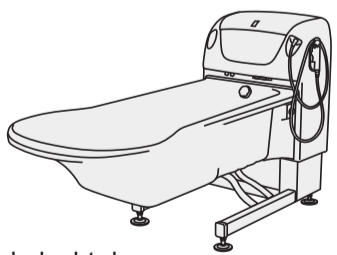
18  Open de afvoer.

19   Spoel alle onderdelen schoon met een ruime hoeveelheid water met een temperatuur van 25 °C (77 °F).

20  Drenk een doek in desinfectiemiddel en neem hiermee alle andere contactdelen af: de buitenkant van de badkuip, de afstandsbediening en de metalen sensorknoppen.

21  Laat het desinfectiemiddel lang genoeg inwerken volgens de gebruiksinstructies van het desinfectiemiddel.

22  Maak een nieuwe doek nat met water en verwijder het desinfectiemiddel. Spoel de doek regelmatig uit onder stromend water.

23  Laat aan de lucht drogen. Bevestig alle accessoires.


Het Hydromassage-systeem reinigen en desinfecteren met automatische desinfectie

1



Controleer het niveau van het desinfectiemiddel.

2



Breng de badkuip omhoog tot een ergonomisch verantwoorde werkstand.

3



Sluit de afvoer af.

4



Draai de schroeven los en verwijder het zuiginlaatscherm. Reinig het zuiginlaatscherm apart.

5



Druk op de desinfectieknop om de desinfectiecyclus te starten.

6

Er komt desinfectiemiddel uit het mondstuk van het Hydromassage-systeem.

Aan het einde van de desinfectiecyclus wordt het Hydromassage-systeem gespoeld met water.

7



Sproei desinfectiemiddel in de overloop.

8

Ga door met de resterende desinfectie-instructies volgens *Reinigen en desinfecteren met de desinfectie-eenheid (standaard badkuip en Hydrosound-systeem)*, op pagina 1 en 2 van deze beknopte handleiding.

9

Laat het desinfectiemiddel lang genoeg inwerken volgens de gebruiksinstructies van het desinfectiemiddel.

10




Druk de doucheknop in. Spoel de overloop met water.

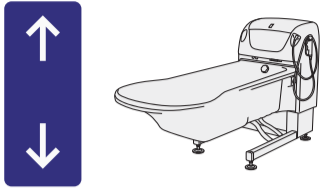
11

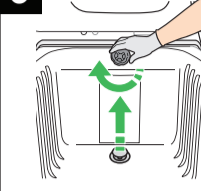
Nadat de desinfectie voltooid is, bevestigt u het zuiginlaatscherm met de schroeven en draait u deze voorzichtig aan.

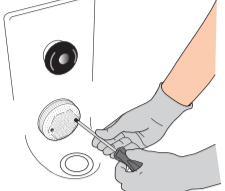


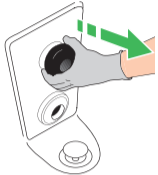
Het Hydromassage-systeem reinigen en desinfecteren zonder automatische desinfectie

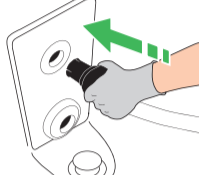
- 

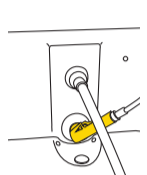
Controleer het niveau van het desinfectiemiddel.
- 

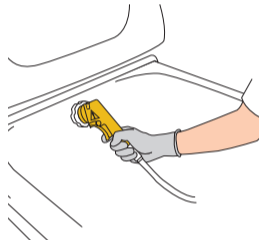
Breng de badkuip omhoog tot een ergonomisch verantwoorde werkstand.
- 


Open de afvoer.
- 


Draai de schroeven los en verwijder het zuiginlaatscherm. Reinig het zuiginlaatscherm apart.
- 

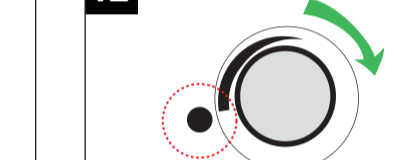
Trek het mondstuk van het Hydromassage-systeem eruit als er een slang wordt aangesloten.
- 


Plaats de slang, waar van toepassing, in de uitlaat van het Hydromassage-systeem.
- 

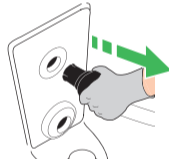
Sproei desinfectiemiddel op de zuiginlaat totdat er desinfectiemiddel uit de slang komt.
- 


Sproei desinfectiemiddel in de overloop.
Laat het desinfectiemiddel lang genoeg inwerken volgens de gebruiksinstructies van het desinfectiemiddel.
- 

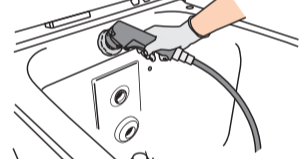
Druk op de desinfectieknop om de desinfectie uit te schakelen.
- 

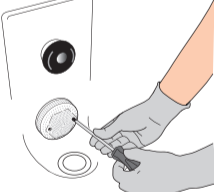
Druk de douche-knop in.
- 

Sluit de douche-handgreep aan op de zuiginlaat.
Draai de knop van het Hydromassage-systeem naar de hoogste intensiteit.
- 

Druk op de aan/uitknop en spoel totdat er **helder** water uit de slang komt.
- 

Verwijder de slang, indien van toepassing.
- 

Plaats het mondstuk terug in de uitlaat van het Hydromassage-systeem.
- 

Spoel de overloop met water.
- Ga door met de resterende desinfectie-instructies volgens *Reinigen en desinfecteren met de desinfectie-eenheid (standaard badkuip en Hydrosound-systeem)*, op pagina 1 en 2 van deze beknopte handleiding.
- 

Nadat de desinfectie voltooid is, bevestigt u het zuiginlaatscherm met de schroeven en draait u deze voorzichtig aan.