
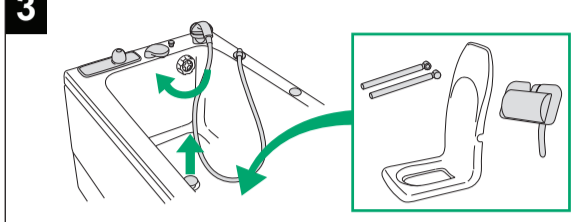
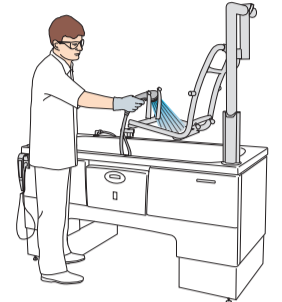
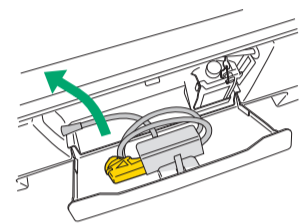

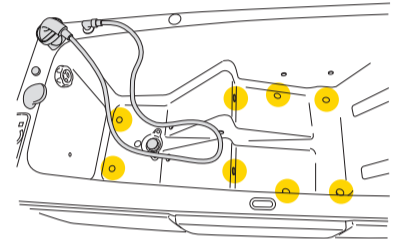




Désinfection avec un système de désinfection


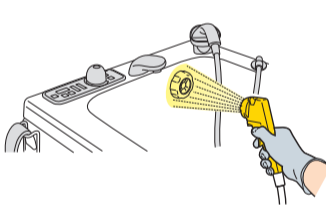
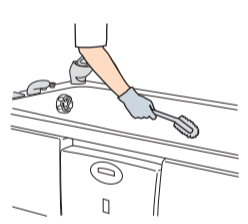
Éliminer les résidus visibles




<p>1</p>  <p>Porter des gants et des lunettes de protection.</p>	<p>2</p> <p>Désactiver toutes les fonctions. Vérifier que le fauteuil de transfert se trouve dans la baignoire.</p>	<p>3</p>  <p>Ouvrir la bonde. Détacher et placer les accessoires au fond de la baignoire.</p>	<p>4</p> <p>Avec de l'eau, arroser et rincer la baignoire, le bras de levage, le fauteuil de transfert, ainsi que tous les bords des pièces détachables et accessoires.</p> 
---	--	--	--


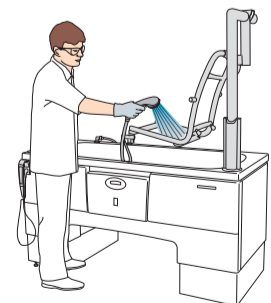

Nettoyage
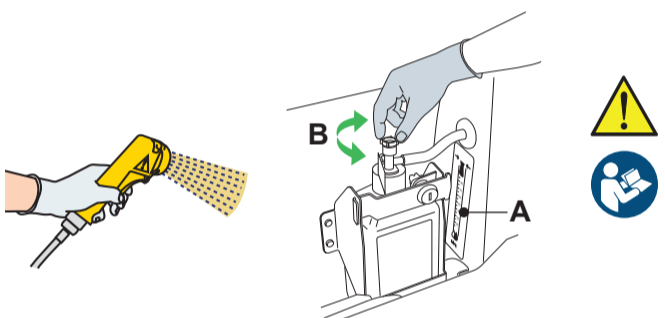
<p>5</p>  <p>Soulever la douchette de désinfection.</p>	<p>6</p>  <p>Appuyer pendant 5 secondes sur le bouton Désinfection.</p>	<p>7</p> <p>Pour les baignoires équipées d'un système Air Spa : La désinfection automatique démarre. Durée approximative de la désinfection automatique : 3 à 4 minutes. 10 secondes après le démarrage, la douchette de désinfection est activée pendant 2 minutes avant de s'éteindre.</p> 
--	---	---

<p>8</p> <p>Vaporiser du désinfectant dans la baignoire jusqu'à ce que le débitmètre (A) indique que le dosage du mélange est correct conformément au mode d'emploi. Procéder au réglage si nécessaire (B). Régler la température de l'eau à 20 °C.</p> 	<p>9</p>  <p>Pulvériser le produit désinfectant dans la bonde. Utiliser un goupillon pour nettoyer l'évacuation. Placer le bouchon sur la bonde.</p>
---	--

<p>10</p> <p>Vaporiser le désinfectant sur toutes les surfaces internes de la baignoire, le bras de levage, le fauteuil de transfert, ainsi que tous les bords des pièces détachables et accessoires.</p> 	<p>11</p>  <p>Vaporiser à l'intérieur du trop-plein.</p>	<p>12</p> <p>Frotter minutieusement toutes les surfaces internes de la baignoire, le bras de levage, le fauteuil de transfert, les pièces détachables et tous les accessoires.</p> 
--	---	---
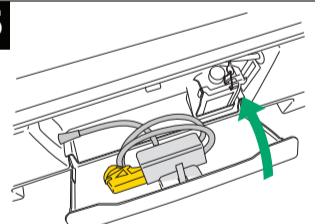
<p>13</p> <p>Tremper un chiffon dans du désinfectant. Essuyer toutes les autres zones de contact telles que l'extérieur de la baignoire, la télécommande et le châssis de transfert avec le chiffon.</p> 	<p>14</p> <p>Pour les baignoires équipées d'un système Air Spa Le cycle de désinfection s'arrête automatiquement. Pour les baignoires non équipées d'un système Air Spa Appuyer sur le bouton de désinfection pour mettre fin au processus de désinfection.</p> 	<p>15</p>  <p>Replacer la douchette de désinfection dans le logement prévu.</p>
---	---	---


<p>16</p>  <p>Ouvrir la bonde. Rincer abondamment toutes les pièces avec de l'eau à 25 °C.</p> 	<p>17</p> <p>Imbiber un nouveau chiffon d'eau et éliminer le désinfectant. Rincer de temps en temps le chiffon à l'eau courante.</p> 
--	---

Suite des étapes à la page suivante

Désinfection avec un système de désinfection (suite)

Désinfection

18

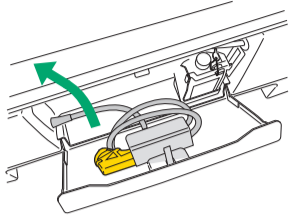

Soulever la douchette de désinfection.


19




Appuyer pendant 5 secondes sur le bouton Désinfection.

20

Pour les baignoires équipées d'un système Air Spa :
La désinfection automatique démarre. Durée approximative de la désinfection automatique : 3 à 4 minutes.
10 secondes après le démarrage, la douchette de désinfection est activée pendant 2 minutes avant de s'éteindre.

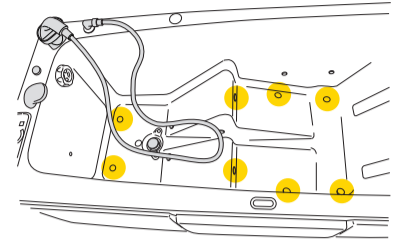

21

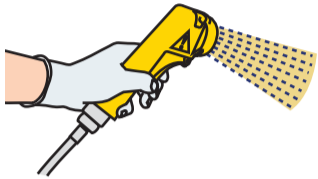

Pulvériser le produit désinfectant dans la bonde. Placer le bouchon sur la bonde.

22

Vaporiser le désinfectant sur toutes les surfaces internes de la baignoire, le bras de levage, le fauteuil de transfert, ainsi que tous les bords des pièces détachables et accessoires.



23

Tremper un chiffon dans du désinfectant. Essuyer toutes les autres zones de contact telles que l'extérieur de la baignoire, la télécommande et le châssis de transfert avec le chiffon.



24


Laisser agir le désinfectant conformément à son mode d'emploi.

25

Pour les baignoires équipées d'un système Air Spa
Le cycle de désinfection s'arrête automatiquement.
Pour les baignoires non équipées d'un système Air Spa
Appuyer sur le bouton de désinfection pour mettre fin au processus de désinfection.



26

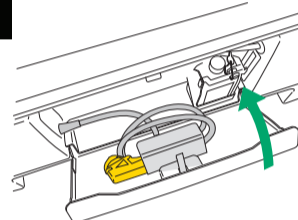


Replacer la douchette de désinfection dans le logement prévu.

27



Ouvrir la bonde. Rincer toutes les pièces avec de l'eau à 25 °C.

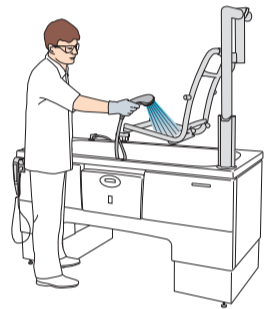


28

Imbiber un nouveau chiffon d'eau et éliminer le désinfectant. Rincer de temps en temps le chiffon à l'eau courante.




29

Remettre la douchette dans son support.

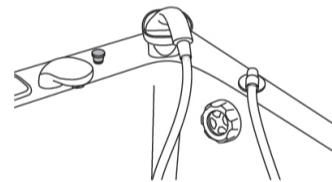


30

Laisser sécher à l'air libre.

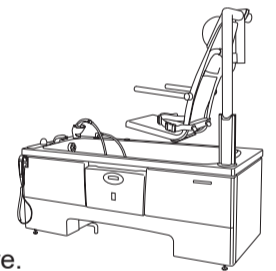


31

Fixer les accoudoirs et le fauteuil. S'assurer que le fauteuil est fermement attaché. Attacher l'oreiller, la sangle de sécurité ainsi que les autres accessoires.

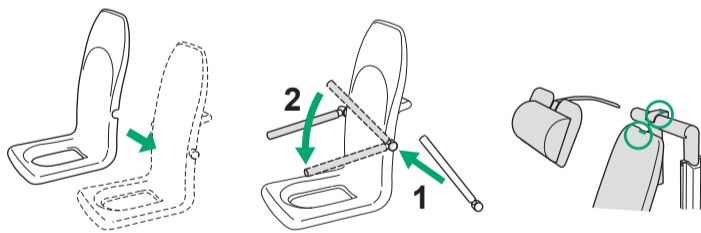



Désinfection avec un flacon vaporisateur

Éliminer les résidus visibles


1  Porter des gants et des lunettes de protection.


2 Désactiver toutes les fonctions. Vérifier que le fauteuil de transfert se trouve dans la baignoire.

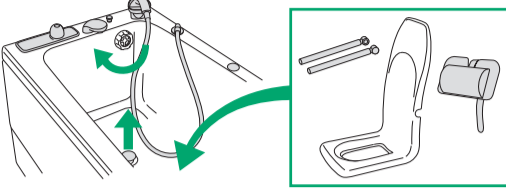
3  Ouvrir la bonde. Détacher et placer les accessoires au fond de la baignoire.


4  Avec de l'eau, arroser et rincer la baignoire, le bras de levage, le fauteuil de transfert, ainsi que tous les bords des pièces détachables et accessoires.


Nettoyage


5  Pulvériser le produit désinfectant dans la bonde. Utiliser un goupillon pour nettoyer l'évacuation. Placer le bouchon sur la bonde.


6  Vaporiser le désinfectant sur toutes les surfaces internes de la baignoire, le bras de levage, le fauteuil de transfert, ainsi que tous les bords des pièces détachables et accessoires.

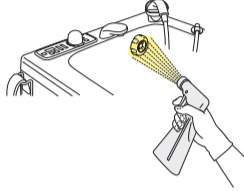7  Vaporiser à l'intérieur du trop-plein.


8  Frotter minutieusement toutes les surfaces internes de la baignoire, le bras de levage, le fauteuil de transfert, les pièces détachables et tous les accessoires.


9  Tremper un chiffon dans du désinfectant. Essuyer toutes les autres zones de contact telles que l'extérieur de la baignoire, la télécommande et le châssis de transfert avec le chiffon.


10  Ouvrir la bonde. Rincer abondamment toutes les pièces avec de l'eau à 25 °C.


11  Imbiber un nouveau chiffon d'eau et éliminer le désinfectant. Rincer de temps en temps le chiffon à l'eau courante.

Désinfection


12  Pulvériser le produit désinfectant dans la bonde. Placer le bouchon sur la bonde.


13  Vaporiser le désinfectant sur toutes les surfaces internes de la baignoire, le bras de levage, le fauteuil de transfert, ainsi que tous les bords des pièces détachables et accessoires.

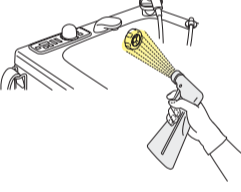
14  Vaporiser à l'intérieur du trop-plein.


15  Tremper un chiffon dans du désinfectant. Essuyer toutes les autres zones de contact telles que l'extérieur de la baignoire, la télécommande et le châssis de transfert avec le chiffon.


16 Laisser agir le désinfectant conformément à son mode d'emploi.

17  Ouvrir la bonde. Rincer toutes les pièces avec de l'eau à 25 °C.

18  Imbiber d'eau un chiffon propre et éliminer le désinfectant. Rincer de temps en temps le chiffon à l'eau courante.

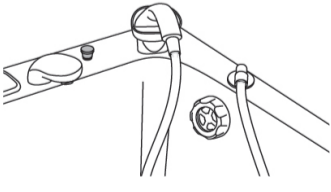19  Remettre la douchette dans son support.

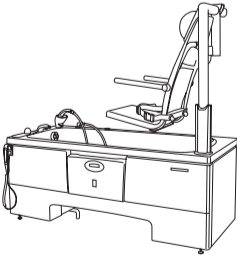20  Laisser sécher à l'air libre.

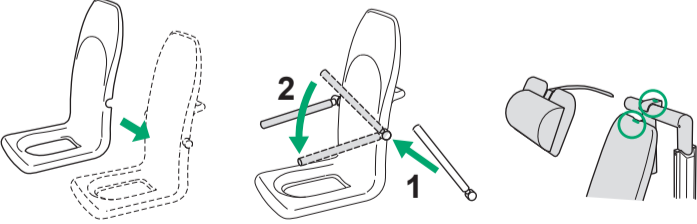21  Fixer les accoudoirs et le fauteuil. S'assurer que le fauteuil est fermement attaché. Attacher l'oreiller, la sangle de sécurité ainsi que les autres accessoires.