

# Malibu/Sovereign

## Bain assisté avec fauteuil de transfert

**1**

Placer le bouchon sur la bonde.

**2**

Risque de brûlures

Appuyer sur le bouton de remplissage automatique. Mettre la main dans l'eau pour évaluer la température. Régler la température, s'il y a lieu.

**3**

Le remplissage s'arrête automatiquement lorsque la baignoire est remplie.

**4**

Serrer les freins.

**5**

Placer le patient sur le fauteuil de transfert. Mettre la sangle de sécurité sur le patient.

**6**

Desserrer les freins.

**7**

Placer le fauteuil de transfert à côté du bras de levage.

**8**

Abaisser la baignoire jusqu'à sa position la plus basse.

**9**

Appuyer sur le bouton Lever pour sortir pour déplacer le bras de levage hors de la baignoire.

**10**

Risque de chute

Attacher le fauteuil de transfert au bras de levage.

**11**

Risque de coincement

Pour relever le bras de levage, appuyer sur le bouton Lever pour entrer, afin que le fauteuil de transfert soit fixé sur le bras de levage et que le châssis soit dégagé du sol.

**12**

Tirer le loquet à ressort (A) tout en faisant glisser le châssis du fauteuil de transfert (B).

**13**

Risque de coincement

Appuyer sur le bouton Lever pour entrer afin que le fauteuil pivote dans la baignoire. Aider le patient à déplacer ses jambes.

**14**

Régler la hauteur de la baignoire par rapport au personnel soignant.

**15**

Baigner et doucher le patient.

**16**

Ouvrir la bonde.

**17**

Abaisser la baignoire jusqu'à sa position la plus basse.

**18**

Risque de coincement

Appuyer sur le bouton Lever pour sortir afin que le fauteuil pivote hors de la baignoire. Aider le patient à déplacer ses jambes.

**19**

Abaisser le fauteuil en conservant un espace suffisant pour faire glisser le châssis sur les rails sous le fauteuil.

**20**

Risque de chute

Cliquez

Les freins doivent être débloqués. Le loquet à ressort doit s'encliquer en place. Le châssis à roues doit être solidement fixé.

**21**

Risque de chute

Appuyer sur le bouton Lever pour sortir pour abaisser le fauteuil au sol. Arrêter l'abaissement dès que le châssis à roues touche le sol. Soulever le loquet de sécurité du bras de levage (A), puis continuer à descendre (B).

**22**

Veiller à ce que le fauteuil soit complètement décroché avant de procéder au transport.