

Carevo



Transferencias desde la cama

1

Active los frenos de la cama.

2

Coloque el accesorio deslizante debajo del paciente.
Coloque una almohada debajo de la cabeza del paciente.
Abata la barandilla de la cama del lado del traslado.

3

Coloque la camilla de ducha junto al lado por el que se va a trasladar al paciente de la cama. Doble el colchón de la camilla de ducha por el lado por el que se va a trasladar al paciente.

4

Presione para fijar las esquinas del colchón de la camilla de ducha situadas entre los paneles de la cabeza / los pies y la placa de soporte.

5

Ajuste la altura de modo que la camilla de ducha esté un poco más baja que la cama.

6 **Riesgo de vuelco**

No levante ni baje otros equipos.
Empuje la camilla de ducha contra la cama.

7 **Riesgo de caída**

Active los frenos de la camilla de ducha.

8 **Riesgo de vuelco**

No levante ni baje otros equipos.
Transfiera al paciente.
Vigile la cabeza del paciente.


Continúe con los pasos de la página siguiente

Transferencia desde la cama (continuación)

9



Riesgo de deslizamiento

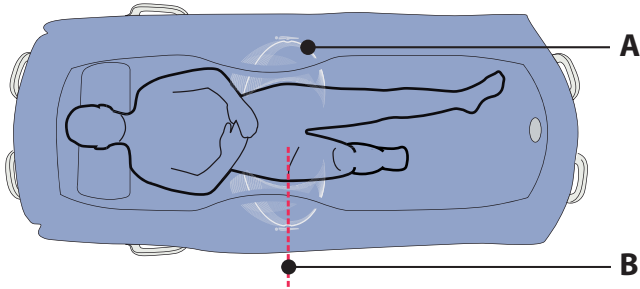


Mantenga los lados del colchón hacia arriba y no los doble. Coloque al paciente correctamente en Flexi Zone. Coloque los glúteos del paciente en el contorno gráfico (A). Las articulaciones de la cadera del paciente deben estar alineadas con la figura humana (B).

10



Sustituya la almohada de la cama por el cojín para cabeza de la camilla de ducha. Retire el accesorio deslizante.

11

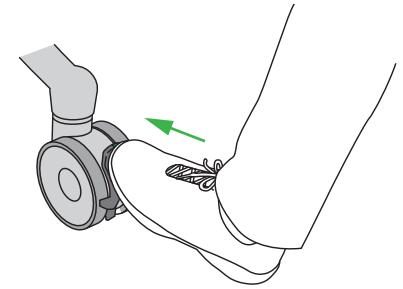

Desactive los frenos de la camilla de ducha.

12




Riesgo de atrapamiento
Riesgo de caída



Mantenga el pelo, los brazos y los pies del paciente cerca del cuerpo. Retire la camilla de ducha de la cama y suba y bloquee el soporte lateral de la camilla de ducha.


13

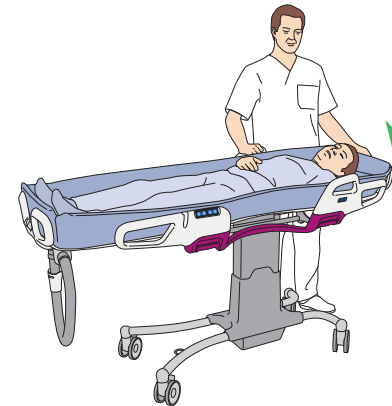

Suba el respaldo ajustable de la camilla de ducha, en caso de haberlo. Traslade al paciente.


Transferencia a la cama

1

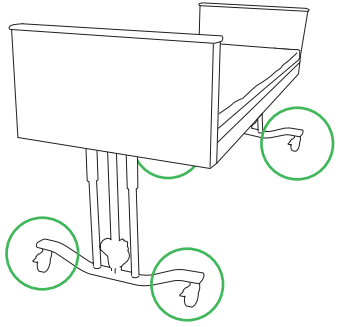

Active los frenos de la cama.
Abata la barandilla de la cama del lado por el que se va a trasladar al paciente.

2

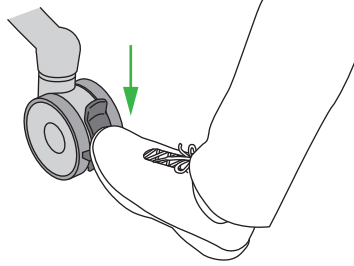


Active los frenos de la camilla de ducha.
Baje el respaldo ajustable de la camilla de ducha, en caso de haberlo.

3



Coloque el accesorio deslizante debajo del paciente.

4

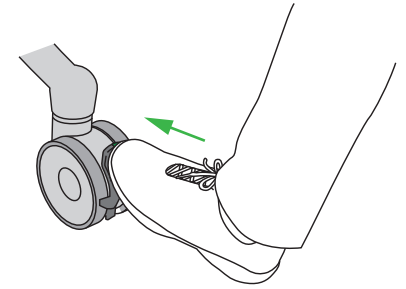

Desactive los frenos de la camilla de ducha.

5



Riesgo de atrapamiento




Mantenga el pelo, los brazos y los pies del paciente cerca del cuerpo.
Coloque la camilla de ducha cerca de la cama.
Abata el soporte lateral de la camilla de ducha que hay en el lado por el que se va a trasladar al paciente.

6



Riesgo de vuelco

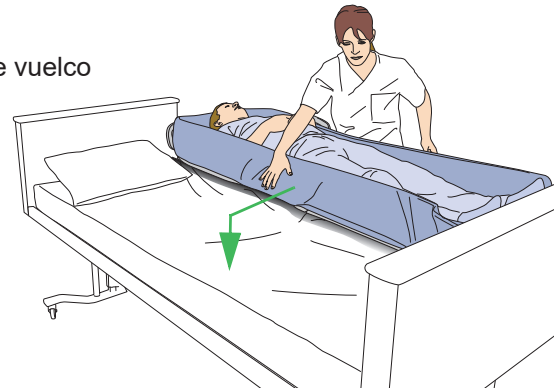


Justo después, coloque la camilla de ducha de manera que se superponga a la cama.
Baje la camilla de ducha hasta la cama para realizar un traslado correcto.

7



Riesgo de caída

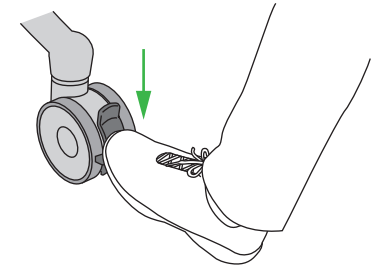


Active los frenos de la camilla de ducha.

Continúe con los pasos de la página siguiente


Transferencia a la cama (continuación)

8

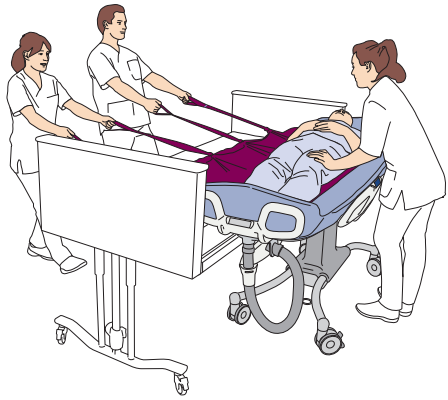


Asegúrese de que el colchón de la camilla de ducha esté encima de la cama.
Traslade al paciente con el accesorio deslizante.
Vigile la cabeza del paciente.

9

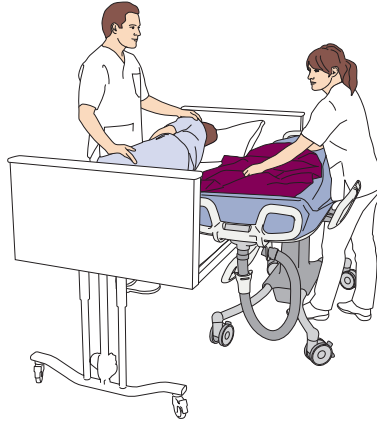


Sustituya el cojín para cabeza de la camilla de ducha por la almohada de la cama.
Retire el accesorio deslizante.

10

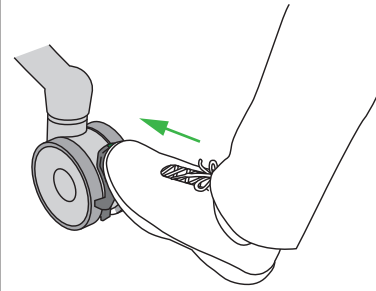

Desactive los frenos de la camilla de ducha.


11

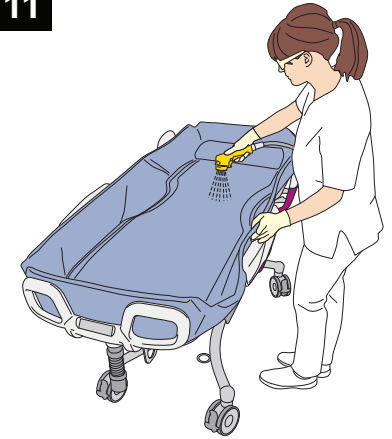

Separe la camilla de ducha de la cama.
Desinfecte la camilla de ducha.

Transferencia desde la grúa con arnés

1

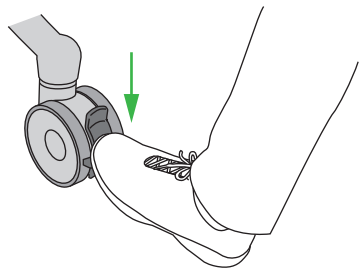


Camilla de ducha:

- Bájela hasta la altura más baja
- Active los frenos
- Suba y bloquee los soportes laterales
- Coloque el cojín para cabeza

2



Riesgo de atrapamiento
Riesgo de caída

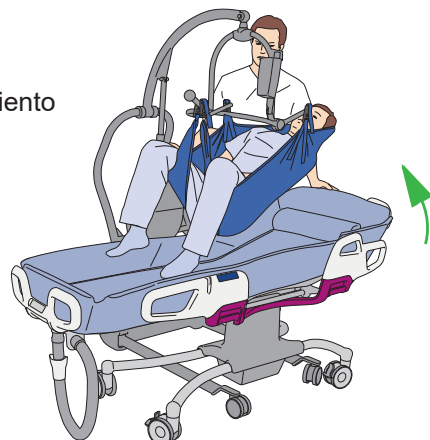


Mantenga el pelo, los brazos y los pies del paciente cerca del cuerpo.
Suba el respaldo ajustable de la camilla de ducha a una posición sentada, en caso de haberlo. Baje al paciente hasta la camilla de ducha.

3




Riesgo de deslizamiento

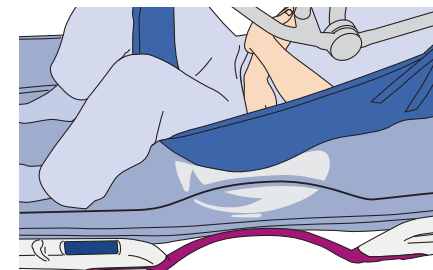


Mantenga los lados del colchón hacia arriba y no los doble. Coloque al paciente correctamente en Flexi Zone. Coloque los glúteos del paciente en el contorno gráfico. Las articulaciones de la cadera del paciente deben estar alineadas con la figura humana.

4

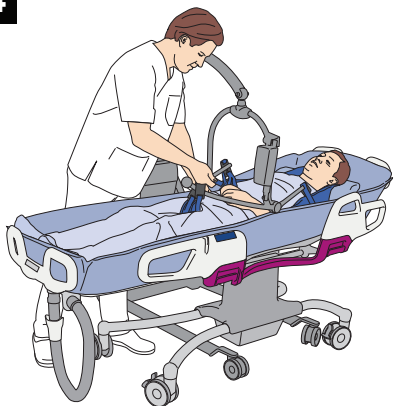

Retire el arnés del bastidor.
Separe la grúa de la camilla de ducha.

5

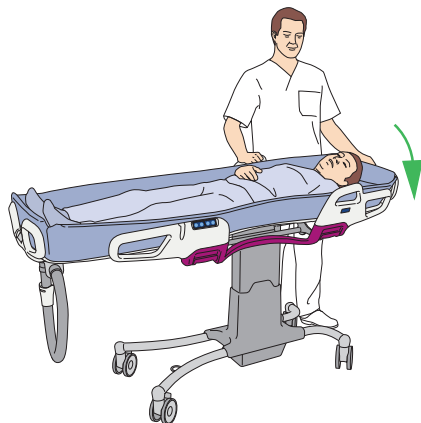


Ajuste la camilla de ducha a una altura ergonómica.
Baje el respaldo ajustable de la camilla de ducha, en caso de haberlo.

6



Retire el arnés de debajo del paciente.


7

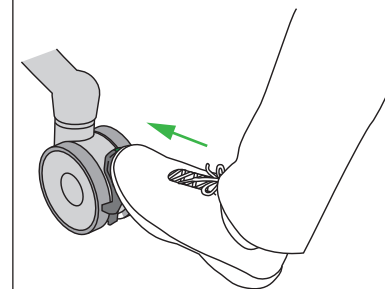

Desactive los frenos de la camilla de ducha.
Traslade al paciente.


Transferencia a la grúa con arnés

1

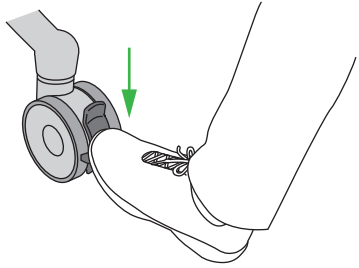


Active los frenos de la camilla de ducha.

2

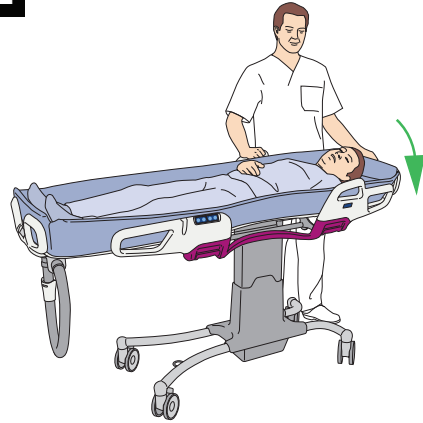

Baje el respaldo ajustable de la camilla de ducha, en caso de haberlo.

3

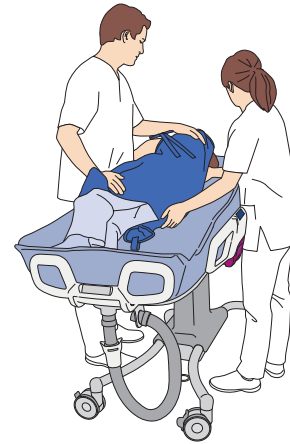

Colóquelo el arnés al paciente.

4



Baje la camilla de ducha hasta su altura más baja.
Coloque el bastidor de la grúa encima de la camilla de ducha. Coloque el arnés en el bastidor.

5




Riesgo de atrapamiento
Riesgo de caída



Mantenga el pelo, los brazos y los pies del paciente cerca del cuerpo.
Bloquee los soportes laterales.
Levante al paciente de la camilla de ducha.


6

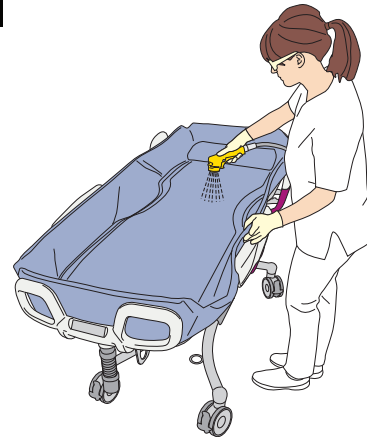

Desinfecte la camilla de ducha.

Ducha del paciente

1

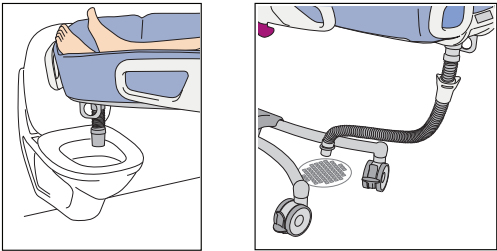


A

B

Coloque el desagüe superior de la camilla de ducha sobre un inodoro / sumidero de descarga (A) o coloque la salida del desagüe inferior en el soporte de la manguera de desagüe, sobre el desagüe del suelo (B).

2

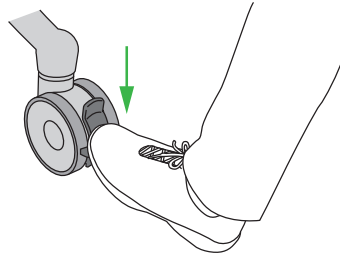


Active los frenos de la camilla de ducha.

3




Riesgo de quemadura

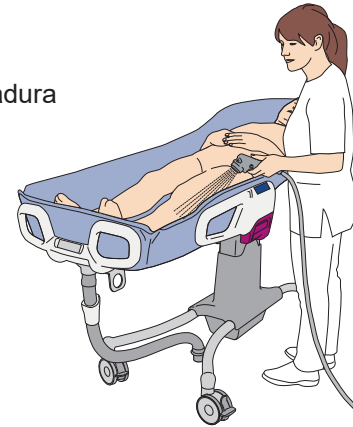


Devista al paciente.
Regule la temperatura del agua.
No dirija el cabezal de ducha hacia el paciente.
Abra el agua.
Compruebe la temperatura con su mano sin guante.

4

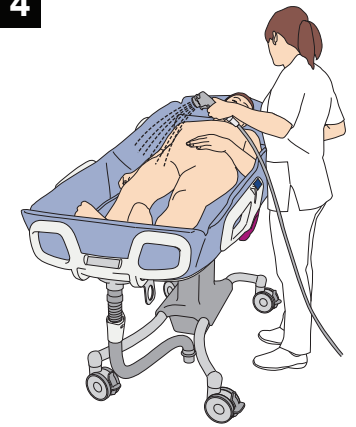


Duche al paciente.
Para tomar un baño, coloque el tapón de desagüe en el desagüe del colchón.

5

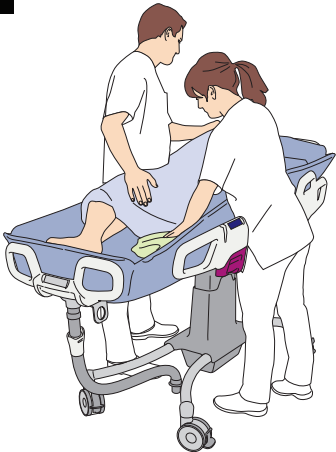

Deje que salga el agua y seque al paciente y el colchón.

6

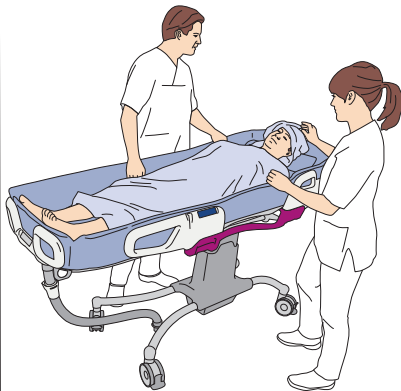


Cubra o vista al paciente.

7




Vuelva a colocar la salida del desagüe inferior en el soporte o fije el desagüe inferior al desagüe superior.

8

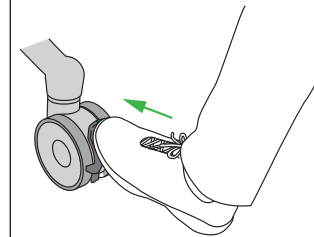

Desactive los frenos de la camilla de ducha.

9

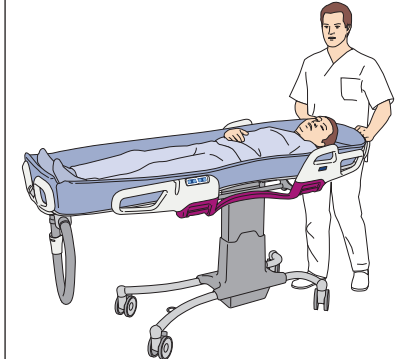

Traslade al paciente.