

Carevo

Transfert depuis le lit



1

Serrer les freins du lit.

2

Placer un drap de transfert sous le patient. Placer un coussin sous la tête du patient. Rabattre la barrière de lit côté transfert.

3

Placer le chariot de douche près du côté transfert du lit. Rabattre le matelas du chariot de douche côté transfert.

4

Enfoncer et fixer les coins du matelas du chariot de douche entre le panneau de tête/pieds et la plaque de support.

5

Régler la hauteur du chariot de douche afin qu'il soit légèrement plus bas que le lit.

6 Risque de basculement

Ne pas relever ou abaisser un autre équipement. Pousser le chariot de douche contre le lit.

7 Risque de chute

Serrer les freins du chariot de douche.

8 Risque de basculement

Ne pas relever ou abaisser un autre équipement. Transférer le patient. Garder un œil sur la tête du patient.


Poursuivre avec les étapes de la page suivante

Transfert depuis le lit (suite)

9



Risque de glissement

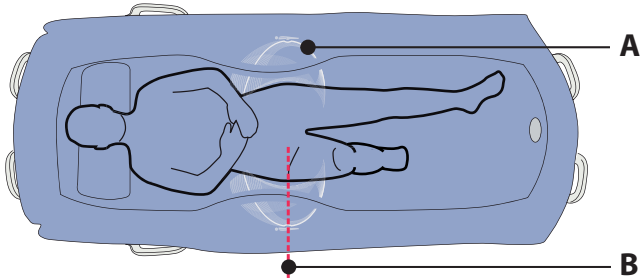


Maintenir les bords du matelas relevés, non pliés.
Positionner correctement le patient sur la Flexi Zone.
Fessier du patient dans le contour graphique (A).
Les plis de la hanche du patient sont alignés avec la représentation du corps humain (B).

10



Remplacer l'oreiller du lit par l'oreiller du chariot de douche.
Retirer le drap de transfert.

11

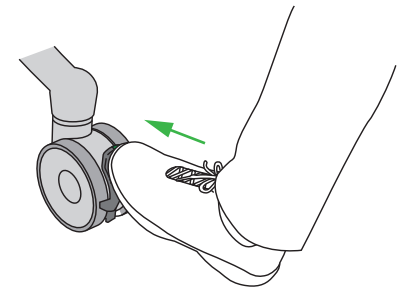


Libérer les freins du chariot de douche.

12




Risque de coincement
Risque de chute

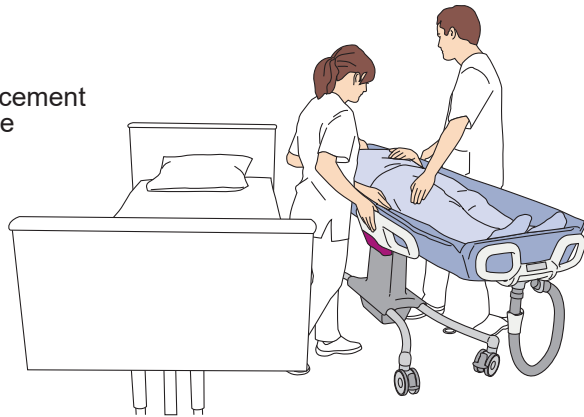

Maintenir les cheveux, les bras et les pieds du patient près du corps.
Écarter avec précaution le chariot de douche du lit de façon à ce que l'espace soit suffisant pour replier la barrière latérale du chariot de douche.


13

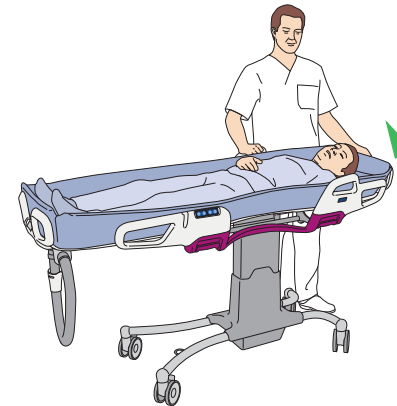

Relever le dossier réglable du chariot de douche (si le chariot en est pourvu).
Transporter le patient.


Transfert dans le lit

1

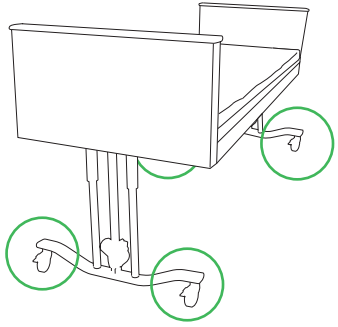

Serrer les freins du lit.
Rabattre la barrière de lit côté transfert.

2

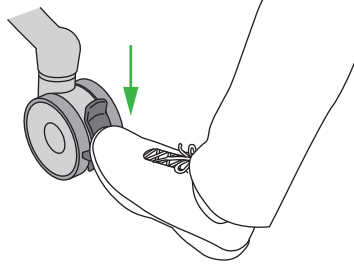


Serrer les freins du chariot de douche.
Faire descendre le dossier réglable
du chariot de douche (si le chariot
en est pourvu).

3



Placer un drap de transfert sous le patient.

4

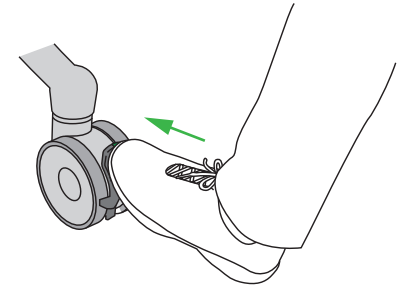


Libérer les freins du chariot
de douche.

5



Risque de coincement

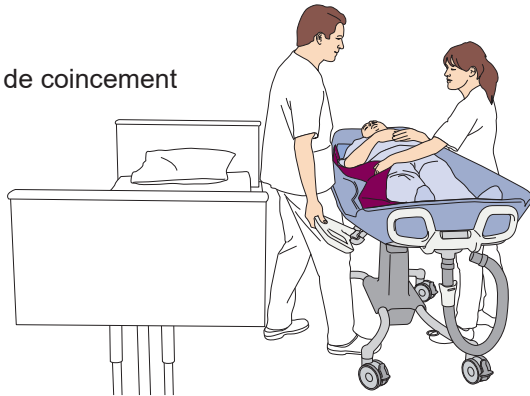


Maintenir les cheveux, les bras et les pieds du patient près
du corps.
Positionner le chariot de douche près du lit.
Rabattre la barrière latérale du chariot de douche côté transfert.

6



Risque de basculement

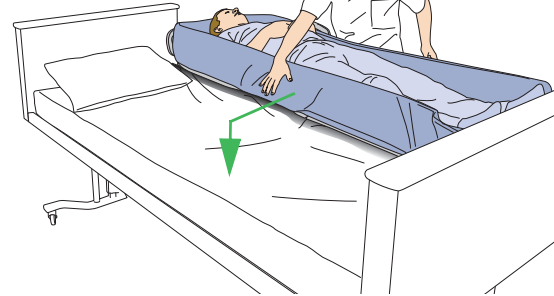


Positionner immédiatement le chariot de douche de façon
à ce qu'il chevauche le lit.
Faire descendre le chariot de douche sur le lit pour assurer
un transfert en toute sécurité.

7



Risque de chute

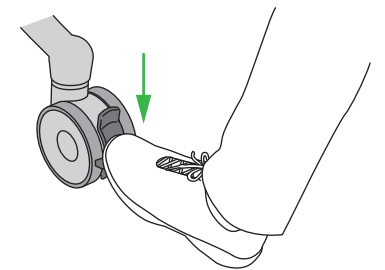


Serrer les freins du chariot
de douche.

Poursuivre avec les étapes de la page suivante


Transfert dans le lit (suite)

8

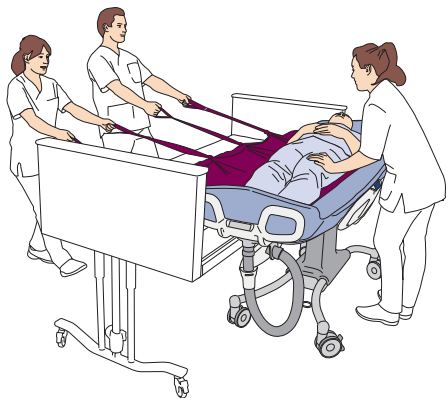


Vérifier que le matelas du chariot de douche se trouve au-dessus du lit.
Transférer le patient à l'aide du drap de transfert.
Garder un œil sur la tête du patient.

9

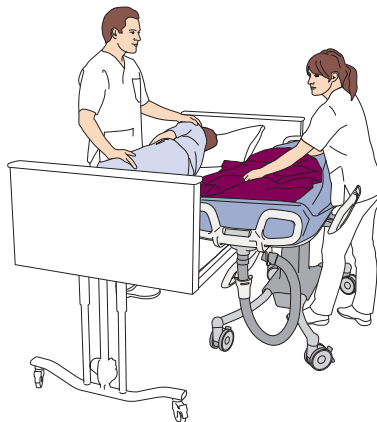


Remplacer l'oreiller du chariot de douche par l'oreiller du lit.
Retirer le drap de transfert.

10

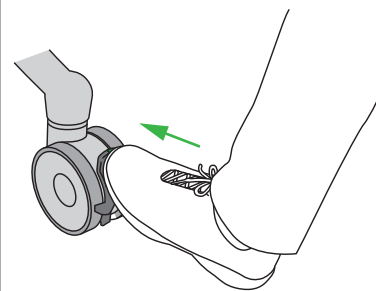

Libérer les freins du chariot de douche.


11

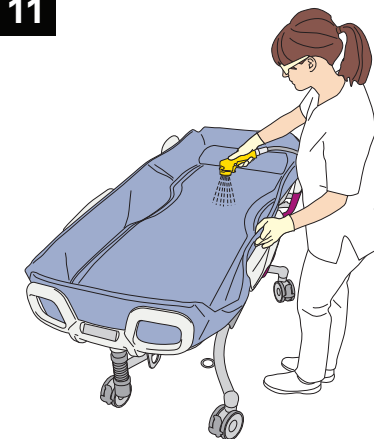

Éloigner le chariot de douche du lit.
Désinfecter le chariot de douche.

Transfert depuis le lève-personne

1

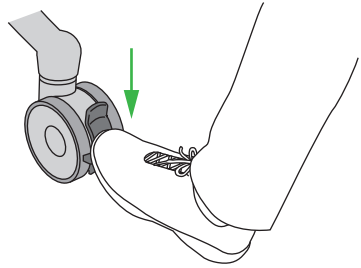


Chariot de douche :

- Faire descendre le système jusqu'à sa position la plus basse
- Serrer les freins
- Relever et bloquer les barrières latérales
- Positionner l'oreiller

2



Risque de coincement
Risque de chute

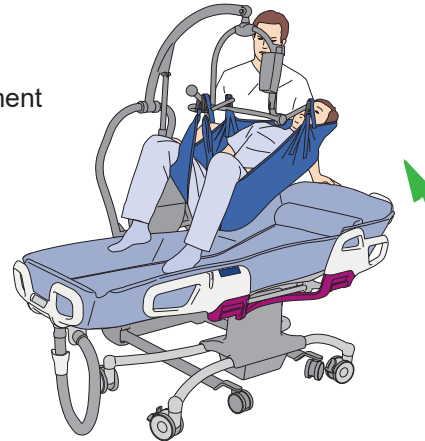


Maintenir les cheveux, les bras et les pieds du patient près du corps. Relever le dossier réglable du chariot de douche en position assise (si le chariot en est pourvu). Faire descendre le patient sur le chariot de douche.

3




Risque de glissement

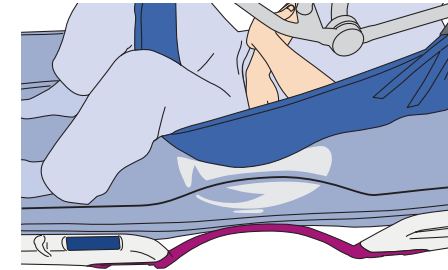


Maintenir les bords du matelas relevés, non pliés. Positionner correctement le patient sur la Flexi Zone. Fesser du patient dans le contour graphique. Les plis de la hanche du patient sont alignés avec la représentation du corps humain.

4

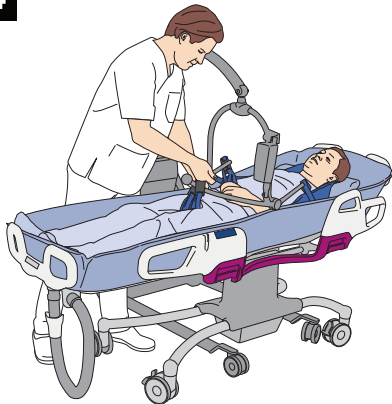

Détacher le harnais du berceau. Éloigner le lève-personne du chariot de douche.

5

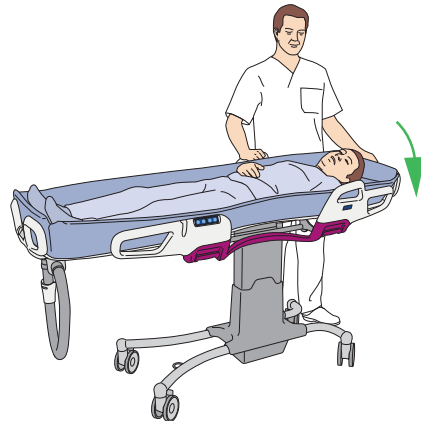


Régler le chariot de douche à une hauteur ergonomique. Faire descendre le dossier réglable du chariot de douche (si le chariot en est pourvu).

6



Retirer le harnais installé sous le patient.


7

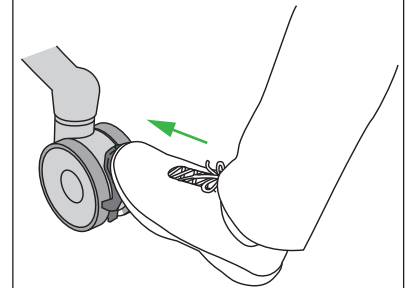

Libérer les freins du chariot de douche. Transporter le patient.


Transfert dans le lève-personne

1

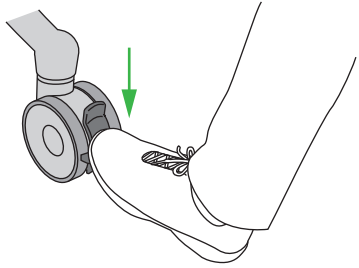

Serrer les freins du chariot de douche.

2

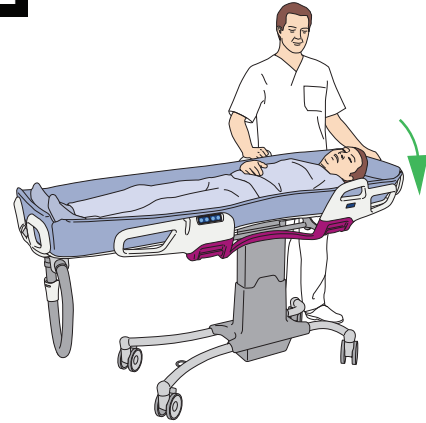

Faire descendre le dossier réglable du chariot de douche (si le chariot en est pourvu).

3



Installer le harnais sur le patient.

4




Faire descendre le chariot de douche jusqu'à la position la plus basse. Installer le berceau mobile du lève-personne au-dessus du chariot de douche. Fixer le harnais au berceau.

5




Risque de coincement
Risque de chute

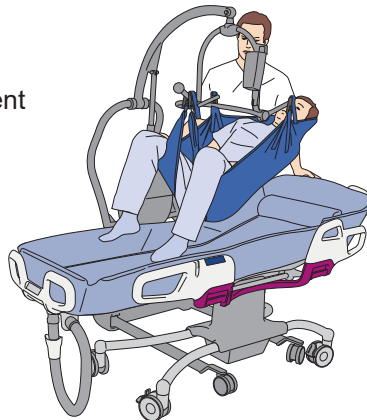

Maintenir les cheveux, les bras et les pieds du patient près du corps.
Bloquer les barrières latérales.
Soulever le patient pour le sortir du chariot de douche.


6

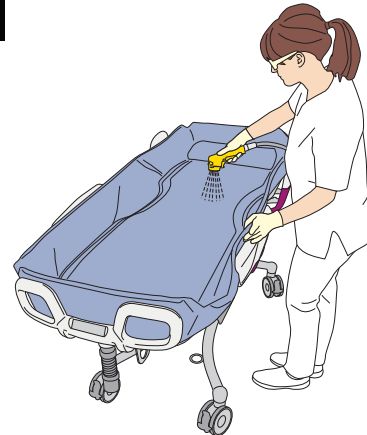

Désinfecter le chariot de douche.

Doucher le patient

1

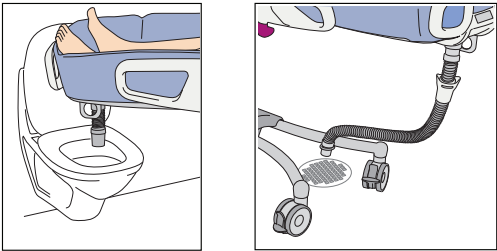


A

B

Positionner l'évacuation supérieure du chariot de douche sur les toilettes/le lavabo (A) ou positionner l'évacuation inférieure dans le support de tuyau de drainage, au-dessus du siphon de sol (B).

2

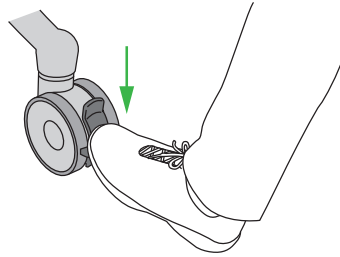


Serrer les freins du chariot de douche.

3




Risque de brûlures

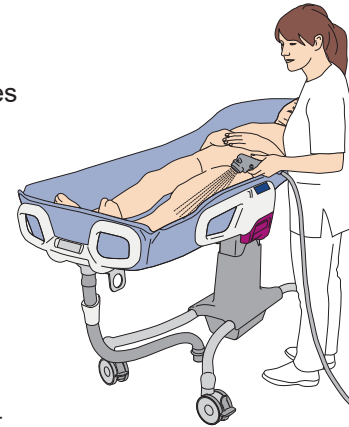


Déshabiller le patient.
Régler la température de l'eau.
Ne pas diriger la douchette sur le patient.
Ouvrir l'alimentation en eau.
Vérifier la température avec votre main.

4

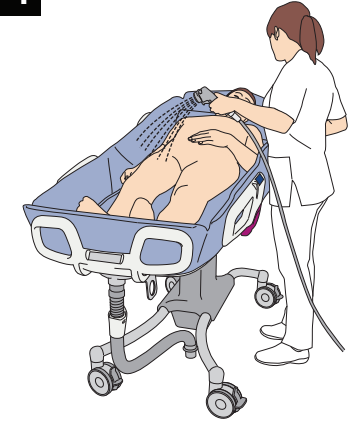


Doucher le patient.
Pour un bain peu profond, bouchez l'évacuation du matelas.

5

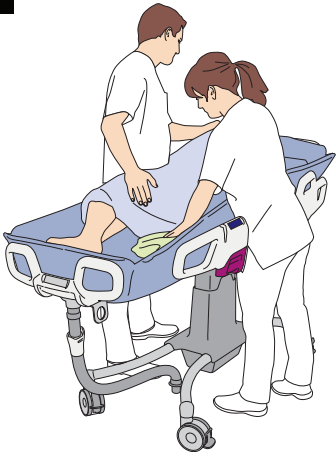

Évacuer l'eau et sécher le patient ainsi que le matelas.

6

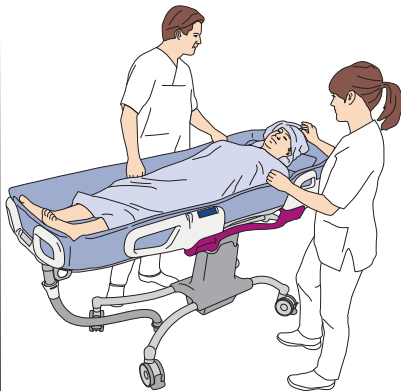


Couvrir ou habiller le patient.

7




Replacer la sortie d'évacuation inférieure dans le support ou fixer l'évacuation inférieure à l'évacuation supérieure.

8

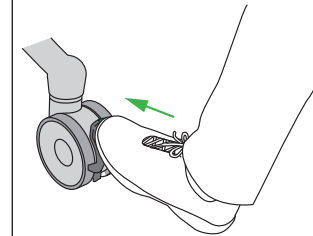

Libérer les freins du chariot de douche.

9

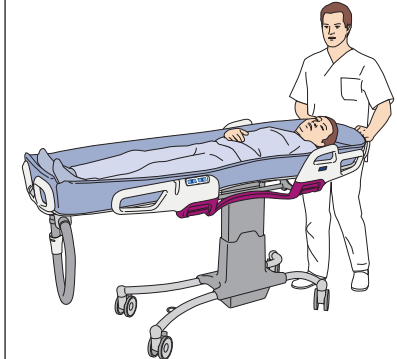

Transporter le patient.